

## INSTRUÇÃO DE USO

**Nome Técnico:** Kit Instrumental

**Nome Comercial:** CAIXAS E ESTOJOS POLIMÉRICOS - TECHIMPORT

**Registro ANVISA:** 81118460038

### Modelos comerciais: CAIXAS E ESTOJOS POLIMÉRICOS - TECHIMPORT

Código	Descrição
TI203.0002.001	Estojo para Implantes/Instrumental E2001
TI203.0002.002	Estojo para Implantes/Instrumental E2002
TI203.0002.003	Estojo para Implantes/Instrumental E2003
TI203.0002.004	Estojo para Implantes/Instrumental E2004
TI203.0002.005	Estojo para Implantes/Instrumental E2005
TI203.0002.006	Estojo para Implantes/Instrumental E2006
TI203.0002.007	Estojo para Implantes/Instrumental E2007
TI203.0002.008	Estojo para Implantes/Instrumental E2008
TI203.0002.009	Estojo para Implantes/Instrumental E2009
TI203.0002.010	Estojo para Implantes/Instrumental E2010
TI203.0002.011	Estojo para Implantes/Instrumental E2011
TI203.0002.012	Estojo para Implantes/Instrumental E2012
TI203.0002.013	Estojo para Implantes/Instrumental E2013
TI203.0002.014	Estojo para Implantes/Instrumental E2014
TI203.0002.015	Estojo para Implantes/Instrumental E2015
TI203.0002.016	Estojo para Implantes/Instrumental E2016
TI203.0002.017	Estojo para Implantes/Instrumental E2017
TI203.0002.018	Estojo para Implantes/Instrumental E2018
TI203.0002.019	Estojo para Implantes/Instrumental E2019
TI203.0002.020	Estojo para Implantes/Instrumental E2020
TI203.0002.021	Estojo para Implantes/Instrumental E2021
TI203.0002.022	Estojo para Implantes/Instrumental E2022
TI203.0002.023	Estojo para Implantes/Instrumental E2023
TI203.0002.024	Estojo para Implantes/Instrumental E2024
TI203.0002.025	Estojo para Implantes/Instrumental E2025
TI203.0002.026	Estojo para Implantes/Instrumental E2026
TI203.0002.027	Estojo para Implantes/Instrumental E2027
TI203.0002.028	Estojo para Implantes/Instrumental E2028
TI203.0002.029	Estojo para Implantes/Instrumental E2029
TI203.0002.030	Estojo para Implantes/Instrumental E2030
TI203.0002.031	Estojo para Implantes/Instrumental E2031
TI203.0002.032	Estojo para Implantes/Instrumental E2032
TI203.0002.033	Estojo para Implantes/Instrumental E2033
TI203.0002.034	Estojo para Implantes/Instrumental E2034

TI203.0002.035	Estojo para Implantes/Instrumental E2035
TI203.0002.036	Estojo para Implantes/Instrumental E2036
TI203.0002.037	Estojo para Implantes/Instrumental E2037
TI203.0002.038	Estojo para Implantes/Instrumental E2038
TI203.0002.039	Estojo para Implantes/Instrumental E2039
TI203.0002.040	Estojo para Implantes/Instrumental E2040
TI203.0002.041	Estojo para Implantes/Instrumental E2041
TI203.0002.042	Estojo para Implantes/Instrumental E2042
TI203.0002.043	Estojo para Implantes/Instrumental E2043
TI203.0002.044	Estojo para Implantes/Instrumental E2044
TI203.0002.045	Estojo para Implantes/Instrumental E2045
TI203.0002.046	Estojo para Implantes/Instrumental E2046
TI203.0002.047	Estojo para Implantes/Instrumental E2047
TI203.0002.048	Estojo para Implantes/Instrumental E2048
TI203.0002.049	Estojo para Implantes/Instrumental E2049
TI203.0002.050	Estojo para Implantes/Instrumental E2050
TI203.0002.051	Estojo para Implantes/Instrumental E2051
TI203.0002.052	Estojo para Implantes/Instrumental E2052
TI203.0002.053	Estojo para Implantes/Instrumental E2053
TI203.0002.054	Estojo para Implantes/Instrumental E2054
TI203.0002.055	Estojo para Implantes/Instrumental E2055
TI203.0002.056	Estojo para Implantes/Instrumental E2056
TI203.0002.057	Estojo para Implantes/Instrumental E2057
TI203.0002.058	Estojo para Implantes/Instrumental E2058
TI203.0002.059	Estojo para Implantes/Instrumental E2059
TI203.0002.060	Estojo para Implantes/Instrumental E2060
TI203.0003.001	Estojo para Implantes/Instrumental E3001
TI203.0003.002	Estojo para Implantes/Instrumental E3002
TI203.0003.003	Estojo para Implantes/Instrumental E3003
TI203.0003.004	Estojo para Implantes/Instrumental E3004
TI203.0003.005	Estojo para Implantes/Instrumental E3005
TI203.0003.006	Estojo para Implantes/Instrumental E3006
TI203.0003.007	Estojo para Implantes/Instrumental E3007
TI203.0003.008	Estojo para Implantes/Instrumental E3008
TI203.0003.009	Estojo para Implantes/Instrumental E3009
TI203.0003.010	Estojo para Implantes/Instrumental E3010
TI203.0003.011	Estojo para Implantes/Instrumental E3011
TI203.0003.012	Estojo para Implantes/Instrumental E3012
TI203.0003.013	Estojo para Implantes/Instrumental E3013
TI203.0003.014	Estojo para Implantes/Instrumental E3014
TI203.0003.015	Estojo para Implantes/Instrumental E3015
TI203.0003.016	Estojo para Implantes/Instrumental E3016
TI203.0003.017	Estojo para Implantes/Instrumental E3017

TI203.0003.018	Estojo para Implantes/Instrumental E3018
TI203.0003.019	Estojo para Implantes/Instrumental E3019
TI203.0003.020	Estojo para Implantes/Instrumental E3020
TI203.0003.021	Estojo para Implantes/Instrumental E3021
TI203.0003.022	Estojo para Implantes/Instrumental E3022
TI203.0003.023	Estojo para Implantes/Instrumental E3023
TI203.0003.024	Estojo para Implantes/Instrumental E3024
TI203.0003.025	Estojo para Implantes/Instrumental E3025
TI203.0003.026	Estojo para Implantes/Instrumental E3026
TI203.0003.027	Estojo para Implantes/Instrumental E3027
TI203.0003.028	Estojo para Implantes/Instrumental E3028
TI203.0003.029	Estojo para Implantes/Instrumental E3029
TI203.0003.030	Estojo para Implantes/Instrumental E3030
TI203.0004.001	Estojo para Implantes/Instrumental E4001
TI203.0004.002	Estojo para Implantes/Instrumental E4002
TI203.0004.003	Estojo para Implantes/Instrumental E4003
TI203.0004.004	Estojo para Implantes/Instrumental E4004
TI203.0004.005	Estojo para Implantes/Instrumental E4005
TI203.0004.006	Estojo para Implantes/Instrumental E4006
TI203.0004.007	Estojo para Implantes/Instrumental E4007
TI203.0004.008	Estojo para Implantes/Instrumental E4008
TI203.0004.009	Estojo para Implantes/Instrumental E4009
TI203.0004.010	Estojo para Implantes/Instrumental E4010
TI203.0004.011	Estojo para Implantes/Instrumental E4011
TI203.0004.012	Estojo para Implantes/Instrumental E4012
TI203.0004.013	Estojo para Implantes/Instrumental E4013
TI203.0004.014	Estojo para Implantes/Instrumental E4014
TI203.0004.015	Estojo para Implantes/Instrumental E4015
TI203.0004.016	Estojo para Implantes/Instrumental E4016
TI203.0004.017	Estojo para Implantes/Instrumental E4017
TI203.0004.018	Estojo para Implantes/Instrumental E4018
TI203.0004.019	Estojo para Implantes/Instrumental E4019
TI203.0004.020	Estojo para Implantes/Instrumental E4020
TI203.0004.021	Estojo para Implantes/Instrumental E4021
TI203.0004.022	Estojo para Implantes/Instrumental E4022
TI203.0004.023	Estojo para Implantes/Instrumental E4023
TI203.0004.024	Estojo para Implantes/Instrumental E4024
TI203.0004.025	Estojo para Implantes/Instrumental E4025
TI203.0004.026	Estojo para Implantes/Instrumental E4026
TI203.0004.027	Estojo para Implantes/Instrumental E4027
TI203.0004.028	Estojo para Implantes/Instrumental E4028
TI203.0004.029	Estojo para Implantes/Instrumental E4029
TI203.0004.030	Estojo para Implantes/Instrumental E4030

TI203.0005.001	Estojo para Implantes/Instrumental E5001
TI203.0005.002	Estojo para Implantes/Instrumental E5002
TI203.0005.003	Estojo para Implantes/Instrumental E5003
TI203.0005.004	Estojo para Implantes/Instrumental E5004
TI203.0005.005	Estojo para Implantes/Instrumental E5005
TI203.0005.006	Estojo para Implantes/Instrumental E5006
TI203.0005.007	Estojo para Implantes/Instrumental E5007
TI203.0005.008	Estojo para Implantes/Instrumental E5008
TI203.0005.009	Estojo para Implantes/Instrumental E5009
TI203.0005.010	Estojo para Implantes/Instrumental E5010
TI203.0005.011	Estojo para Implantes/Instrumental E5011
TI203.0005.012	Estojo para Implantes/Instrumental E5012
TI203.0005.013	Estojo para Implantes/Instrumental E5013
TI203.0005.014	Estojo para Implantes/Instrumental E5014
TI203.0005.015	Estojo para Implantes/Instrumental E5015
TI203.0005.016	Estojo para Implantes/Instrumental E5016
TI203.0005.017	Estojo para Implantes/Instrumental E5017
TI203.0005.018	Estojo para Implantes/Instrumental E5018
TI203.0005.019	Estojo para Implantes/Instrumental E5019
TI203.0005.020	Estojo para Implantes/Instrumental E5020
TI203.0005.021	Estojo para Implantes/Instrumental E5021
TI203.0005.022	Estojo para Implantes/Instrumental E5022
TI203.0005.023	Estojo para Implantes/Instrumental E5023
TI203.0005.024	Estojo para Implantes/Instrumental E5024
TI203.0005.025	Estojo para Implantes/Instrumental E5025
TI203.0005.026	Estojo para Implantes/Instrumental E5026
TI203.0005.027	Estojo para Implantes/Instrumental E5027
TI203.0005.028	Estojo para Implantes/Instrumental E5028
TI203.0005.029	Estojo para Implantes/Instrumental E5029
TI203.0005.030	Estojo para Implantes/Instrumental E5030
TI203.0006.001	Estojo para Implantes E6001
TI203.0006.002	Estojo para Implantes E6002
TI203.0006.003	Estojo para Implantes E6003
TI203.0006.004	Estojo para Implantes E6004
TI203.0006.005	Estojo para Implantes E6005
TI203.0006.006	Estojo para Implantes E6006
TI203.0006.007	Estojo para Implantes E6007
TI203.0006.008	Estojo para Implantes E6008
TI203.0006.009	Estojo para Implantes E6009
TI203.0006.010	Estojo para Implantes E6010
TI203.0006.011	Estojo para Implantes E6011
TI203.0006.012	Estojo para Implantes E6012
TI203.0006.013	Estojo para Implantes E6013

TI203.0006.014	Estojo para Implantes E6014
TI203.0006.015	Estojo para Implantes E6015
TI203.0006.016	Estojo para Implantes E6016
TI203.0006.017	Estojo para Implantes E6017
TI203.0006.018	Estojo para Implantes E6018
TI203.0006.019	Estojo para Implantes E6019
TI203.0006.020	Estojo para Implantes E6020
TI203.0006.021	Estojo para Implantes E6021
TI203.0006.022	Estojo para Implantes E6022
TI203.0006.023	Estojo para Implantes E6023
TI203.0006.024	Estojo para Implantes E6024
TI203.0006.025	Estojo para Implantes E6025
TI203.0006.026	Estojo para Implantes E6026
TI203.0006.027	Estojo para Implantes E6027
TI203.0006.028	Estojo para Implantes E6028
TI203.0006.029	Estojo para Implantes E6029
TI203.0006.030	Estojo para Implantes E6030
TI203.0007.001	Estojo Circular para Implantes E7001
TI203.0007.002	Estojo Circular para Implantes E7002
TI203.0007.003	Estojo Circular para Implantes E7003
TI203.0007.004	Estojo Circular para Implantes E7004
TI203.0007.005	Estojo Circular para Implantes E7005
TI203.0007.006	Estojo Circular para Implantes E7006
TI203.0007.007	Estojo Circular para Implantes E7007
TI203.0007.008	Estojo Circular para Implantes E7008
TI203.0007.009	Estojo Circular para Implantes E7009
TI203.0007.010	Estojo Circular para Implantes E7010
TI203.0007.011	Estojo Circular para Implantes E7011
TI203.0007.012	Estojo Circular para Implantes E7012
TI203.0007.013	Estojo Circular para Implantes E7013
TI203.0007.014	Estojo Circular para Implantes E7014
TI203.0007.015	Estojo Circular para Implantes E7015
TI203.0007.016	Estojo Circular para Implantes E7016
TI203.0007.017	Estojo Circular para Implantes E7017
TI203.0007.018	Estojo Circular para Implantes E7018
TI203.0007.019	Estojo Circular para Implantes E7019
TI203.0007.020	Estojo Circular para Implantes E7020
TI203.0007.021	Estojo Circular para Implantes E7021
TI203.0007.022	Estojo Circular para Implantes E7022
TI203.0007.023	Estojo Circular para Implantes E7023
TI203.0007.024	Estojo Circular para Implantes E7024
TI203.0007.025	Estojo Circular para Implantes E7025
TI203.0007.026	Estojo Circular para Implantes E7026

TI203.0007.027	Estojo Circular para Implantes E7027
TI203.0007.028	Estojo Circular para Implantes E7028
TI203.0007.029	Estojo Circular para Implantes E7029
TI203.0007.030	Estojo Circular para Implantes E7030
TI204.0002.001	Tampa para Estojo T2001
TI204.0002.002	Tampa para Estojo T2002
TI204.0002.003	Tampa para Estojo T2003
TI204.0002.004	Tampa para Estojo T2004
TI204.0002.005	Tampa para Estojo T2005
TI204.0002.006	Tampa para Estojo T2006
TI204.0002.007	Tampa para Estojo T2007
TI204.0002.008	Tampa para Estojo T2008
TI204.0002.009	Tampa para Estojo T2009
TI204.0002.010	Tampa para Estojo T2010
TI204.0002.011	Tampa para Estojo T2011
TI204.0002.012	Tampa para Estojo T2012
TI204.0002.013	Tampa para Estojo T2013
TI204.0002.014	Tampa para Estojo T2014
TI204.0002.015	Tampa para Estojo T2015
TI204.0002.016	Tampa para Estojo T2016
TI204.0002.017	Tampa para Estojo T2017
TI204.0002.018	Tampa para Estojo T2018
TI204.0002.019	Tampa para Estojo T2019
TI204.0002.020	Tampa para Estojo T2020
TI204.0002.021	Tampa para Estojo T2021
TI204.0002.022	Tampa para Estojo T2022
TI204.0002.023	Tampa para Estojo T2023
TI204.0002.024	Tampa para Estojo T2024
TI204.0002.025	Tampa para Estojo T2025
TI204.0002.026	Tampa para Estojo T2026
TI204.0002.027	Tampa para Estojo T2027
TI204.0002.028	Tampa para Estojo T2028
TI204.0002.029	Tampa para Estojo T2029
TI204.0002.030	Tampa para Estojo T2030
TI204.0002.031	Tampa para Estojo T2031
TI204.0002.032	Tampa para Estojo T2032
TI204.0002.033	Tampa para Estojo T2033
TI204.0002.034	Tampa para Estojo T2034
TI204.0002.035	Tampa para Estojo T2035
TI204.0002.036	Tampa para Estojo T2036
TI204.0002.037	Tampa para Estojo T2037
TI204.0002.038	Tampa para Estojo T2038
TI204.0002.039	Tampa para Estojo T2039

TI204.0002.040	Tampa para Estojo T2040
TI204.0002.041	Tampa para Estojo T2041
TI204.0002.042	Tampa para Estojo T2042
TI204.0002.043	Tampa para Estojo T2043
TI204.0002.044	Tampa para Estojo T2044
TI204.0002.045	Tampa para Estojo T2045
TI204.0002.046	Tampa para Estojo T2046
TI204.0002.047	Tampa para Estojo T2047
TI204.0002.048	Tampa para Estojo T2048
TI204.0002.049	Tampa para Estojo T2049
TI204.0002.050	Tampa para Estojo T2050
TI204.0002.051	Tampa para Estojo T2051
TI204.0002.052	Tampa para Estojo T2052
TI204.0002.053	Tampa para Estojo T2053
TI204.0002.054	Tampa para Estojo T2054
TI204.0002.055	Tampa para Estojo T2055
TI204.0002.056	Tampa para Estojo T2056
TI204.0002.057	Tampa para Estojo T2057
TI204.0002.058	Tampa para Estojo T2058
TI204.0002.059	Tampa para Estojo T2059
TI204.0002.060	Tampa para Estojo T2060
TI204.0003.001	Tampa para Estojo T3001
TI204.0003.002	Tampa para Estojo T3002
TI204.0003.003	Tampa para Estojo T3003
TI204.0003.004	Tampa para Estojo T3004
TI204.0003.005	Tampa para Estojo T3005
TI204.0003.006	Tampa para Estojo T3006
TI204.0003.007	Tampa para Estojo T3007
TI204.0003.008	Tampa para Estojo T3008
TI204.0003.009	Tampa para Estojo T3009
TI204.0003.010	Tampa para Estojo T3010
TI204.0003.011	Tampa para Estojo T3011
TI204.0003.012	Tampa para Estojo T3012
TI204.0003.013	Tampa para Estojo T3013
TI204.0003.014	Tampa para Estojo T3014
TI204.0003.015	Tampa para Estojo T3015
TI204.0003.016	Tampa para Estojo T3016
TI204.0003.017	Tampa para Estojo T3017
TI204.0003.018	Tampa para Estojo T3018
TI204.0003.019	Tampa para Estojo T3019
TI204.0003.020	Tampa para Estojo T3020
TI204.0003.021	Tampa para Estojo T3021
TI204.0003.022	Tampa para Estojo T3022

TI204.0003.023	Tampa para Estojo T3023
TI204.0003.024	Tampa para Estojo T3024
TI204.0003.025	Tampa para Estojo T3025
TI204.0003.026	Tampa para Estojo T3026
TI204.0003.027	Tampa para Estojo T3027
TI204.0003.028	Tampa para Estojo T3028
TI204.0003.029	Tampa para Estojo T3029
TI204.0003.030	Tampa para Estojo T3030
TI204.0004.001	Tampa para Estojo T4001
TI204.0004.002	Tampa para Estojo T4002
TI204.0004.003	Tampa para Estojo T4003
TI204.0004.004	Tampa para Estojo T4004
TI204.0004.005	Tampa para Estojo T4005
TI204.0004.006	Tampa para Estojo T4006
TI204.0004.007	Tampa para Estojo T4007
TI204.0004.008	Tampa para Estojo T4008
TI204.0004.009	Tampa para Estojo T4009
TI204.0004.010	Tampa para Estojo T4010
TI204.0004.011	Tampa para Estojo T4011
TI204.0004.012	Tampa para Estojo T4012
TI204.0004.013	Tampa para Estojo T4013
TI204.0004.014	Tampa para Estojo T4014
TI204.0004.015	Tampa para Estojo T4015
TI204.0004.016	Tampa para Estojo T4016
TI204.0004.017	Tampa para Estojo T4017
TI204.0004.018	Tampa para Estojo T4018
TI204.0004.019	Tampa para Estojo T4019
TI204.0004.020	Tampa para Estojo T4020
TI204.0004.021	Tampa para Estojo T4021
TI204.0004.022	Tampa para Estojo T4022
TI204.0004.023	Tampa para Estojo T4023
TI204.0004.024	Tampa para Estojo T4024
TI204.0004.025	Tampa para Estojo T4025
TI204.0004.026	Tampa para Estojo T4026
TI204.0004.027	Tampa para Estojo T4027
TI204.0004.028	Tampa para Estojo T4028
TI204.0004.029	Tampa para Estojo T4029
TI204.0004.030	Tampa para Estojo T4030
TI204.0005.001	Tampa para Estojo T5001
TI204.0005.002	Tampa para Estojo T5002
TI204.0005.003	Tampa para Estojo T5003
TI204.0005.004	Tampa para Estojo T5004
TI204.0005.005	Tampa para Estojo T5005



TI204.0005.006	Tampa para Estojo T5006
TI204.0005.007	Tampa para Estojo T5007
TI204.0005.008	Tampa para Estojo T5008
TI204.0005.009	Tampa para Estojo T5009
TI204.0005.010	Tampa para Estojo T5010
TI204.0005.011	Tampa para Estojo T5011
TI204.0005.012	Tampa para Estojo T5012
TI204.0005.013	Tampa para Estojo T5013
TI204.0005.014	Tampa para Estojo T5014
TI204.0005.015	Tampa para Estojo T5015
TI204.0005.016	Tampa para Estojo T5016
TI204.0005.017	Tampa para Estojo T5017
TI204.0005.018	Tampa para Estojo T5018
TI204.0005.019	Tampa para Estojo T5019
TI204.0005.020	Tampa para Estojo T5020
TI204.0005.021	Tampa para Estojo T5021
TI204.0005.022	Tampa para Estojo T5022
TI204.0005.023	Tampa para Estojo T5023
TI204.0005.024	Tampa para Estojo T5024
TI204.0005.025	Tampa para Estojo T5025
TI204.0005.026	Tampa para Estojo T5026
TI204.0005.027	Tampa para Estojo T5027
TI204.0005.028	Tampa para Estojo T5028
TI204.0005.029	Tampa para Estojo T5029
TI204.0005.030	Tampa para Estojo T5030
TI204.0006.001	Tampa para Estojo T6001
TI204.0006.002	Tampa para Estojo T6002
TI204.0006.003	Tampa para Estojo T6003
TI204.0006.004	Tampa para Estojo T6004
TI204.0006.005	Tampa para Estojo T6005
TI204.0006.006	Tampa para Estojo T6006
TI204.0006.007	Tampa para Estojo T6007
TI204.0006.008	Tampa para Estojo T6008
TI204.0006.009	Tampa para Estojo T6009
TI204.0006.010	Tampa para Estojo T6010
TI204.0006.011	Tampa para Estojo T6011
TI204.0006.012	Tampa para Estojo T6012
TI204.0006.013	Tampa para Estojo T6013
TI204.0006.014	Tampa para Estojo T6014
TI204.0006.015	Tampa para Estojo T6015
TI204.0006.016	Tampa para Estojo T6016
TI204.0006.017	Tampa para Estojo T6017
TI204.0006.018	Tampa para Estojo T6018

TI204.0006.019	Tampa para Estojo T6019
TI204.0006.020	Tampa para Estojo T6020
TI204.0006.021	Tampa para Estojo T6021
TI204.0006.022	Tampa para Estojo T6022
TI204.0006.023	Tampa para Estojo T6023
TI204.0006.024	Tampa para Estojo T6024
TI204.0006.025	Tampa para Estojo T6025
TI204.0006.026	Tampa para Estojo T6026
TI204.0006.027	Tampa para Estojo T6027
TI204.0006.028	Tampa para Estojo T6028
TI204.0006.029	Tampa para Estojo T6029
TI204.0006.030	Tampa para Estojo T6030

#### **Formas de apresentação comercial do Produto:**

A Família de CAIXAS E ESTOJOS POLIMÉRICOS - TECHIMPORT são compostos por peças individuais não esterilizadas, as quais podem ser vendidas em bandejas ou separadamente quando houver a necessidade de reposições. Nessa situação os instrumentais são embalados em envelope plástico com etiqueta de rastreabilidade. A rotulagem externa são as etiquetas de rastreabilidade do produto que constam as seguintes informações: Nome do Fabricante; Nome Comercial do Produto; Nome Técnico; Número do Lote; Número do registro ANVISA; Código do Produto; Quantidade; Descrição do produto que contém a embalagem (modelo); Data de fabricação; Data do vencimento; Descrição da matéria-prima utilizada para fabricação do produto (Composição); Endereço do fabricante; Nome do Responsável técnico;

Os dizeres: “Produto não estéril”; Antes de usar, vide instruções de uso; Advertências/Precauções/Cuidados especiais/Simbologia: Vide Instrução de Uso.

#### **Identificação:**

Os instrumentais são identificados, através de gravação a laser, com as seguintes informações:

- Logomarca da empresa TECHIMPORT;
- Código do Instrumental com as iniciais TI seguidos por dez dígitos, separados por pontos, exemplo: Cód. TIXXX.XXXX.XXX;
- Lote, constituído por duas letras, referentes ao controle interno do ano e mês de fabricação, e três números sequenciais, exemplo: Lote ABXXX.

**Indicação de uso/Princípio de funcionamento/Mecanismo de ação:**

Auxílio em procedimento cirúrgico para auxílio na implantação de placas para CMF TechImport, o qual deve ser necessariamente conduzido por profissional médico com conhecimentos da técnica cirúrgica e dos aspectos mecânicos do instrumental.

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Indicação</b>
TI203.0002.001	Estojo para Implantes/Instrumental E2001	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.002	Estojo para Implantes/Instrumental E2002	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.003	Estojo para Implantes/Instrumental E2003	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.004	Estojo para Implantes/Instrumental E2004	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.005	Estojo para Implantes/Instrumental E2005	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.006	Estojo para Implantes/Instrumental E2006	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.007	Estojo para Implantes/Instrumental E2007	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.008	Estojo para Implantes/Instrumental E2008	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.009	Estojo para Implantes/Instrumental E2009	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.010	Estojo para Implantes/Instrumental E2010	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.011	Estojo para Implantes/Instrumental E2011	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.012	Estojo para Implantes/Instrumental E2012	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.013	Estojo para Implantes/Instrumental E2013	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.014	Estojo para Implantes/Instrumental E2014	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização

TI203.0002.015	Estojo para Implantes/Instrumental E2015	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.016	Estojo para Implantes/Instrumental E2016	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.017	Estojo para Implantes/Instrumental E2017	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.018	Estojo para Implantes/Instrumental E2018	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.019	Estojo para Implantes/Instrumental E2019	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.020	Estojo para Implantes/Instrumental E2020	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.021	Estojo para Implantes/Instrumental E2021	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.022	Estojo para Implantes/Instrumental E2022	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.023	Estojo para Implantes/Instrumental E2023	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.024	Estojo para Implantes/Instrumental E2024	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.025	Estojo para Implantes/Instrumental E2025	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.026	Estojo para Implantes/Instrumental E2026	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.027	Estojo para Implantes/Instrumental E2027	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.028	Estojo para Implantes/Instrumental E2028	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.029	Estojo para Implantes/Instrumental E2029	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.030	Estojo para Implantes/Instrumental E2030	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.031	Estojo para Implantes/Instrumental E2031	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização

TI203.0002.032	Estojo para Implantes/Instrumental E2032	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.033	Estojo para Implantes/Instrumental E2033	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.034	Estojo para Implantes/Instrumental E2034	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.035	Estojo para Implantes/Instrumental E2035	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.036	Estojo para Implantes/Instrumental E2036	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.037	Estojo para Implantes/Instrumental E2037	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.038	Estojo para Implantes/Instrumental E2038	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.039	Estojo para Implantes/Instrumental E2039	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.040	Estojo para Implantes/Instrumental E2040	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.041	Estojo para Implantes/Instrumental E2041	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.042	Estojo para Implantes/Instrumental E2042	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.043	Estojo para Implantes/Instrumental E2043	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.044	Estojo para Implantes/Instrumental E2044	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.045	Estojo para Implantes/Instrumental E2045	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.046	Estojo para Implantes/Instrumental E2046	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.047	Estojo para Implantes/Instrumental E2047	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.048	Estojo para Implantes/Instrumental E2048	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização

TI203.0002.049	Estojo para Implantes/Instrumental E2049	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.050	Estojo para Implantes/Instrumental E2050	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.051	Estojo para Implantes/Instrumental E2051	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.052	Estojo para Implantes/Instrumental E2052	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.053	Estojo para Implantes/Instrumental E2053	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.054	Estojo para Implantes/Instrumental E2054	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.055	Estojo para Implantes/Instrumental E2055	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.056	Estojo para Implantes/Instrumental E2056	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.057	Estojo para Implantes/Instrumental E2057	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.058	Estojo para Implantes/Instrumental E2058	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.059	Estojo para Implantes/Instrumental E2059	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0002.060	Estojo para Implantes/Instrumental E2060	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0003.001	Estojo para Implantes/Instrumental E3001	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0003.002	Estojo para Implantes/Instrumental E3002	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0003.003	Estojo para Implantes/Instrumental E3003	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0003.004	Estojo para Implantes/Instrumental E3004	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0003.005	Estojo para Implantes/Instrumental E3005	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização

TI203.0003.006	Estojo para Implantes/Instrumental E3006	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0003.007	Estojo para Implantes/Instrumental E3007	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0003.008	Estojo para Implantes/Instrumental E3008	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0003.009	Estojo para Implantes/Instrumental E3009	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0003.010	Estojo para Implantes/Instrumental E3010	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0003.011	Estojo para Implantes/Instrumental E3011	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0003.012	Estojo para Implantes/Instrumental E3012	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0003.013	Estojo para Implantes/Instrumental E3013	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0003.014	Estojo para Implantes/Instrumental E3014	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0003.015	Estojo para Implantes/Instrumental E3015	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0003.016	Estojo para Implantes/Instrumental E3016	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0003.017	Estojo para Implantes/Instrumental E3017	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0003.018	Estojo para Implantes/Instrumental E3018	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0003.019	Estojo para Implantes/Instrumental E3019	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0003.020	Estojo para Implantes/Instrumental E3020	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0003.021	Estojo para Implantes/Instrumental E3021	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0003.022	Estojo para Implantes/Instrumental E3022	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização

TI203.0003.023	Estojo para Implantes/Instrumental E3023	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0003.024	Estojo para Implantes/Instrumental E3024	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0003.025	Estojo para Implantes/Instrumental E3025	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0003.026	Estojo para Implantes/Instrumental E3026	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0003.027	Estojo para Implantes/Instrumental E3027	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0003.028	Estojo para Implantes/Instrumental E3028	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0003.029	Estojo para Implantes/Instrumental E3029	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0003.030	Estojo para Implantes/Instrumental E3030	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0004.001	Estojo para Implantes/Instrumental E4001	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0004.002	Estojo para Implantes/Instrumental E4002	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0004.003	Estojo para Implantes/Instrumental E4003	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0004.004	Estojo para Implantes/Instrumental E4004	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0004.005	Estojo para Implantes/Instrumental E4005	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0004.006	Estojo para Implantes/Instrumental E4006	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0004.007	Estojo para Implantes/Instrumental E4007	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0004.008	Estojo para Implantes/Instrumental E4008	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0004.009	Estojo para Implantes/Instrumental E4009	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização



TI203.0004.010	Estojo para Implantes/Instrumental E4010	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0004.011	Estojo para Implantes/Instrumental E4011	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0004.012	Estojo para Implantes/Instrumental E4012	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0004.013	Estojo para Implantes/Instrumental E4013	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0004.014	Estojo para Implantes/Instrumental E4014	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0004.015	Estojo para Implantes/Instrumental E4015	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0004.016	Estojo para Implantes/Instrumental E4016	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0004.017	Estojo para Implantes/Instrumental E4017	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0004.018	Estojo para Implantes/Instrumental E4018	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0004.019	Estojo para Implantes/Instrumental E4019	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0004.020	Estojo para Implantes/Instrumental E4020	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0004.021	Estojo para Implantes/Instrumental E4021	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0004.022	Estojo para Implantes/Instrumental E4022	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0004.023	Estojo para Implantes/Instrumental E4023	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0004.024	Estojo para Implantes/Instrumental E4024	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0004.025	Estojo para Implantes/Instrumental E4025	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0004.026	Estojo para Implantes/Instrumental E4026	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização

TI203.0004.027	Estojo para Implantes/Instrumental E4027	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0004.028	Estojo para Implantes/Instrumental E4028	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0004.029	Estojo para Implantes/Instrumental E4029	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0004.030	Estojo para Implantes/Instrumental E4030	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0005.001	Estojo para Implantes/Instrumental E5001	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0005.002	Estojo para Implantes/Instrumental E5002	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0005.003	Estojo para Implantes/Instrumental E5003	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0005.004	Estojo para Implantes/Instrumental E5004	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0005.005	Estojo para Implantes/Instrumental E5005	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0005.006	Estojo para Implantes/Instrumental E5006	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0005.007	Estojo para Implantes/Instrumental E5007	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0005.008	Estojo para Implantes/Instrumental E5008	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0005.009	Estojo para Implantes/Instrumental E5009	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0005.010	Estojo para Implantes/Instrumental E5010	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0005.011	Estojo para Implantes/Instrumental E5011	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0005.012	Estojo para Implantes/Instrumental E5012	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0005.013	Estojo para Implantes/Instrumental E5013	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização

TI203.0005.014	Estojo para Implantes/Instrumental E5014	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0005.015	Estojo para Implantes/Instrumental E5015	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0005.016	Estojo para Implantes/Instrumental E5016	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0005.017	Estojo para Implantes/Instrumental E5017	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0005.018	Estojo para Implantes/Instrumental E5018	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0005.019	Estojo para Implantes/Instrumental E5019	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0005.020	Estojo para Implantes/Instrumental E5020	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0005.021	Estojo para Implantes/Instrumental E5021	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0005.022	Estojo para Implantes/Instrumental E5022	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0005.023	Estojo para Implantes/Instrumental E5023	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0005.024	Estojo para Implantes/Instrumental E5024	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0005.025	Estojo para Implantes/Instrumental E5025	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0005.026	Estojo para Implantes/Instrumental E5026	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0005.027	Estojo para Implantes/Instrumental E5027	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0005.028	Estojo para Implantes/Instrumental E5028	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0005.029	Estojo para Implantes/Instrumental E5029	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0005.030	Estojo para Implantes/Instrumental E5030	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização

TI203.0006.001	Estojo para Implantes E6001	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0006.002	Estojo para Implantes E6002	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0006.003	Estojo para Implantes E6003	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0006.004	Estojo para Implantes E6004	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0006.005	Estojo para Implantes E6005	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0006.006	Estojo para Implantes E6006	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0006.007	Estojo para Implantes E6007	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0006.008	Estojo para Implantes E6008	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0006.009	Estojo para Implantes E6009	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0006.010	Estojo para Implantes E6010	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0006.011	Estojo para Implantes E6011	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0006.012	Estojo para Implantes E6012	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0006.013	Estojo para Implantes E6013	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0006.014	Estojo para Implantes E6014	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0006.015	Estojo para Implantes E6015	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0006.016	Estojo para Implantes E6016	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0006.017	Estojo para Implantes E6017	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização

TI203.0006.018	Estojo para Implantes E6018	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0006.019	Estojo para Implantes E6019	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0006.020	Estojo para Implantes E6020	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0006.021	Estojo para Implantes E6021	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0006.022	Estojo para Implantes E6022	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0006.023	Estojo para Implantes E6023	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0006.024	Estojo para Implantes E6024	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0006.025	Estojo para Implantes E6025	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0006.026	Estojo para Implantes E6026	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0006.027	Estojo para Implantes E6027	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0006.028	Estojo para Implantes E6028	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0006.029	Estojo para Implantes E6029	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0006.030	Estojo para Implantes E6030	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0007.001	Estojo Circular para Implantes E7001	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0007.002	Estojo Circular para Implantes E7002	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0007.003	Estojo Circular para Implantes E7003	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0007.004	Estojo Circular para Implantes E7004	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização

TI203.0007.005	Estojo Circular para Implantes E7005	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0007.006	Estojo Circular para Implantes E7006	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0007.007	Estojo Circular para Implantes E7007	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0007.008	Estojo Circular para Implantes E7008	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0007.009	Estojo Circular para Implantes E7009	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0007.010	Estojo Circular para Implantes E7010	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0007.011	Estojo Circular para Implantes E7011	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0007.012	Estojo Circular para Implantes E7012	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0007.013	Estojo Circular para Implantes E7013	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0007.014	Estojo Circular para Implantes E7014	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0007.015	Estojo Circular para Implantes E7015	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0007.016	Estojo Circular para Implantes E7016	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0007.017	Estojo Circular para Implantes E7017	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0007.018	Estojo Circular para Implantes E7018	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0007.019	Estojo Circular para Implantes E7019	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0007.020	Estojo Circular para Implantes E7020	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0007.021	Estojo Circular para Implantes E7021	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização

TI203.0007.022	Estojo Circular para Implantes E7022	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0007.023	Estojo Circular para Implantes E7023	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0007.024	Estojo Circular para Implantes E7024	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0007.025	Estojo Circular para Implantes E7025	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0007.026	Estojo Circular para Implantes E7026	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0007.027	Estojo Circular para Implantes E7027	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0007.028	Estojo Circular para Implantes E7028	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0007.029	Estojo Circular para Implantes E7029	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI203.0007.030	Estojo Circular para Implantes E7030	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.001	Tampa para Estojo T2001	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.002	Tampa para Estojo T2002	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.003	Tampa para Estojo T2003	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.004	Tampa para Estojo T2004	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.005	Tampa para Estojo T2005	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.006	Tampa para Estojo T2006	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.007	Tampa para Estojo T2007	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.008	Tampa para Estojo T2008	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização

TI204.0002.009	Tampa para Estojo T2009	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.010	Tampa para Estojo T2010	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.011	Tampa para Estojo T2011	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.012	Tampa para Estojo T2012	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.013	Tampa para Estojo T2013	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.014	Tampa para Estojo T2014	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.015	Tampa para Estojo T2015	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.016	Tampa para Estojo T2016	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.017	Tampa para Estojo T2017	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.018	Tampa para Estojo T2018	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.019	Tampa para Estojo T2019	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.020	Tampa para Estojo T2020	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.021	Tampa para Estojo T2021	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.022	Tampa para Estojo T2022	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.023	Tampa para Estojo T2023	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.024	Tampa para Estojo T2024	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.025	Tampa para Estojo T2025	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização



TI204.0002.026	Tampa para Estojo T2026	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.027	Tampa para Estojo T2027	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.028	Tampa para Estojo T2028	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.029	Tampa para Estojo T2029	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.030	Tampa para Estojo T2030	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.031	Tampa para Estojo T2031	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.032	Tampa para Estojo T2032	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.033	Tampa para Estojo T2033	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.034	Tampa para Estojo T2034	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.035	Tampa para Estojo T2035	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.036	Tampa para Estojo T2036	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.037	Tampa para Estojo T2037	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.038	Tampa para Estojo T2038	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.039	Tampa para Estojo T2039	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.040	Tampa para Estojo T2040	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.041	Tampa para Estojo T2041	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.042	Tampa para Estojo T2042	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização

TI204.0002.043	Tampa para Estojo T2043	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.044	Tampa para Estojo T2044	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.045	Tampa para Estojo T2045	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.046	Tampa para Estojo T2046	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.047	Tampa para Estojo T2047	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.048	Tampa para Estojo T2048	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.049	Tampa para Estojo T2049	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.050	Tampa para Estojo T2050	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.051	Tampa para Estojo T2051	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.052	Tampa para Estojo T2052	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.053	Tampa para Estojo T2053	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.054	Tampa para Estojo T2054	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.055	Tampa para Estojo T2055	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.056	Tampa para Estojo T2056	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.057	Tampa para Estojo T2057	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.058	Tampa para Estojo T2058	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0002.059	Tampa para Estojo T2059	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização

TI204.0002.060	Tampa para Estojo T2060	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0003.001	Tampa para Estojo T3001	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0003.002	Tampa para Estojo T3002	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0003.003	Tampa para Estojo T3003	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0003.004	Tampa para Estojo T3004	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0003.005	Tampa para Estojo T3005	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0003.006	Tampa para Estojo T3006	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0003.007	Tampa para Estojo T3007	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0003.008	Tampa para Estojo T3008	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0003.009	Tampa para Estojo T3009	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0003.010	Tampa para Estojo T3010	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0003.011	Tampa para Estojo T3011	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0003.012	Tampa para Estojo T3012	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0003.013	Tampa para Estojo T3013	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0003.014	Tampa para Estojo T3014	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0003.015	Tampa para Estojo T3015	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0003.016	Tampa para Estojo T3016	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização

TI204.0003.017	Tampa para Estojo T3017	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0003.018	Tampa para Estojo T3018	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0003.019	Tampa para Estojo T3019	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0003.020	Tampa para Estojo T3020	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0003.021	Tampa para Estojo T3021	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0003.022	Tampa para Estojo T3022	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0003.023	Tampa para Estojo T3023	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0003.024	Tampa para Estojo T3024	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0003.025	Tampa para Estojo T3025	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0003.026	Tampa para Estojo T3026	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0003.027	Tampa para Estojo T3027	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0003.028	Tampa para Estojo T3028	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0003.029	Tampa para Estojo T3029	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0003.030	Tampa para Estojo T3030	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0004.001	Tampa para Estojo T4001	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0004.002	Tampa para Estojo T4002	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0004.003	Tampa para Estojo T4003	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização

TI204.0004.004	Tampa para Estojo T4004	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0004.005	Tampa para Estojo T4005	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0004.006	Tampa para Estojo T4006	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0004.007	Tampa para Estojo T4007	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0004.008	Tampa para Estojo T4008	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0004.009	Tampa para Estojo T4009	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0004.010	Tampa para Estojo T4010	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0004.011	Tampa para Estojo T4011	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0004.012	Tampa para Estojo T4012	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0004.013	Tampa para Estojo T4013	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0004.014	Tampa para Estojo T4014	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0004.015	Tampa para Estojo T4015	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0004.016	Tampa para Estojo T4016	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0004.017	Tampa para Estojo T4017	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0004.018	Tampa para Estojo T4018	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0004.019	Tampa para Estojo T4019	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0004.020	Tampa para Estojo T4020	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização

TI204.0004.021	Tampa para Estojo T4021	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0004.022	Tampa para Estojo T4022	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0004.023	Tampa para Estojo T4023	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0004.024	Tampa para Estojo T4024	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0004.025	Tampa para Estojo T4025	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0004.026	Tampa para Estojo T4026	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0004.027	Tampa para Estojo T4027	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0004.028	Tampa para Estojo T4028	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0004.029	Tampa para Estojo T4029	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0004.030	Tampa para Estojo T4030	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0005.001	Tampa para Estojo T5001	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0005.002	Tampa para Estojo T5002	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0005.003	Tampa para Estojo T5003	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0005.004	Tampa para Estojo T5004	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0005.005	Tampa para Estojo T5005	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0005.006	Tampa para Estojo T5006	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0005.007	Tampa para Estojo T5007	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização

TI204.0005.008	Tampa para Estojo T5008	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0005.009	Tampa para Estojo T5009	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0005.010	Tampa para Estojo T5010	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0005.011	Tampa para Estojo T5011	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0005.012	Tampa para Estojo T5012	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0005.013	Tampa para Estojo T5013	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0005.014	Tampa para Estojo T5014	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0005.015	Tampa para Estojo T5015	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0005.016	Tampa para Estojo T5016	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0005.017	Tampa para Estojo T5017	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0005.018	Tampa para Estojo T5018	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0005.019	Tampa para Estojo T5019	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0005.020	Tampa para Estojo T5020	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0005.021	Tampa para Estojo T5021	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0005.022	Tampa para Estojo T5022	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0005.023	Tampa para Estojo T5023	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0005.024	Tampa para Estojo T5024	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização

TI204.0005.025	Tampa para Estojo T5025	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0005.026	Tampa para Estojo T5026	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0005.027	Tampa para Estojo T5027	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0005.028	Tampa para Estojo T5028	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0005.029	Tampa para Estojo T5029	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0005.030	Tampa para Estojo T5030	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0006.001	Tampa para Estojo T6001	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0006.002	Tampa para Estojo T6002	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0006.003	Tampa para Estojo T6003	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0006.004	Tampa para Estojo T6004	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0006.005	Tampa para Estojo T6005	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0006.006	Tampa para Estojo T6006	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0006.007	Tampa para Estojo T6007	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0006.008	Tampa para Estojo T6008	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0006.009	Tampa para Estojo T6009	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0006.010	Tampa para Estojo T6010	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0006.011	Tampa para Estojo T6011	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização



TI204.0006.012	Tampa para Estojo T6012	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0006.013	Tampa para Estojo T6013	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0006.014	Tampa para Estojo T6014	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0006.015	Tampa para Estojo T6015	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0006.016	Tampa para Estojo T6016	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0006.017	Tampa para Estojo T6017	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0006.018	Tampa para Estojo T6018	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0006.019	Tampa para Estojo T6019	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0006.020	Tampa para Estojo T6020	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0006.021	Tampa para Estojo T6021	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0006.022	Tampa para Estojo T6022	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0006.023	Tampa para Estojo T6023	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0006.024	Tampa para Estojo T6024	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0006.025	Tampa para Estojo T6025	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0006.026	Tampa para Estojo T6026	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0006.027	Tampa para Estojo T6027	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0006.028	Tampa para Estojo T6028	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização

TI204.0006.029	Tampa para Estojo T6029	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização
TI204.0006.030	Tampa para Estojo T6030	Armazenamento de Implantes e Instrumentais para o processo de esterilização

**Composição:**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Matéria Prima</b>
TI203.0002.001	Estojo para Implantes/Instrumental E2001	Tecapro MT
TI203.0002.002	Estojo para Implantes/Instrumental E2002	Tecapro MT
TI203.0002.003	Estojo para Implantes/Instrumental E2003	Tecapro MT
TI203.0002.004	Estojo para Implantes/Instrumental E2004	Tecapro MT
TI203.0002.005	Estojo para Implantes/Instrumental E2005	Tecapro MT
TI203.0002.006	Estojo para Implantes/Instrumental E2006	Tecapro MT
TI203.0002.007	Estojo para Implantes/Instrumental E2007	Tecapro MT
TI203.0002.008	Estojo para Implantes/Instrumental E2008	Tecapro MT
TI203.0002.009	Estojo para Implantes/Instrumental E2009	Tecapro MT
TI203.0002.010	Estojo para Implantes/Instrumental E2010	Tecapro MT
TI203.0002.011	Estojo para Implantes/Instrumental E2011	Tecapro MT
TI203.0002.012	Estojo para Implantes/Instrumental E2012	Tecapro MT
TI203.0002.013	Estojo para Implantes/Instrumental E2013	Tecapro MT
TI203.0002.014	Estojo para Implantes/Instrumental E2014	Tecapro MT
TI203.0002.015	Estojo para Implantes/Instrumental E2015	Tecapro MT
TI203.0002.016	Estojo para Implantes/Instrumental E2016	Tecapro MT
TI203.0002.017	Estojo para Implantes/Instrumental E2017	Tecapro MT
TI203.0002.018	Estojo para Implantes/Instrumental E2018	Tecapro MT
TI203.0002.019	Estojo para Implantes/Instrumental E2019	Tecapro MT
TI203.0002.020	Estojo para Implantes/Instrumental E2020	Tecapro MT
TI203.0002.021	Estojo para Implantes/Instrumental E2021	Tecapro MT
TI203.0002.022	Estojo para Implantes/Instrumental E2022	Tecapro MT
TI203.0002.023	Estojo para Implantes/Instrumental E2023	Tecapro MT
TI203.0002.024	Estojo para Implantes/Instrumental E2024	Tecapro MT
TI203.0002.025	Estojo para Implantes/Instrumental E2025	Tecapro MT
TI203.0002.026	Estojo para Implantes/Instrumental E2026	Tecapro MT
TI203.0002.027	Estojo para Implantes/Instrumental E2027	Tecapro MT
TI203.0002.028	Estojo para Implantes/Instrumental E2028	Tecapro MT
TI203.0002.029	Estojo para Implantes/Instrumental E2029	Tecapro MT
TI203.0002.030	Estojo para Implantes/Instrumental E2030	Tecapro MT
TI203.0002.031	Estojo para Implantes/Instrumental E2031	Tecapro MT
TI203.0002.032	Estojo para Implantes/Instrumental E2032	Tecapro MT
TI203.0002.033	Estojo para Implantes/Instrumental E2033	Tecapro MT
TI203.0002.034	Estojo para Implantes/Instrumental E2034	Tecapro MT

TI203.0002.035	Estojo para Implantes/Instrumental E2035	Tecapro MT
TI203.0002.036	Estojo para Implantes/Instrumental E2036	Tecapro MT
TI203.0002.037	Estojo para Implantes/Instrumental E2037	Tecapro MT
TI203.0002.038	Estojo para Implantes/Instrumental E2038	Tecapro MT
TI203.0002.039	Estojo para Implantes/Instrumental E2039	Tecapro MT
TI203.0002.040	Estojo para Implantes/Instrumental E2040	Tecapro MT
TI203.0002.041	Estojo para Implantes/Instrumental E2041	Tecapro MT
TI203.0002.042	Estojo para Implantes/Instrumental E2042	Tecapro MT
TI203.0002.043	Estojo para Implantes/Instrumental E2043	Tecapro MT
TI203.0002.044	Estojo para Implantes/Instrumental E2044	Tecapro MT
TI203.0002.045	Estojo para Implantes/Instrumental E2045	Tecapro MT
TI203.0002.046	Estojo para Implantes/Instrumental E2046	Tecapro MT
TI203.0002.047	Estojo para Implantes/Instrumental E2047	Tecapro MT
TI203.0002.048	Estojo para Implantes/Instrumental E2048	Tecapro MT
TI203.0002.049	Estojo para Implantes/Instrumental E2049	Tecapro MT
TI203.0002.050	Estojo para Implantes/Instrumental E2050	Tecapro MT
TI203.0002.051	Estojo para Implantes/Instrumental E2051	Tecapro MT
TI203.0002.052	Estojo para Implantes/Instrumental E2052	Tecapro MT
TI203.0002.053	Estojo para Implantes/Instrumental E2053	Tecapro MT
TI203.0002.054	Estojo para Implantes/Instrumental E2054	Tecapro MT
TI203.0002.055	Estojo para Implantes/Instrumental E2055	Tecapro MT
TI203.0002.056	Estojo para Implantes/Instrumental E2056	Tecapro MT
TI203.0002.057	Estojo para Implantes/Instrumental E2057	Tecapro MT
TI203.0002.058	Estojo para Implantes/Instrumental E2058	Tecapro MT
TI203.0002.059	Estojo para Implantes/Instrumental E2059	Tecapro MT
TI203.0002.060	Estojo para Implantes/Instrumental E2060	Tecapro MT
TI203.0003.001	Estojo para Implantes/Instrumental E3001	Tecapro MT
TI203.0003.002	Estojo para Implantes/Instrumental E3002	Tecapro MT
TI203.0003.003	Estojo para Implantes/Instrumental E3003	Tecapro MT
TI203.0003.004	Estojo para Implantes/Instrumental E3004	Tecapro MT
TI203.0003.005	Estojo para Implantes/Instrumental E3005	Tecapro MT
TI203.0003.006	Estojo para Implantes/Instrumental E3006	Tecapro MT
TI203.0003.007	Estojo para Implantes/Instrumental E3007	Tecapro MT
TI203.0003.008	Estojo para Implantes/Instrumental E3008	Tecapro MT
TI203.0003.009	Estojo para Implantes/Instrumental E3009	Tecapro MT
TI203.0003.010	Estojo para Implantes/Instrumental E3010	Tecapro MT
TI203.0003.011	Estojo para Implantes/Instrumental E3011	Tecapro MT
TI203.0003.012	Estojo para Implantes/Instrumental E3012	Tecapro MT
TI203.0003.013	Estojo para Implantes/Instrumental E3013	Tecapro MT
TI203.0003.014	Estojo para Implantes/Instrumental E3014	Tecapro MT
TI203.0003.015	Estojo para Implantes/Instrumental E3015	Tecapro MT
TI203.0003.016	Estojo para Implantes/Instrumental E3016	Tecapro MT
TI203.0003.017	Estojo para Implantes/Instrumental E3017	Tecapro MT

TI203.0003.018	Estojo para Implantes/Instrumental E3018	Tecapro MT
TI203.0003.019	Estojo para Implantes/Instrumental E3019	Tecapro MT
TI203.0003.020	Estojo para Implantes/Instrumental E3020	Tecapro MT
TI203.0003.021	Estojo para Implantes/Instrumental E3021	Tecapro MT
TI203.0003.022	Estojo para Implantes/Instrumental E3022	Tecapro MT
TI203.0003.023	Estojo para Implantes/Instrumental E3023	Tecapro MT
TI203.0003.024	Estojo para Implantes/Instrumental E3024	Tecapro MT
TI203.0003.025	Estojo para Implantes/Instrumental E3025	Tecapro MT
TI203.0003.026	Estojo para Implantes/Instrumental E3026	Tecapro MT
TI203.0003.027	Estojo para Implantes/Instrumental E3027	Tecapro MT
TI203.0003.028	Estojo para Implantes/Instrumental E3028	Tecapro MT
TI203.0003.029	Estojo para Implantes/Instrumental E3029	Tecapro MT
TI203.0003.030	Estojo para Implantes/Instrumental E3030	Tecapro MT
TI203.0004.001	Estojo para Implantes/Instrumental E4001	Tecapro MT
TI203.0004.002	Estojo para Implantes/Instrumental E4002	Tecapro MT
TI203.0004.003	Estojo para Implantes/Instrumental E4003	Tecapro MT
TI203.0004.004	Estojo para Implantes/Instrumental E4004	Tecapro MT
TI203.0004.005	Estojo para Implantes/Instrumental E4005	Tecapro MT
TI203.0004.006	Estojo para Implantes/Instrumental E4006	Tecapro MT
TI203.0004.007	Estojo para Implantes/Instrumental E4007	Tecapro MT
TI203.0004.008	Estojo para Implantes/Instrumental E4008	Tecapro MT
TI203.0004.009	Estojo para Implantes/Instrumental E4009	Tecapro MT
TI203.0004.010	Estojo para Implantes/Instrumental E4010	Tecapro MT
TI203.0004.011	Estojo para Implantes/Instrumental E4011	Tecapro MT
TI203.0004.012	Estojo para Implantes/Instrumental E4012	Tecapro MT
TI203.0004.013	Estojo para Implantes/Instrumental E4013	Tecapro MT
TI203.0004.014	Estojo para Implantes/Instrumental E4014	Tecapro MT
TI203.0004.015	Estojo para Implantes/Instrumental E4015	Tecapro MT
TI203.0004.016	Estojo para Implantes/Instrumental E4016	Tecapro MT
TI203.0004.017	Estojo para Implantes/Instrumental E4017	Tecapro MT
TI203.0004.018	Estojo para Implantes/Instrumental E4018	Tecapro MT
TI203.0004.019	Estojo para Implantes/Instrumental E4019	Tecapro MT
TI203.0004.020	Estojo para Implantes/Instrumental E4020	Tecapro MT
TI203.0004.021	Estojo para Implantes/Instrumental E4021	Tecapro MT
TI203.0004.022	Estojo para Implantes/Instrumental E4022	Tecapro MT
TI203.0004.023	Estojo para Implantes/Instrumental E4023	Tecapro MT
TI203.0004.024	Estojo para Implantes/Instrumental E4024	Tecapro MT
TI203.0004.025	Estojo para Implantes/Instrumental E4025	Tecapro MT
TI203.0004.026	Estojo para Implantes/Instrumental E4026	Tecapro MT
TI203.0004.027	Estojo para Implantes/Instrumental E4027	Tecapro MT
TI203.0004.028	Estojo para Implantes/Instrumental E4028	Tecapro MT
TI203.0004.029	Estojo para Implantes/Instrumental E4029	Tecapro MT
TI203.0004.030	Estojo para Implantes/Instrumental E4030	Tecapro MT

TI203.0005.001	Estojo para Implantes/Instrumental E5001	Tecapro MT
TI203.0005.002	Estojo para Implantes/Instrumental E5002	Tecapro MT
TI203.0005.003	Estojo para Implantes/Instrumental E5003	Tecapro MT
TI203.0005.004	Estojo para Implantes/Instrumental E5004	Tecapro MT
TI203.0005.005	Estojo para Implantes/Instrumental E5005	Tecapro MT
TI203.0005.006	Estojo para Implantes/Instrumental E5006	Tecapro MT
TI203.0005.007	Estojo para Implantes/Instrumental E5007	Tecapro MT
TI203.0005.008	Estojo para Implantes/Instrumental E5008	Tecapro MT
TI203.0005.009	Estojo para Implantes/Instrumental E5009	Tecapro MT
TI203.0005.010	Estojo para Implantes/Instrumental E5010	Tecapro MT
TI203.0005.011	Estojo para Implantes/Instrumental E5011	Tecapro MT
TI203.0005.012	Estojo para Implantes/Instrumental E5012	Tecapro MT
TI203.0005.013	Estojo para Implantes/Instrumental E5013	Tecapro MT
TI203.0005.014	Estojo para Implantes/Instrumental E5014	Tecapro MT
TI203.0005.015	Estojo para Implantes/Instrumental E5015	Tecapro MT
TI203.0005.016	Estojo para Implantes/Instrumental E5016	Tecapro MT
TI203.0005.017	Estojo para Implantes/Instrumental E5017	Tecapro MT
TI203.0005.018	Estojo para Implantes/Instrumental E5018	Tecapro MT
TI203.0005.019	Estojo para Implantes/Instrumental E5019	Tecapro MT
TI203.0005.020	Estojo para Implantes/Instrumental E5020	Tecapro MT
TI203.0005.021	Estojo para Implantes/Instrumental E5021	Tecapro MT
TI203.0005.022	Estojo para Implantes/Instrumental E5022	Tecapro MT
TI203.0005.023	Estojo para Implantes/Instrumental E5023	Tecapro MT
TI203.0005.024	Estojo para Implantes/Instrumental E5024	Tecapro MT
TI203.0005.025	Estojo para Implantes/Instrumental E5025	Tecapro MT
TI203.0005.026	Estojo para Implantes/Instrumental E5026	Tecapro MT
TI203.0005.027	Estojo para Implantes/Instrumental E5027	Tecapro MT
TI203.0005.028	Estojo para Implantes/Instrumental E5028	Tecapro MT
TI203.0005.029	Estojo para Implantes/Instrumental E5029	Tecapro MT
TI203.0005.030	Estojo para Implantes/Instrumental E5030	Tecapro MT
TI203.0006.001	Estojo para Implantes E6001	Tecapro MT
TI203.0006.002	Estojo para Implantes E6002	Tecapro MT
TI203.0006.003	Estojo para Implantes E6003	Tecapro MT
TI203.0006.004	Estojo para Implantes E6004	Tecapro MT
TI203.0006.005	Estojo para Implantes E6005	Tecapro MT
TI203.0006.006	Estojo para Implantes E6006	Tecapro MT
TI203.0006.007	Estojo para Implantes E6007	Tecapro MT
TI203.0006.008	Estojo para Implantes E6008	Tecapro MT
TI203.0006.009	Estojo para Implantes E6009	Tecapro MT
TI203.0006.010	Estojo para Implantes E6010	Tecapro MT
TI203.0006.011	Estojo para Implantes E6011	Tecapro MT
TI203.0006.012	Estojo para Implantes E6012	Tecapro MT
TI203.0006.013	Estojo para Implantes E6013	Tecapro MT

TI203.0006.014	Estojo para Implantes E6014	Tecapro MT
TI203.0006.015	Estojo para Implantes E6015	Tecapro MT
TI203.0006.016	Estojo para Implantes E6016	Tecapro MT
TI203.0006.017	Estojo para Implantes E6017	Tecapro MT
TI203.0006.018	Estojo para Implantes E6018	Tecapro MT
TI203.0006.019	Estojo para Implantes E6019	Tecapro MT
TI203.0006.020	Estojo para Implantes E6020	Tecapro MT
TI203.0006.021	Estojo para Implantes E6021	Tecapro MT
TI203.0006.022	Estojo para Implantes E6022	Tecapro MT
TI203.0006.023	Estojo para Implantes E6023	Tecapro MT
TI203.0006.024	Estojo para Implantes E6024	Tecapro MT
TI203.0006.025	Estojo para Implantes E6025	Tecapro MT
TI203.0006.026	Estojo para Implantes E6026	Tecapro MT
TI203.0006.027	Estojo para Implantes E6027	Tecapro MT
TI203.0006.028	Estojo para Implantes E6028	Tecapro MT
TI203.0006.029	Estojo para Implantes E6029	Tecapro MT
TI203.0006.030	Estojo para Implantes E6030	Tecapro MT
TI203.0007.001	Estojo Circular para Implantes E7001	Tecapro MT
TI203.0007.002	Estojo Circular para Implantes E7002	Tecapro MT
TI203.0007.003	Estojo Circular para Implantes E7003	Tecapro MT
TI203.0007.004	Estojo Circular para Implantes E7004	Tecapro MT
TI203.0007.005	Estojo Circular para Implantes E7005	Tecapro MT
TI203.0007.006	Estojo Circular para Implantes E7006	Tecapro MT
TI203.0007.007	Estojo Circular para Implantes E7007	Tecapro MT
TI203.0007.008	Estojo Circular para Implantes E7008	Tecapro MT
TI203.0007.009	Estojo Circular para Implantes E7009	Tecapro MT
TI203.0007.010	Estojo Circular para Implantes E7010	Tecapro MT
TI203.0007.011	Estojo Circular para Implantes E7011	Tecapro MT
TI203.0007.012	Estojo Circular para Implantes E7012	Tecapro MT
TI203.0007.013	Estojo Circular para Implantes E7013	Tecapro MT
TI203.0007.014	Estojo Circular para Implantes E7014	Tecapro MT
TI203.0007.015	Estojo Circular para Implantes E7015	Tecapro MT
TI203.0007.016	Estojo Circular para Implantes E7016	Tecapro MT
TI203.0007.017	Estojo Circular para Implantes E7017	Tecapro MT
TI203.0007.018	Estojo Circular para Implantes E7018	Tecapro MT
TI203.0007.019	Estojo Circular para Implantes E7019	Tecapro MT
TI203.0007.020	Estojo Circular para Implantes E7020	Tecapro MT
TI203.0007.021	Estojo Circular para Implantes E7021	Tecapro MT
TI203.0007.022	Estojo Circular para Implantes E7022	Tecapro MT
TI203.0007.023	Estojo Circular para Implantes E7023	Tecapro MT
TI203.0007.024	Estojo Circular para Implantes E7024	Tecapro MT
TI203.0007.025	Estojo Circular para Implantes E7025	Tecapro MT
TI203.0007.026	Estojo Circular para Implantes E7026	Tecapro MT

TI203.0007.027	Estojo Circular para Implantes E7027	Tecapro MT
TI203.0007.028	Estojo Circular para Implantes E7028	Tecapro MT
TI203.0007.029	Estojo Circular para Implantes E7029	Tecapro MT
TI203.0007.030	Estojo Circular para Implantes E7030	Tecapro MT
TI204.0002.001	Tampa para Estojo T2001	Tecapro MT
TI204.0002.002	Tampa para Estojo T2002	Tecapro MT
TI204.0002.003	Tampa para Estojo T2003	Tecapro MT
TI204.0002.004	Tampa para Estojo T2004	Tecapro MT
TI204.0002.005	Tampa para Estojo T2005	Tecapro MT
TI204.0002.006	Tampa para Estojo T2006	Tecapro MT
TI204.0002.007	Tampa para Estojo T2007	Tecapro MT
TI204.0002.008	Tampa para Estojo T2008	Tecapro MT
TI204.0002.009	Tampa para Estojo T2009	Tecapro MT
TI204.0002.010	Tampa para Estojo T2010	Tecapro MT
TI204.0002.011	Tampa para Estojo T2011	Tecapro MT
TI204.0002.012	Tampa para Estojo T2012	Tecapro MT
TI204.0002.013	Tampa para Estojo T2013	Tecapro MT
TI204.0002.014	Tampa para Estojo T2014	Tecapro MT
TI204.0002.015	Tampa para Estojo T2015	Tecapro MT
TI204.0002.016	Tampa para Estojo T2016	Tecapro MT
TI204.0002.017	Tampa para Estojo T2017	Tecapro MT
TI204.0002.018	Tampa para Estojo T2018	Tecapro MT
TI204.0002.019	Tampa para Estojo T2019	Tecapro MT
TI204.0002.020	Tampa para Estojo T2020	Tecapro MT
TI204.0002.021	Tampa para Estojo T2021	Tecapro MT
TI204.0002.022	Tampa para Estojo T2022	Tecapro MT
TI204.0002.023	Tampa para Estojo T2023	Tecapro MT
TI204.0002.024	Tampa para Estojo T2024	Tecapro MT
TI204.0002.025	Tampa para Estojo T2025	Tecapro MT
TI204.0002.026	Tampa para Estojo T2026	Tecapro MT
TI204.0002.027	Tampa para Estojo T2027	Tecapro MT
TI204.0002.028	Tampa para Estojo T2028	Tecapro MT
TI204.0002.029	Tampa para Estojo T2029	Tecapro MT
TI204.0002.030	Tampa para Estojo T2030	Tecapro MT
TI204.0002.031	Tampa para Estojo T2031	Tecapro MT
TI204.0002.032	Tampa para Estojo T2032	Tecapro MT
TI204.0002.033	Tampa para Estojo T2033	Tecapro MT
TI204.0002.034	Tampa para Estojo T2034	Tecapro MT
TI204.0002.035	Tampa para Estojo T2035	Tecapro MT
TI204.0002.036	Tampa para Estojo T2036	Tecapro MT
TI204.0002.037	Tampa para Estojo T2037	Tecapro MT
TI204.0002.038	Tampa para Estojo T2038	Tecapro MT
TI204.0002.039	Tampa para Estojo T2039	Tecapro MT

TI204.0002.040	Tampa para Estojo T2040	Tecapro MT
TI204.0002.041	Tampa para Estojo T2041	Tecapro MT
TI204.0002.042	Tampa para Estojo T2042	Tecapro MT
TI204.0002.043	Tampa para Estojo T2043	Tecapro MT
TI204.0002.044	Tampa para Estojo T2044	Tecapro MT
TI204.0002.045	Tampa para Estojo T2045	Tecapro MT
TI204.0002.046	Tampa para Estojo T2046	Tecapro MT
TI204.0002.047	Tampa para Estojo T2047	Tecapro MT
TI204.0002.048	Tampa para Estojo T2048	Tecapro MT
TI204.0002.049	Tampa para Estojo T2049	Tecapro MT
TI204.0002.050	Tampa para Estojo T2050	Tecapro MT
TI204.0002.051	Tampa para Estojo T2051	Tecapro MT
TI204.0002.052	Tampa para Estojo T2052	Tecapro MT
TI204.0002.053	Tampa para Estojo T2053	Tecapro MT
TI204.0002.054	Tampa para Estojo T2054	Tecapro MT
TI204.0002.055	Tampa para Estojo T2055	Tecapro MT
TI204.0002.056	Tampa para Estojo T2056	Tecapro MT
TI204.0002.057	Tampa para Estojo T2057	Tecapro MT
TI204.0002.058	Tampa para Estojo T2058	Tecapro MT
TI204.0002.059	Tampa para Estojo T2059	Tecapro MT
TI204.0002.060	Tampa para Estojo T2060	Tecapro MT
TI204.0003.001	Tampa para Estojo T3001	Tecapro MT
TI204.0003.002	Tampa para Estojo T3002	Tecapro MT
TI204.0003.003	Tampa para Estojo T3003	Tecapro MT
TI204.0003.004	Tampa para Estojo T3004	Tecapro MT
TI204.0003.005	Tampa para Estojo T3005	Tecapro MT
TI204.0003.006	Tampa para Estojo T3006	Tecapro MT
TI204.0003.007	Tampa para Estojo T3007	Tecapro MT
TI204.0003.008	Tampa para Estojo T3008	Tecapro MT
TI204.0003.009	Tampa para Estojo T3009	Tecapro MT
TI204.0003.010	Tampa para Estojo T3010	Tecapro MT
TI204.0003.011	Tampa para Estojo T3011	Tecapro MT
TI204.0003.012	Tampa para Estojo T3012	Tecapro MT
TI204.0003.013	Tampa para Estojo T3013	Tecapro MT
TI204.0003.014	Tampa para Estojo T3014	Tecapro MT
TI204.0003.015	Tampa para Estojo T3015	Tecapro MT
TI204.0003.016	Tampa para Estojo T3016	Tecapro MT
TI204.0003.017	Tampa para Estojo T3017	Tecapro MT
TI204.0003.018	Tampa para Estojo T3018	Tecapro MT
TI204.0003.019	Tampa para Estojo T3019	Tecapro MT
TI204.0003.020	Tampa para Estojo T3020	Tecapro MT
TI204.0003.021	Tampa para Estojo T3021	Tecapro MT
TI204.0003.022	Tampa para Estojo T3022	Tecapro MT



TI204.0003.023	Tampa para Estojo T3023	Tecapro MT
TI204.0003.024	Tampa para Estojo T3024	Tecapro MT
TI204.0003.025	Tampa para Estojo T3025	Tecapro MT
TI204.0003.026	Tampa para Estojo T3026	Tecapro MT
TI204.0003.027	Tampa para Estojo T3027	Tecapro MT
TI204.0003.028	Tampa para Estojo T3028	Tecapro MT
TI204.0003.029	Tampa para Estojo T3029	Tecapro MT
TI204.0003.030	Tampa para Estojo T3030	Tecapro MT
TI204.0004.001	Tampa para Estojo T4001	Tecapro MT
TI204.0004.002	Tampa para Estojo T4002	Tecapro MT
TI204.0004.003	Tampa para Estojo T4003	Tecapro MT
TI204.0004.004	Tampa para Estojo T4004	Tecapro MT
TI204.0004.005	Tampa para Estojo T4005	Tecapro MT
TI204.0004.006	Tampa para Estojo T4006	Tecapro MT
TI204.0004.007	Tampa para Estojo T4007	Tecapro MT
TI204.0004.008	Tampa para Estojo T4008	Tecapro MT
TI204.0004.009	Tampa para Estojo T4009	Tecapro MT
TI204.0004.010	Tampa para Estojo T4010	Tecapro MT
TI204.0004.011	Tampa para Estojo T4011	Tecapro MT
TI204.0004.012	Tampa para Estojo T4012	Tecapro MT
TI204.0004.013	Tampa para Estojo T4013	Tecapro MT
TI204.0004.014	Tampa para Estojo T4014	Tecapro MT
TI204.0004.015	Tampa para Estojo T4015	Tecapro MT
TI204.0004.016	Tampa para Estojo T4016	Tecapro MT
TI204.0004.017	Tampa para Estojo T4017	Tecapro MT
TI204.0004.018	Tampa para Estojo T4018	Tecapro MT
TI204.0004.019	Tampa para Estojo T4019	Tecapro MT
TI204.0004.020	Tampa para Estojo T4020	Tecapro MT
TI204.0004.021	Tampa para Estojo T4021	Tecapro MT
TI204.0004.022	Tampa para Estojo T4022	Tecapro MT
TI204.0004.023	Tampa para Estojo T4023	Tecapro MT
TI204.0004.024	Tampa para Estojo T4024	Tecapro MT
TI204.0004.025	Tampa para Estojo T4025	Tecapro MT
TI204.0004.026	Tampa para Estojo T4026	Tecapro MT
TI204.0004.027	Tampa para Estojo T4027	Tecapro MT
TI204.0004.028	Tampa para Estojo T4028	Tecapro MT
TI204.0004.029	Tampa para Estojo T4029	Tecapro MT
TI204.0004.030	Tampa para Estojo T4030	Tecapro MT
TI204.0005.001	Tampa para Estojo T5001	Tecapro MT
TI204.0005.002	Tampa para Estojo T5002	Tecapro MT
TI204.0005.003	Tampa para Estojo T5003	Tecapro MT
TI204.0005.004	Tampa para Estojo T5004	Tecapro MT
TI204.0005.005	Tampa para Estojo T5005	Tecapro MT

TI204.0005.006	Tampa para Estojo T5006	Tecapro MT
TI204.0005.007	Tampa para Estojo T5007	Tecapro MT
TI204.0005.008	Tampa para Estojo T5008	Tecapro MT
TI204.0005.009	Tampa para Estojo T5009	Tecapro MT
TI204.0005.010	Tampa para Estojo T5010	Tecapro MT
TI204.0005.011	Tampa para Estojo T5011	Tecapro MT
TI204.0005.012	Tampa para Estojo T5012	Tecapro MT
TI204.0005.013	Tampa para Estojo T5013	Tecapro MT
TI204.0005.014	Tampa para Estojo T5014	Tecapro MT
TI204.0005.015	Tampa para Estojo T5015	Tecapro MT
TI204.0005.016	Tampa para Estojo T5016	Tecapro MT
TI204.0005.017	Tampa para Estojo T5017	Tecapro MT
TI204.0005.018	Tampa para Estojo T5018	Tecapro MT
TI204.0005.019	Tampa para Estojo T5019	Tecapro MT
TI204.0005.020	Tampa para Estojo T5020	Tecapro MT
TI204.0005.021	Tampa para Estojo T5021	Tecapro MT
TI204.0005.022	Tampa para Estojo T5022	Tecapro MT
TI204.0005.023	Tampa para Estojo T5023	Tecapro MT
TI204.0005.024	Tampa para Estojo T5024	Tecapro MT
TI204.0005.025	Tampa para Estojo T5025	Tecapro MT
TI204.0005.026	Tampa para Estojo T5026	Tecapro MT
TI204.0005.027	Tampa para Estojo T5027	Tecapro MT
TI204.0005.028	Tampa para Estojo T5028	Tecapro MT
TI204.0005.029	Tampa para Estojo T5029	Tecapro MT
TI204.0005.030	Tampa para Estojo T5030	Tecapro MT
TI204.0006.001	Tampa para Estojo T6001	Tecapro MT
TI204.0006.002	Tampa para Estojo T6002	Tecapro MT
TI204.0006.003	Tampa para Estojo T6003	Tecapro MT
TI204.0006.004	Tampa para Estojo T6004	Tecapro MT
TI204.0006.005	Tampa para Estojo T6005	Tecapro MT
TI204.0006.006	Tampa para Estojo T6006	Tecapro MT
TI204.0006.007	Tampa para Estojo T6007	Tecapro MT
TI204.0006.008	Tampa para Estojo T6008	Tecapro MT
TI204.0006.009	Tampa para Estojo T6009	Tecapro MT
TI204.0006.010	Tampa para Estojo T6010	Tecapro MT
TI204.0006.011	Tampa para Estojo T6011	Tecapro MT
TI204.0006.012	Tampa para Estojo T6012	Tecapro MT
TI204.0006.013	Tampa para Estojo T6013	Tecapro MT
TI204.0006.014	Tampa para Estojo T6014	Tecapro MT
TI204.0006.015	Tampa para Estojo T6015	Tecapro MT
TI204.0006.016	Tampa para Estojo T6016	Tecapro MT
TI204.0006.017	Tampa para Estojo T6017	Tecapro MT
TI204.0006.018	Tampa para Estojo T6018	Tecapro MT

TI204.0006.019	Tampa para Estojo T6019	Tecapro MT
TI204.0006.020	Tampa para Estojo T6020	Tecapro MT
TI204.0006.021	Tampa para Estojo T6021	Tecapro MT
TI204.0006.022	Tampa para Estojo T6022	Tecapro MT
TI204.0006.023	Tampa para Estojo T6023	Tecapro MT
TI204.0006.024	Tampa para Estojo T6024	Tecapro MT
TI204.0006.025	Tampa para Estojo T6025	Tecapro MT
TI204.0006.026	Tampa para Estojo T6026	Tecapro MT
TI204.0006.027	Tampa para Estojo T6027	Tecapro MT
TI204.0006.028	Tampa para Estojo T6028	Tecapro MT
TI204.0006.029	Tampa para Estojo T6029	Tecapro MT
TI204.0006.030	Tampa para Estojo T6030	Tecapro MT

**Prazo de validade e reprocessamento:**

Prazo de validade dos instrumentais é indeterminado, podendo ser reprocessado.

**Condições de armazenamento:**

Os dispositivos deverão ser armazenados em local limpo, seco e a uma temperatura adequada. Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação das referências do lote devem ser adotados em conjunto com as Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos Médicos e conforme as diretrizes da RDC-16/13.

**Condições para transporte:**

Transportar com cuidado para evitar a queda e atrito a fim de não danificar a embalagem e o dispositivo. Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação das referências do lote devem ser adotados em conjunto com as Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos Médicos e conforme as diretrizes da RDC-16/13.

**Condições de manipulação:**

Todo material deve ser tratado individualmente, em ambiente limpo e com uso de containers destinados especificamente para limpeza destes instrumentais. Os cuidados descritos a seguir são aplicados tanto para produtos novos quanto produtos que serão reutilizados:

I - Limpeza Prévia ou Desincrustação:

## LIMPEZA MANUAL NO CENTRO CIRÚRGICO

### Materiais:

- ✓ Detergente Enzimático: Marca: 3M™ Detergente Multienzimático – 5 Enzimas
- ✓ Seringa de 20ml

### Instrução

- 1 - Imergir o instrumental cirúrgico em recipiente contendo solução com detergente e água potável morna (entre 30º e 40º Celsius), conforme a orientação do fabricante.
  - 2 - Injetar essa solução dentro do canulado do instrumental com uma seringa de 20ml;
  - 3 - Encaminhar o instrumental cirúrgico para o Centro de Material e Esterilização – CME, imediatamente após o término da cirurgia
- Obs.: usar sempre água destilada, deionizada ou desmineralizada.

## LIMPEZA MANUAL NO CENTRO DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO

### Materiais:

- ✓ Detergente Enzimático: Marca: 3M™ Detergente Multienzimático – 5 Enzimas
- ✓ Escova de cerdas macias: Escova Batrik extra rígida
- ✓ Fio para orifícios passantes: Fio metálico

### Instrução:

- 1 - Diluir solução de em água potável morna (entre 30º e 40º Celsius). Diluição recomendada: de 2 ml por litro de água (2ml/l). Usar sempre água destilada, deionizada ou desmineralizada.
- 2 - Imergir todo o instrumental cirúrgico na solução de detergente, lembrando de injetar essa solução também dentro do lúmen dos mesmos com uma seringa de 20ml, mantendo a solução em contato com o instrumental por no mínimo 3 minutos ou conforme a orientação do fabricante;
- 3 - Friccionar a superfície externa de cada instrumental com uma esponja macia, no mínimo 5 vezes, do sentido proximal para o distal. Repetir esse procedimento até a eliminação de sujidade visível, certificando-se de que todas as reentrâncias foram lavadas;

4 - Friccionar a superfície interna de cada lúmen com uma escova macia, ajustada ao tamanho do lúmen, no mínimo 5 vezes, do sentido proximal para o distal. Repetir esse procedimento até a eliminação de sujidade visível;

5 - Enxaguar a superfície externa do instrumental com água potável sob pressão;

6 - Enxaguar a superfície interna dos lumens injetando água potável sob pressão pelo menos 5 vezes.

**Obs.:** Todos os instrumentais canulados após limpeza manual devem ser colocados em lavadoras ultrassônica nos bicos injetores.

### LIMPEZA AUTOMATIZADA ULTRA-SÔNICA

#### **Materiais:**

Detergente Enzimático: Marca: 3M™ Detergente Multienzimático – 5 Enzimas

#### **Instrução:**

1 - Colocar o instrumental cirúrgico na lavadora ultrassônica;

2 - Iniciar o ciclo, conforme a orientação do fabricante.

- ✓ Temperaturas acima de 40°C, mas sempre inferiores a 60°C (neste método não se verificou a coagulação de proteínas), facilitam a volatilização dos agentes de limpeza, favorecendo a ação do ultrassom no interior das peças, garantindo assim uma limpeza mais eficaz.
- ✓ Normalmente, 3 a 5 minutos de imersão numa frequência de 25 a 40 kHz é o suficiente para limpeza dos instrumentais. Resultados satisfatórios são obtidos de 5 a 10 minutos, quando a frequência do banho ultrassônico é de 35 kHz.

### ENXÁGUE FINAL

1 - Enxaguar todo o instrumental cirúrgico em água corrente, instilando água sob pressão, certificando-se posteriormente da ausência de sujidade.

### SECAGEM

1 - Colocar o instrumental cirúrgico sobre um pano branco e limpo;

2 - Secar cada instrumental externa e internamente com ar sob pressão.

## ESTERILIZAÇÃO

É o procedimento que visa a eliminação total dos micro-organismos (vírus, bactérias micróbios e fungos) seja na forma vegetativa ou esporulada.

a) Esterilização pelo vapor saturado sob Pressão - Autoclave

- Recomendações:

1. Utilizar para a autoclave, água destilada, desmineralizada ou deionizada, para que o vapor resultante esteja isento de impurezas. Ainda assim se necessário, a autoclave deverá possuir filtros adequados para reter impurezas.
2. Os instrumentais cirúrgicos devem ser dispostos abertos, principalmente as pinças hemostáticas e porta-agulhas, ou no máximo fechado apenas no primeiro dente da cremalheira, em bandejas e as mesmas envolvidas em campo duplo de algodão cru, ou colocados em caixas “tipo container” perfumadas, apropriadas para este tipo de esterilização.
3. Não abrir prematuramente a autoclave, para evitar a rápida condensação.
4. Não abrir a autoclave rapidamente, deixando todo o vapor sair primeiro e que o ciclo de secagem se complete.
5. Os parâmetros de esterilização por autoclave são:

Ciclo	Temperatura	Tempo de Exposição
Convencional (1 atm de pressão)	134°C (273°F)	4 minutos

6. Limpar rigorosamente e periodicamente a autoclave, removendo sujeiras e eventual excesso de ferrugem (óxido de ferro).

II – Revisão da Inspeção:

É o ato de verificar se o instrumental não apresenta qualquer irregularidade, deformidade ou resíduo de sujeira.

Recomendação:

- 1- Todos os instrumentais deteriorados, ou que apresentem indícios de corrosão, devem ser separados, para evitar que o processo de corrosão se alastre por contato aos demais instrumentais.
- 2- Proteger sempre a ponta dos instrumentos mais delicados.

3 – Nunca armazenar instrumentos limpos, em caixas cirúrgicas manchadas ou com riscos severos, que possam ser focos de contaminação para o instrumental. Separar os materiais pesados, dos delicados e de pouco peso.

#### III - Lubrificação:

É o cuidado, que vai permitir que as articulações dos instrumentais cirúrgicos, permaneçam maleáveis durante o uso.

Recomendações: Utilizar sempre lubrificante hidrossolúvel, de acordo com a Farmacopeia Internacional, principalmente nas articulações de pinças hemostáticas, tesouras e porta-agulhas.

#### IV - Manchas Superficiais:

São vias de regra, alterações superficiais da superfície metálica e não se constituem de imediato em um processo de corrosão.

- Do Tipo 1: Auréolas e manchas coloridas, parecendo as cores do arco-íris e sem contornos definidos.

Causas: São auréolas e manchas de água, proveniente de íons de metais pesados ou devidos a alta concentração de substâncias minerais ou orgânicas presentes na água.

Solução: São removidas mecanicamente, esfregando-as com escovas ou utilizando-se de limpador de aço inoxidável específico e adequado.

- Do Tipo 2: Resíduos amarelos ou marrom-escuro, presentes nos lugares difíceis de serem limpos. Não devem ser confundidos com oxidação (ferrugem).

Causas: Podem ser devidos a resíduos protéicos incrustados, usos repetidos de detergente que se agrega ao instrumental ou resíduos de soluções químicas desinfetantes não renovadas.

Solução: Limpar constantemente as cubas ou cestos de lavagem e descontaminação. Os resíduos desaparecem quando esfregados ou limpos com agentes de limpeza neutros, e se não eliminados, após certo tempo, certamente podem produzir corrosão e conseqüentemente deterioração do instrumento.

- Do Tipo 3: Coloração amarelada, por todo instrumento.

Causa: Superaquecimento no processo de esterilização.

Solução: Verificar cuidadosamente o funcionamento do aparelho de esterilização, principalmente no quesito controle e aferição de temperatura.

- Do Tipo 4: Manchas cinza-azuladas.

Causa: Utilização a frio, de certas substâncias degermantes.

Solução: A solução química degermante deverá ser descartada frequentemente, com a análise rígida do tempo recomendado pelo fabricante. Como última medida, poderá ser substituída por outro sistema de esterilização.

#### **Descarte do Dispositivo:**

- Quando necessário o descarte do instrumental cirúrgico, deverão ser seguidos procedimentos definidos no Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) (RDC 306, de 07/12/2004) estabelecido pelo hospital dando o melhor destino ao material extraído, que se caracteriza como lixo hospitalar potencialmente contaminante.
- Esses dispositivos devem ser inutilizados/descharacterizados para uso antes do descarte. A descaracterização do produto médico é de inteira responsabilidade da instituição hospitalar, assim como os métodos e procedimentos de descarte utilizados. Entretanto, a Techimport recomenda que tais produtos médicos sejam deformados mecanicamente, através da utilização de prensa de impacto, martelo ou marreta. Em seguida, os produtos médicos devem ser identificados de forma clara e visível, indicando a sua situação, ou seja, impróprio ao uso.
- Descartar todo resíduo perfuro cortante e abrasivo, inclusive os que não foram usados, em recipiente exclusivo, resistente à perfuração e com tampa, sem ultrapassar o limite de 2/3 da capacidade total.
- Para o envio desses produtos médicos utilizados em cirurgia ao fabricante, devem ser utilizadas embalagens que mantenham a integridade dos mesmos. Na embalagem devem constar informações sobre as condições desses produtos, tais como: método de limpeza e desinfecção utilizada, assim como, a identificação dos mesmos.

#### **Advertências:**

Existem instrumentos cirúrgicos apropriados para cada etapa da cirurgia. O desgaste habitual, o exercício de forças excessivas e o uso de instrumentos para fins excluídos ao projeto podem prejudicar a evolução do procedimento e danos ao implante. Os instrumentais são componentes metálicos que estão sujeitos a importantes solicitações mecânicas durante o uso continuado por prazo variável e indefinido, sendo necessária a inspeção e revisão das condições de uso do conjunto de instrumentos ou das suas partes.



Caso ocorram variações no desempenho pretendido, perda de precisão, instabilidade ou falta de corte, o componente deve ser imediatamente substituído.

**Precauções:**

Cada Instrumental é fornecido individualmente para reposição. Deverá ser tomado todo o cuidado necessário ao manusear o produto (seguir Instruções de Uso), este não poderá sofrer qualquer tipo de choque mecânico, pois poderá comprometer a qualidade do mesmo.

As embalagens auxiliam na conservação, manutenção e no transporte do produto. As embalagens são apropriadas e extremamente protetoras.

Os Instrumentais para reposição são embalados em embalagens plásticas e rotulados com identificação do produto (nome do produto), responsável técnico, prazo de validade (2 anos após esterilização), código do produto, número de lote, número do registro do produto no Ministério da Saúde, todos os dados da empresa.

**Efeitos adversos:**

Em casos de evento adverso ou queixa técnica o cirurgião responsável ou o profissional da saúde deverá fazer a comunicação através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://portal.anvisa.gov.br/notificacoes/produtos>

**TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA.**

Rodovia Washington Luiz, Km 172, Rua 06 - Jardim Anhanguera

Condomínio Conpark - Caixa Postal 223 - Rio Claro/SP

Telefone: +55 19 3522-9500

Site: [www.techimportimplantes.com.br](http://www.techimportimplantes.com.br)

Luiz Fernando Santo  
Responsável Legal

Eduardo Henrique Silva Wolf  
Responsável Técnico  
CREA-SP: 5070056408