

Instrução de Uso

Brocas e Fresas para Osteotomia Recobertas com Zircônia Estereis



**Nome Técnico:** Brocas Cirurgicas

**Nome Comercial:** Brocas e Fresas para Osteotomia Recobertas com Zircônia Estereis

**Registro ANVISA:** 81118460058

**Fabricante:**

**TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP**

Rodovia Washington Luiz, Km 172, Rua 06 - Jardim Anhanguera

Condomínio Conpark - Caixa Postal 223 - Rio Claro/SP - CEP 13501-600

CNPJ: 15.524.734/0001-47

comercial@techimportimplantes.com.br

[www.techimportimplantes.com.br](http://www.techimportimplantes.com.br)





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






Telefone: +55 19 3522 – 9500

**PRODUTO ESTÉRIL  
A EMPRESA RECOMENDA USO ÚNICO**

**CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO****Nome Técnico:** Brocas Cirurgicas**Nome Comercial:** Brocas e Fresas para Osteotomia Recobertas com Zirconia Estereis**Composto por:** Instrumentais**Registro ANVISA:** 81118460058**Modelos comerciais:** Ver Tabela 1**Metodo de Esterilização:** ETO**Validade:** 3 anos apartir da data de Esterilização**DESCRIÇÃO DO PRODUTO MÉDICO**
















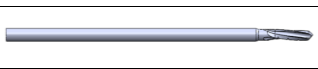










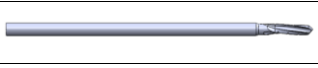



Os modelos de Brocas e Fresas para Osteotomia Recobertas com Zircônia Estereis – Techimport possuem a função de realizar perfurações, cortes, ressecção óssea em cirurgias Hallux Valgus, Tratamento de pé plano, pé cavo e coalisão tarsal, ressecção de ossos do pé, bem como em osteotomias ou pserdoartrose do tarso, médio pé, metatarsos e falanges e osteotomias em pequenos e grandes ossos, como calcâneo.

(Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia)

Tabela 1 – Modelos Comerciais		
Código	Descrição	Imagem
TI018.6020.005	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,0 X 5,0 X 65,0MM	
TI018.6020.008	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,0 X 8,0 X 65MM	
TI018.6020.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,0 X 13,0 X 65MM	
TI018.6020.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,0 X 20,0 X 65,0MM	
TI018.6021.011	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,1 X 11,0 X 65MM	
TI018.6022.011	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,2 X 11,0 X 65MM	
TI018.6022.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,2 X 13,0 X 65MM	
TI018.6026.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,6 X 20,0 X 65MM	
TI018.6029.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,9 X 13,0 X 65MM	
TI018.6029.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,9 X 20,0 X 65,0 MM	
TI018.6031.010	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø3,1 X 10,0 X 65,0 MM	
TI018.6031.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø3,1 X 13,0 X 65,0 MM	





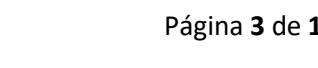







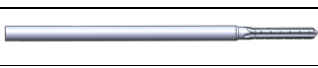




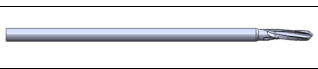








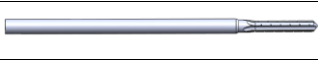



## Instrução de Uso









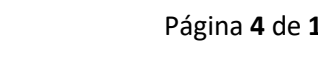







### Brocas e Fresas para Osteotomia Recobertas com Zircônia Estereis

TI018.6041.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø4,1 X 13,0 X 65,0 MM	
TI018.6043.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø4,3 X 13,0 X 65MM	
TI018.6050.014	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA ESFÉRICA Ø5,0 X 14,0 X 65MM	
TI018.6120.005	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,0 X 5,0 X 65,0MM - ES	
TI018.6120.008	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,0 X 8,0 X 65,0MM - ES	
TI018.6120.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,0 X 13,0 X 65,0MM - ES	
TI018.6120.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,0 X 20,0 X 65,0MM - ES	
TI018.6121.011	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,10 X 11,0 X 65,0MM - ES	
TI018.6122.011	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,2 X 11,0 X 65,0MM - ES	
TI018.6122.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,2 X 13,0 X 65,0MM - ES	
TI018.6126.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,6 X 20,0 X 65,0MM - ES	
TI018.6129.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,9 X 13,0 X 65,0 MM - ES	
TI018.6129.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,9 X 20,0 X 65,0 MM - ES	
TI018.6131.010	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø3,1 X 10,0 X 65,0 MM - ES	
TI018.6131.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø3,1 X 13,0 X 65,0 MM - ES	
TI018.6141.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø4,1 X 13,0 X 65,0 MM - ES	
TI018.6143.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø4,3 X 13,0 X 65,0MM - ES	
TI018.6150.014	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA ESFÉRICA Ø5,0 X 14,0 X 65,0MM - ES	
TI018.7020.005	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,0 X 5,0 X 55,0MM	
TI018.7020.008	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,0 X 8,0 X 55MM	
TI018.7020.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,0 X 13,0 X 55MM	
TI018.7020.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,0 X 20,0 X 55,0MM	
TI018.7021.011	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,1 X 11,0 X 55MM	
TI018.7022.011	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,2 X 11,0 X 55MM	
TI018.7022.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,2 X 13,0 X 55MM	
TI018.7026.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,6 X 20,0 X 55MM	
TI018.7029.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,9 X 13,0 X 55MM	
TI018.7029.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,9 X 20,0 X 55,0 MM	
TI018.7031.010	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø3,1 X 10,0 X 55,0 MM	
TI018.7031.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø3,1 X 13,0 X 55,0 MM	

Instrução de Uso







Brocas e Fresas para Osteotomia Recobertas com Zircônia Estereis

TI018.7041.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø4,1 X 13,0 X 55,0 MM	
TI018.7043.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø4,3 X 13,0 X 55MM	
TI018.7050.014	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA ESFÉRICA Ø5,0 X 14,0 X 55MM	
TI018.7120.005	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,0 X 5,0 X 55,0MM - ES	
TI018.7120.008	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,0 X 8,0 X 55,0MM - ES	
TI018.7120.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,0 X 13,0 X 55,0MM - ES	
TI018.7120.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,0 X 20,0 X 55,0MM - ES	
TI018.7121.011	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,10 X 11,0 X 55,0MM - ES	
TI018.7122.011	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,2 X 11,0 X 55,0MM - ES	
TI018.7122.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,2 X 13,0 X 55,0MM - ES	
TI018.7126.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,6 X 20,0 X 55,0MM - ES	
TI018.7129.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,9 X 13,0 X 55,0 MM - ES	
TI018.7129.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,9 X 20,0 X 55,0 MM - ES	
TI018.7131.010	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø3,1 X 10,0 X 55,0 MM - ES	
TI018.7131.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø3,1 X 13,0 X 55,0 MM - ES	
TI018.7141.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø4,1 X 13,0 X 55,0 MM - ES	
TI018.7143.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø4,3 X 13,0 X 55,0MM - ES	
TI018.7150.014	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA ESFÉRICA Ø5,0 X 14,0 X 55,0MM - ES	
TI018.8020.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,0 X 13,0 X 75,0MM	
TI018.8020.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,0 X 20,0 X 75,0MM	
TI018.8021.011	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,10 X 11,0 X 75,0MM	
TI018.8022.011	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,2 X 11,0 X 75,0MM	
TI018.8022.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,2 X 13,0 X 75,0MM	
TI018.8026.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,6 X 20,0 X 75,0MM	
TI018.8029.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,9 X 13,0 X 75,0 MM	
TI018.8029.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,9 X 20,0 X 75,0 MM	
TI018.8031.010	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø3,1 X 10,0 X 75,0 MM	
TI018.8031.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø3,1 X 13,0 X 75,0 MM	
TI018.8041.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø4,1 X 13,0 X 75,0 MM	
TI018.8043.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø4,3 X 13,0 X 75,0MM	

TI018.8050.014	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA ESFÉRICA Ø5,0 X 14,0 X 75,0MM	
TI018.8120.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,0 X 13,0 X 75,0MM - ES	
TI018.8120.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,0 X 20,0 X 75,0MM - ES	
TI018.8121.011	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,10 X 11,0 X 75,0MM - ES	
TI018.8122.011	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,2 X 11,0 X 75,0MM - ES	
TI018.8122.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,2 X 13,0 X 75,0MM - ES	
TI018.8126.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,6 X 20,0 X 75,0MM - ES	
TI018.8129.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,9 X 13,0 X 75,0 MM - ES	
TI018.8129.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,9 X 20,0 X 75,0 MM - ES	
TI018.8131.010	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø3,1 X 10,0 X 75,0 MM - ES	
TI018.8131.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø3,1 X 13,0 X 75,0 MM - ES	
TI018.8141.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø4,1 X 13,0 X 75,0 MM - ES	
TI018.8143.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø4,3 X 13,0 X 75,0MM - ES	
TI018.8150.014	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA ESFÉRICA Ø5,0 X 14,0 X 75,0MM - ES	
TI018.9020.008	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,0 X 8,0 X 65,0MM	
TI018.9120.008	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,0 X 8,0 X 65,0MM - ES	

## COMPOSIÇÃO

O materiais selecionados para composição se encontram listados abaixo:

Código	Descrição	Imagem	Material
TI018.6020.005	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,0 X 5,0 X 65,0MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI018.6020.008	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,0 X 8,0 X 65MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI018.6020.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,0 X 13,0 X 65MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI018.6020.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,0 X 20,0 X 65,0MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI018.6021.011	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,1 X 11,0 X 65MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI018.6022.011	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,2 X 11,0 X 65MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$

Instrução de Uso

Brocas e Fresas para Osteotomia Recobertas com Zircônia Estereis

TI018.6022.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,2 X 13,0 X 65MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.6026.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,6 X 20,0 X 65MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.6029.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,9 X 13,0 X 65MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.6029.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,9 X 20,0 X 65,0 MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.6031.010	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø3,1 X 10,0 X 65,0 MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.6031.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø3,1 X 13,0 X 65,0 MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.6041.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø4,1 X 13,0 X 65,0 MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.6043.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø4,3 X 13,0 X 65MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.6050.014	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA ESFÉRICA Ø5,0 X 14,0 X 65MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.6120.005	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,0 X 5,0 X 65,0MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.6120.008	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,0 X 8,0 X 65,0MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.6120.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,0 X 13,0 X 65,0MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.6120.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,0 X 20,0 X 65,0MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.6121.011	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,10 X 11,0 X 65,0MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.6122.011	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,2 X 11,0 X 65,0MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.6122.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,2 X 13,0 X 65,0MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.6126.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,6 X 20,0 X 65,0MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.6129.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,9 X 13,0 X 65,0 MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.6129.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,9 X 20,0 X 65,0 MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.6131.010	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø3,1 X 10,0 X 65,0 MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.6131.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø3,1 X 13,0 X 65,0 MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.6141.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø4,1 X 13,0 X 65,0 MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.6143.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø4,3 X 13,0 X 65,0MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.6150.014	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA ESFÉRICA Ø5,0 X 14,0 X 65,0MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )

Instrução de Uso

Brocas e Fresas para Osteotomia Recobertas com Zircônia Estereis

TI018.7020.005	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,0 X 5,0 X 55,0MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.7020.008	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,0 X 8,0 X 55MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.7020.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,0 X 13,0 X 55MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.7020.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,0 X 20,0 X 55,0MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.7021.011	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,1 X 11,0 X 55MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.7022.011	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,2 X 11,0 X 55MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.7022.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,2 X 13,0 X 55MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.7026.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,6 X 20,0 X 55MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.7029.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,9 X 13,0 X 55MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.7029.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,9 X 20,0 X 55,0 MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.7031.010	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø3,1 X 10,0 X 55,0 MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.7031.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø3,1 X 13,0 X 55,0 MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.7041.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø4,1 X 13,0 X 55,0 MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.7043.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø4,3 X 13,0 X 55MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.7050.014	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA ESFÉRICA Ø5,0 X 14,0 X 55MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.7120.005	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,0 X 5,0 X 55,0MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.7120.008	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,0 X 8,0 X 55,0MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.7120.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,0 X 13,0 X 55,0MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.7120.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,0 X 20,0 X 55,0MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.7121.011	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,10 X 11,0 X 55,0MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.7122.011	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,2 X 11,0 X 55,0MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.7122.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,2 X 13,0 X 55,0MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.7126.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,6 X 20,0 X 55,0MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.7129.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,9 X 13,0 X 55,0 MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )

Instrução de Uso










Brocas e Fresas para Osteotomia Recobertas com Zirconia Estereis

TI018.7129.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,9 X 20,0 X 55,0 MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.7131.010	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø3,1 X 10,0 X 55,0 MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.7131.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø3,1 X 13,0 X 55,0 MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.7141.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø4,1 X 13,0 X 55,0 MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.7143.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø4,3 X 13,0 X 55,0MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.7150.014	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA ESFÉRICA Ø5,0 X 14,0 X 55,0MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.8020.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,0 X 13,0 X 75,0MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.8020.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,0 X 20,0 X 75,0MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.8021.011	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,10 X 11,0 X 75,0MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.8022.011	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,2 X 11,0 X 75,0MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.8022.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,2 X 13,0 X 75,0MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.8026.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,6 X 20,0 X 75,0MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.8029.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,9 X 13,0 X 75,0 MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.8029.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,9 X 20,0 X 75,0 MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.8031.010	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø3,1 X 10,0 X 75,0 MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.8031.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø3,1 X 13,0 X 75,0 MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.8041.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø4,1 X 13,0 X 75,0 MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.8043.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø4,3 X 13,0 X 75,0MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.8050.014	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA ESFÉRICA Ø5,0 X 14,0 X 75,0MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.8120.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,0 X 13,0 X 75,0MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.8120.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,0 X 20,0 X 75,0MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.8121.011	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,10 X 11,0 X 75,0MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.8122.011	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,2 X 11,0 X 75,0MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.8122.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,2 X 13,0 X 75,0MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )



## Instrução de Uso

### Brocas e Fresas para Osteotomia Recobertas com Zircônia Estereis

TI018.8126.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,6 X 20,0 X 75,0MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.8129.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,9 X 13,0 X 75,0 MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.8129.020	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø2,9 X 20,0 X 75,0 MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.8131.010	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø3,1 X 10,0 X 75,0 MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.8131.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø3,1 X 13,0 X 75,0 MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.8141.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø4,1 X 13,0 X 75,0 MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.8143.013	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA Ø4,3 X 13,0 X 75,0MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.8150.014	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA ESFÉRICA Ø5,0 X 14,0 X 75,0MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.9020.008	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,0 X 8,0 X 65,0MM		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
TI018.9120.008	FRESA PARA OSTEOTOMIA RECOBERTA COM ZIRCÔNIA RETA Ø2,0 X 8,0 X 65,0MM - ES		Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO <sub>2</sub> (3%Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )

## INDICAÇÃO E FINALIDADE

Os modelos de **Brocas e Fresas para Osteotomia Recobertas com Zircônia Estereis – Techimport** possuem a função de realizar perfurações, cortes, ressecção óssea em cirurgias Hallux Valgus, Tratamento de pé plano, pé cavo e coalisão tarsal, ressecção de ossos do pé, bem como em osteotomias ou pserdoartrose do tarso, médio pé, metatarsos e falanges e osteotomias em pequenos e grandes ossos, como calcâneo.

## CONTRAINDICAÇÃO

Não se Aplica.

## ADVERTENCIAS E PRECAUÇÕES

Os instrumentais aqui descritos devem ser utilizados apenas com produtos Techimport.

## ESTERILIZAÇÃO

O produto é fornecido na condição Estéril, em Óxido de Etileno.

## MARCAÇÃO

A identificação do produto é feita através de gravação a laser que deve ser gravado conforme

Instrução de Uso

Brocas e Fresas para Osteotomia Recobertas com Zirconia Estereis

orientação de gravação contida no desenho técnico do produto.

## **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

Armazenar e transportar em local seco e fresco, com temperatura Máx. de 25°C e umidade relativa de 75% e ao abrigo da luz solar direta.

Transportar com cuidado para evitar a queda e atrito a fim de não danificar a embalagem e o dispositivo. Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte e conservação das referências do lote devem ser adotados em conjunto com as Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos Médicos e conforme as diretrizes da RDC-665

## **PRAZO DE VALIDADE E REPROCESSAMENTO**

Prazo de validade é de 3 anos a partir da data de esterilização, após aberto o mesmo deve ser descartado caso não seja utilizado imediatamente.


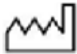













## **DESCARTE DO DISPOSITIVO**

Os dispositivos devem ser inutilizados para uso antes do descarte. Recomendamos que as peças sejam limadas, entortadas ou cortadas para sua inutilização. O descarte deverá obedecer às normas relativas a eliminação de lixo hospitalar contaminante, descartando-se em recipientes apropriados e com identificação clara de que se trata de lixo contaminante.


**RECLAMAÇÃO/ATENDIMENTO AO CLIENTE:** Reclamações relacionadas a algum efeito adverso que afete a segurança do usuário, como produto não funcionando, dano no componente metálico implantável, problemas graves ou mortes relacionadas a esses componentes o cirurgião responsável deverá comunicar imediatamente este evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm> e a **TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP** através do e-mail [qualidade@techimportimplantes.com.br](mailto:qualidade@techimportimplantes.com.br) ou pelo telefone (19) 3522-9500. Caso ocorra algum evento adverso ou queixa técnica, o cirurgião responsável ou o profissional da saúde poderá fazer a comunicação do evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm>

## FORMA DE APRESENTAÇÃO

O **Brocas e Fresas para Osteotomia Recobertas com Zircônia Estereis – Techimport** é fornecido na condição esteril, comercializado em blister primário e secundário, ambos fabricados em pet (Polietileno tereftalato) virgem conformado por termoformagem e selados por barreiras de papel Tyvek. Os blisters são colocados em caixa de papel kraft junto com os rótulos de rastreabilidade. As embalagens são identificadas com uma etiqueta RFID conforme indicação abaixo:

Fabricante: TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA – EPP R.D. WASHINGTON LUIZ KM 172 (RUA 06) – LOTE B-8 – JD ANHANQUERA – RIO CLARO – SP CNPJ: 15524734000147 – Fone: +55 (19)3622-9600 – SAC: +55 (19)3622-9600 E.T.: Eduacio Henrique Silva Wolf – CREA 6070056408 – Instrução de Uso pelo Site <a href="http://www.techimportimplantes.com.br">http://www.techimportimplantes.com.br</a>			<b>STERILE EO</b>
Nome Técnico:			
Nome Comercial:			
Modelo Comercial:			
Registro ANVISA n. Material:	Qtde.:	un.	Proibido Reprocessar / Uso Único
Ref:			
Lote:	SN:		
<p>Advertências, Precauções, Manipulação, entre outras informações consultar Instruções de Uso – Revisão – Consulta pelo Site</p> <p>PRODUTO ESTERIL - GAS OXIDO DE ETILENO</p>			
			
			
			

### Legenda da Simbologia

	Esterilizado por Óxido de Etileno		Data de Fabricação
	Data de Validade		Consultar Instruções de Uso
	Frágil, manusear com cuidado		Manter ao abrigo do sol
	Manter Seco		Limite de Temperatura
	Não reesterilizar		Limite de Umidade
	Não Utilizar se a embalagem estiver danificada		Produto de Uso único

## ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO

Todos os produtos são acompanhados de um alerta de instrução de uso, contendo todas as informações para acesso ao site do fabricante, além de informações de solicitação de Instrução de Uso no formato impresso, conforme Instrução Normativa da ANVISA DE N° 04 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde:



**ALERTA INSTRUÇÃO DE USO**

Em atendimento a Instrução Normativa IN n°04 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, segue neste alerta os procedimentos para obtenção das Instruções de Uso em formato eletrônico no site do fabricante do produto e a obtenção no formato impresso.

Para obtenção da instrução de uso em formato impresso (quando necessário), favor entrar em contato com a Techimport que será enviado sem custo adicional (inclusive de envio). Solicitar para: **qualidade@techimportimplantes.com.br** ou pelo telefone **(19)3522-9500**

Todas as Instruções de Uso disponibilizadas no site possuem a identificação da revisão e data do documento. Sendo que o usuário deve **atentar-se para a correta versão do documento** em relação à versão informada no rótulo do produto adquirido.

O documento contendo as Instruções de Uso para a correta utilização e manuseio do produto encontra-se disponível no endereço eletrônico:

**www.techimportimplantes.com.br**

Revisão: 01  
Emissão: 2022

## EFEITOS ADVERSOS

Em casos de evento adverso ou queixa técnica o cirurgião responsável ou o profissional da saúde deverá fazer a comunicação através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://portal.anvisa.gov.br/notificacoes/produtos>

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Fabricado e distribuído por:

**TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP**

Rodovia Washington Luiz, Km 172, Rua 06 - Jardim Anhanguera

Condomínio Conpark - Caixa Postal 223 - Rio Claro/SP - CEP 13501-600

CNPJ: 15.524.734/0001-47

[comercial@techimportimplantes.com.br](mailto:comercial@techimportimplantes.com.br)

[www.techimportimplantes.com.br](http://www.techimportimplantes.com.br)

Telefone: +55 19 3522 – 9500