

Instrução de Uso

Nome Técnico: Âncora

Nome Comercial: Âncoras Flexíveis Knottech Techimport

Registro ANVISA n. 81118460081

Responsável técnico: Eduardo Henrique Silva Wolf - CREA-SP: 5070056408

DESCRIÇÃO DO PRODUTO MÉDICO

As Âncoras Flexíveis Knottech Techimport tem como finalidade a reconexão de tecidos moles aos ossos nos membros superiores (Ombro, Cotovelo, Punho e Mãos) e inferiores (Tornozelo e Pé) atuando de maneira a suportar cargas de tração através da compressão entre a âncora e a cortical óssea quando implantados. Os implantes são disponibilizados pré-carregados em um cabo aplicador descartável, composto por uma haste metálica e um cabo polimérico. O implante e o cabo aplicador descartável constituem produto único e não podem ser vendidos separadamente.

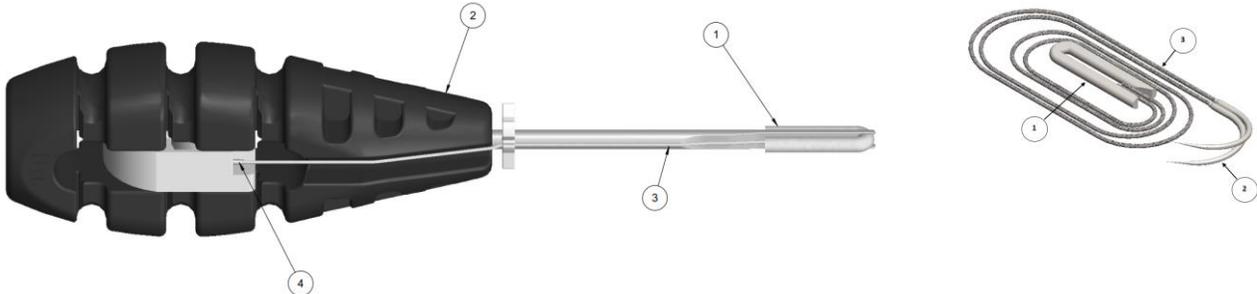
A família de Âncoras Flexíveis Knottech Techimport estão disponíveis nos seguintes diâmetros de âncoras flexíveis: Ø0,9 / Ø1,3 / Ø1,5 / Ø2,1 / Ø2,4 / Ø2,9mm. A **figura 1** mostra a Âncora Flexíveis Knottech Techimport:



Figura 1 - Âncora Flexíveis Knottech Techimport

As Âncoras Flexíveis Knottech Techimport são compostos por âncoras e os fios de suturas fabricados em Polietileno entrançado de elevado peso molecular -UHMWPE - NBR 13904 e cabo aplicador fabricado em Resina fotopolimerizável, Aço inox Austenítico (ASTM F899), Polipropileno (ASTM D4101), PL400 Transparente e Borracha nitrílica 70 Shore (**ver tabela 2**). As Âncoras Flexíveis Knottech Techimport são fornecidos na condição estéril, sendo que o método de esterilização empregado é dado através da submissão do produto à presença de óxido de etileno (E.T.O.). As características das Âncoras Flexíveis Knottech Techimport estão descritos na **tabela 2**. A **tabela 1** ilustra a composição das Âncoras Flexíveis Knottech Techimport:

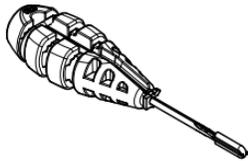
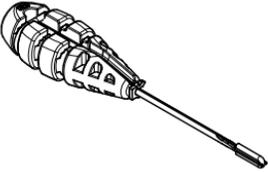
Tabela 1 – Composição das Âncoras Flexíveis Knottech Techimport

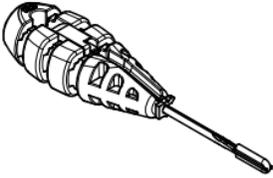
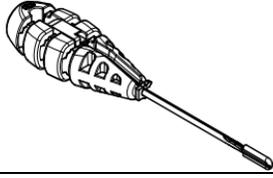
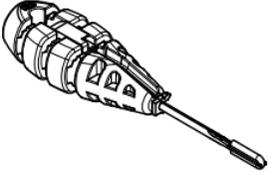
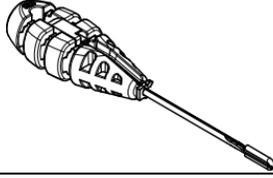
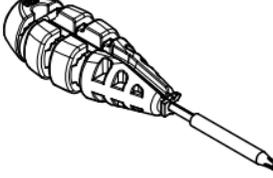
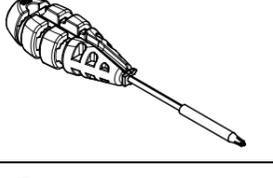
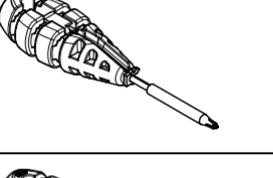
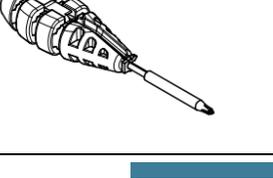


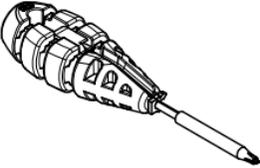
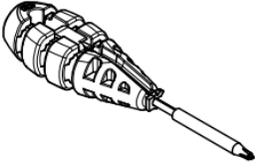
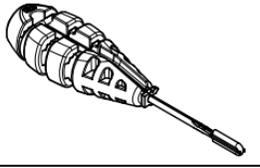
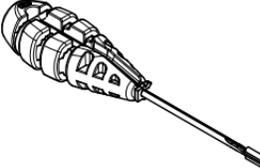
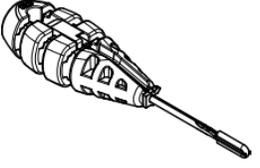
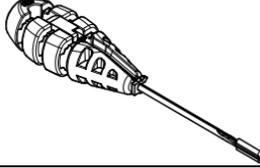
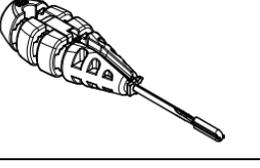
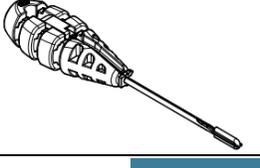
N.	DESCRIÇÃO	COMPOSIÇÃO	TIPO	
1	Âncora Flexível KNOTTECH	Ø0,9mm	Polietileno entrançado de elevado peso molecular - UHMWPE - NBR 13904	Implantável
		Ø1,3mm		
		Ø1,5mm		
		Ø2,1mm		
		Ø2,4mm		
2	Cabo aplicador	Mini	Cabo: Polipropileno (ASTM D4101) Haste: Aço inox Austenítico (ASTM F899) Demais componentes do cabo: <ul style="list-style-type: none"> Anel O-ring: Borracha nitrílica 70 Shore Trava do fio: Resina fotopolimerizável 	Descartável
		Curto		
		Longo		
		Cabo STD		
		Mini com Capa		
Curto com Capa				
3	Fio de sutura	USP 2-0	Polietileno entrançado de elevado peso molecular - UHMWPE - NBR 13904	Implantável
		USP 3-0		
		USP 2		
4	Agulha	½ círculo cilíndrica	Aço inox martensítico (ASTM F899)	Descartável

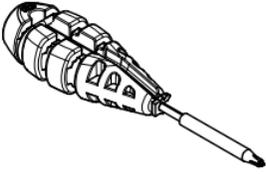
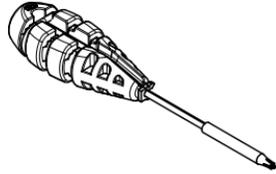
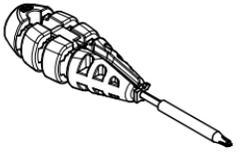
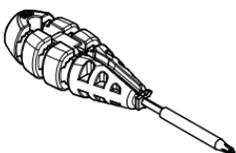
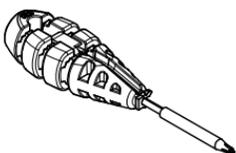
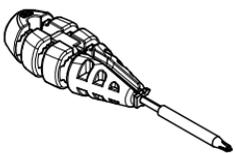
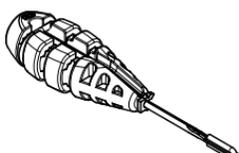
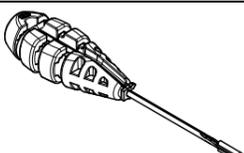
TABELA DE CÓDIGOS E DESCRIÇÕES

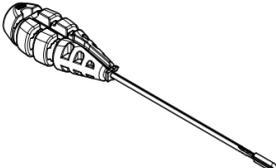
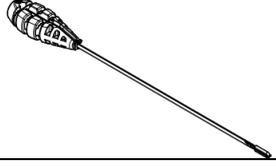
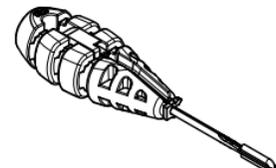
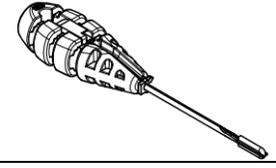
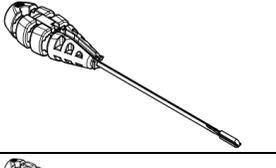
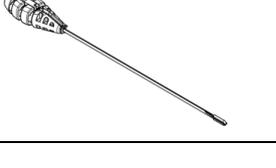
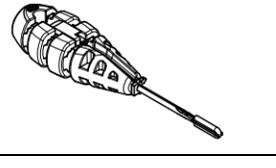
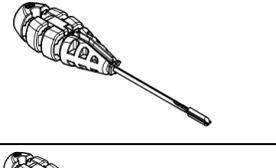
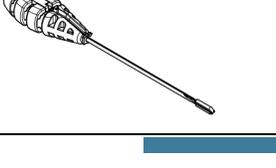
Tabela 2: Relação de Modelos Comerciais – Âncoras Flexíveis Knottech Techimport

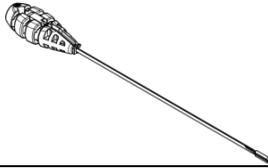
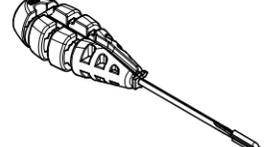
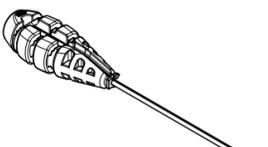
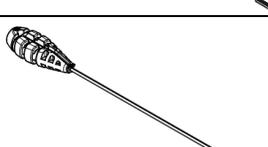
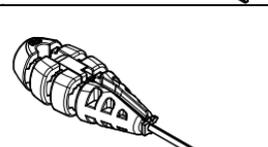
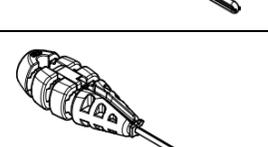
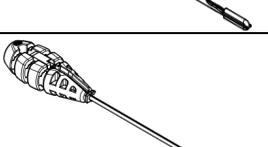
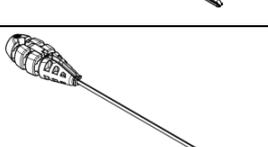
Imagem	Código	Descrição	Qt/Subcomponentes	Cor do fio
	TI034.0920.100	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 cabo mini	---
	TI034.0920.110	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 cabo curto	---

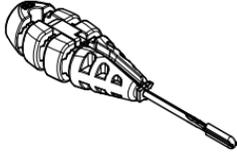
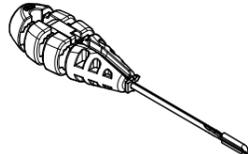
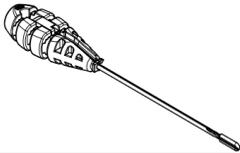
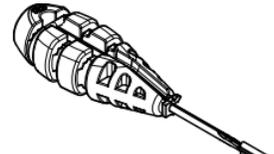
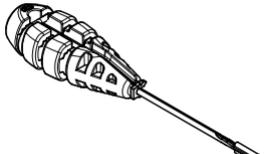
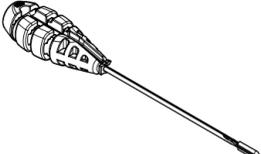
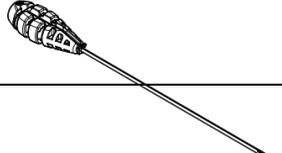
	TI034.0920.101	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#2-0 com 1 Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 agulha ½ circulo cilíndrica	---
			1 cabo mini	---
	TI034.0920.111	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#2-0 com 1 Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 agulha ½ circulo cilíndrica	---
			1 cabo curto	---
	TI034.0920.102	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ circulo cilíndrica	---
			1 cabo mini	---
	TI034.0920.112	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ circulo cilíndrica	---
			1 cabo curto	---
	TI034.0920.140	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Mini com Capa	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo Mini com Capa	---
	TI034.0920.150	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Curto com Capa	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo curto com Capa	---
	TI034.0920.141	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#2-0 com 1 Agulha - Cabo Mini com Capa	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 agulha ½ circulo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini com Capa	---
	TI034.0920.151	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#2-0 com 1 Agulha - Cabo Curto com Capa	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 agulha ½ circulo cilíndrica	---
			1 Cabo curto com Capa	---

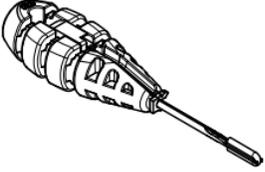
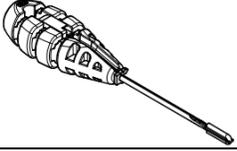
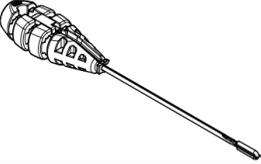
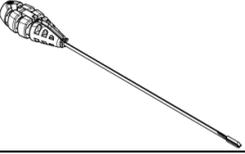
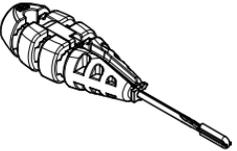
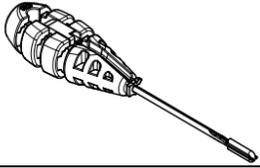
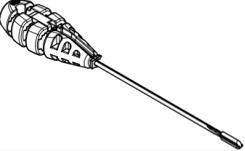
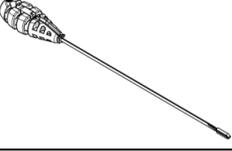
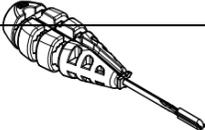
	TI034.0920.142	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Mini com Capa	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini com Capa	---
	TI034.0920.152	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Curto com Capa	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto com Capa	---
	TI034.0930.100	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#3-0 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 3-0	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.0930.110	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#3-0 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 3-0	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.0930.101	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#3-0 com 1 Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 3-0	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo mini	---
	TI034.0930.111	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#3-0 com 1 Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 3-0	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 cabo curto	---
	TI034.0930.102	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#3-0 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 3-0	Azul e branco
			1 Cabo mini	---
	TI034.0930.112	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#3-0 com 2 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 3-0	Azul e branco
			1 Cabo curto	---

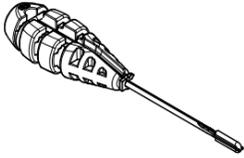
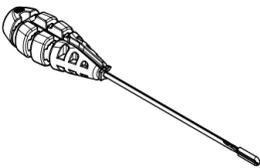
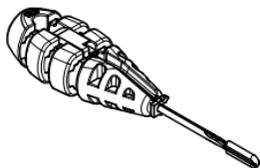
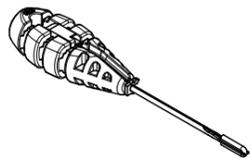
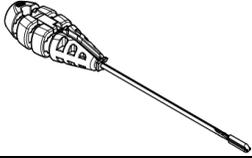
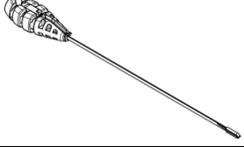
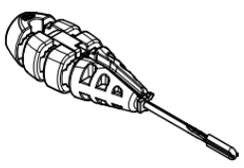
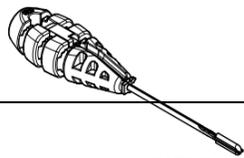
	TI034.0930.140	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#3-0 sem Agulha - Cabo Mini com Capa	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 3-0	Azul e branco
			1 Cabo Mini com Capa	---
	TI034.0930.150	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#3-0 sem Agulha - Cabo Curto com Capa	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 3-0	Azul e branco
			1 Cabo curto com Capa	---
	TI034.0930.141	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#3-0 com 1 Agulha - Cabo Mini com Capa	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 3-0	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini com Capa	---
	TI034.0930.151	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#3-0 com 1 Agulha - Cabo Curto com Capa	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 3-0	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto com Capa	---
	TI034.0930.142	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#3-0 com 2 Agulhas - Cabo Mini com Capa	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 3-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini com Capa	---
	TI034.0930.152	Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm - 1 Fio / USP#3-0 com 2 Agulhas - Cabo Curto com Capa	1 âncora flexível Ø0,9mm	Branco
			1 fio USP 3-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto com Capa	---
	TI034.1320.100	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1320.110	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---

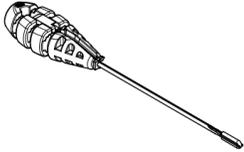
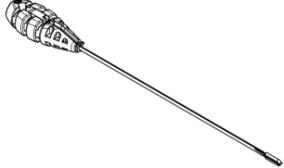
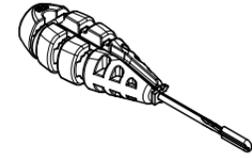
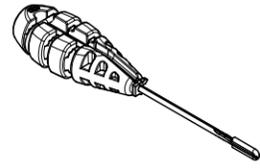
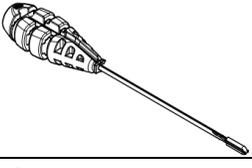
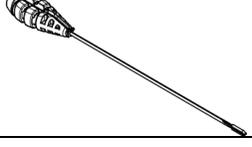
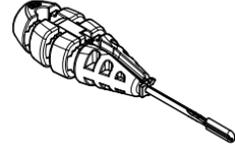
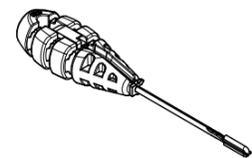
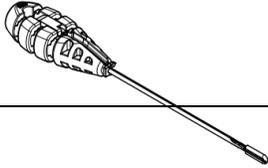
	TI034.1320.120	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2-0 sem Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo STD	---
	TI034.1320.130	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1320.101	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2-0 com 1 Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1320.111	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2-0 com 1 Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1320.121	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2-0 com 1 Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.1320.131	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2-0 com 1 Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1320.102	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1320.112	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1320.122	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---

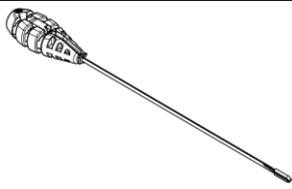
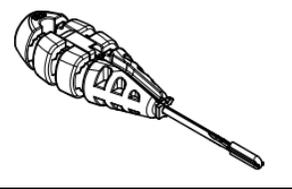
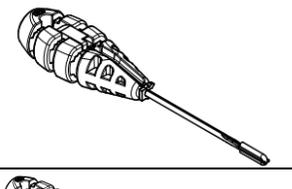
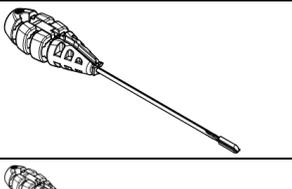
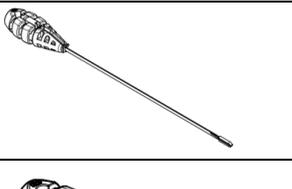
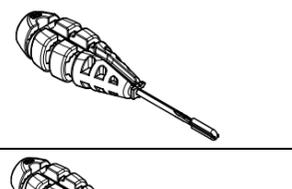
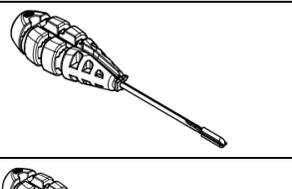
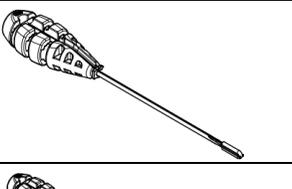
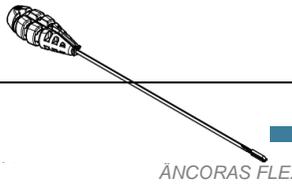
	TI034.1320.132	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1320.200	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1320.210	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1320.220	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2-0 sem Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo STD	---
	TI034.1320.230	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1320.202	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1320.212	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1320.222	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.1320.232	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---

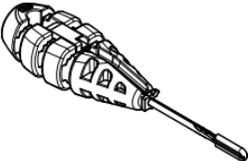
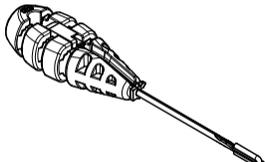
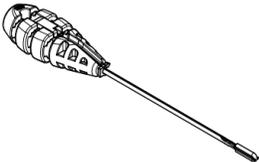
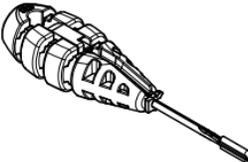
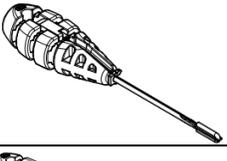
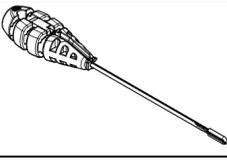
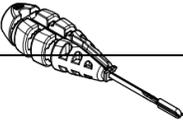
			1 Cabo longo	---
	TI034.1320.204	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2-0 com 4 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1320.214	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2-0 com 4 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1320.224	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2-0 com 4 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.1320.234	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2-0 com 4 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1302.100	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1302.110	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1302.120	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo STD	---
	TI034.1302.130	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2	Azul e branco

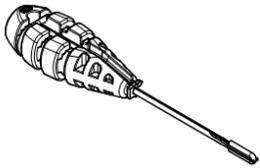
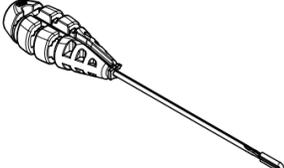
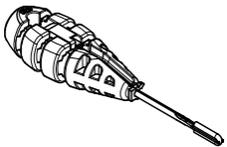
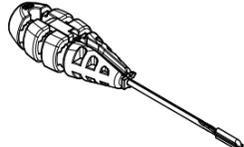
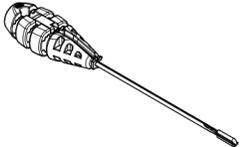
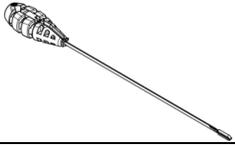
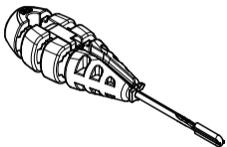
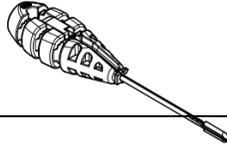
			1 Cabo STD	---
	TI034.1302.101	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2 com 1 Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1302.111	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2 com 1 Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1302.121	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2 com 1 Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.1302.131	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2 com 1 Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1302.102	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1302.112	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1302.122	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.1302.132	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			1 fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1302.200	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco

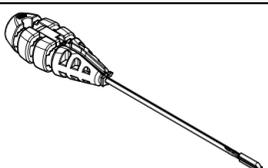
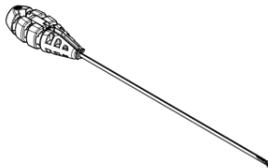
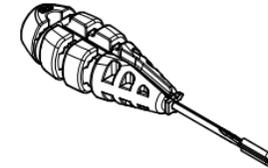
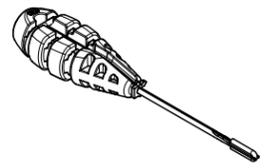
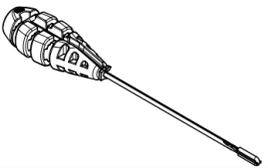
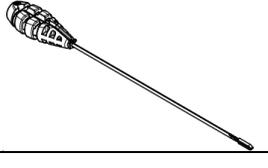
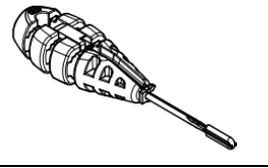
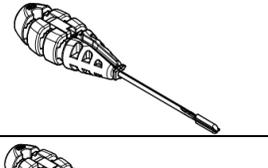
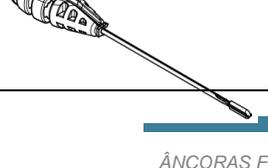
		sem Agulha - Cabo Mini	1 fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1302.210	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1302.220	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo STD	---
	TI034.1302.230	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1302.202	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1302.212	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1302.222	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.1302.232	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1302.204	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1302.214	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---

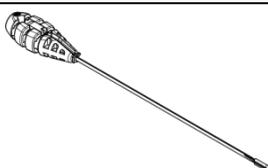
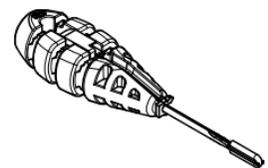
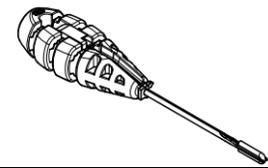
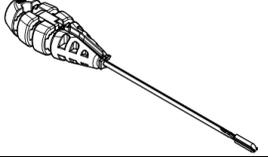
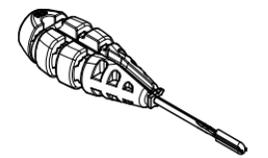
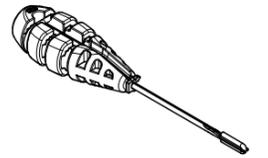
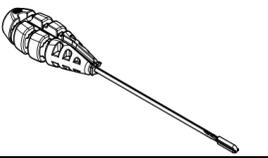
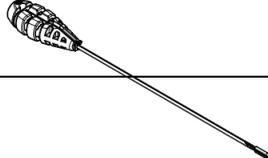
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1302.224	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.1302.234	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,3mm	Branco
			2 fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1520.100	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1520.110	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1520.120	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2-0 sem Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo STD	---
	TI034.1520.130	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1520.101	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2-0 com 1 Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1520.111	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2-0 com 1 Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1520.121	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2-0 com 1 Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---

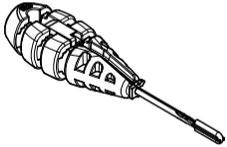
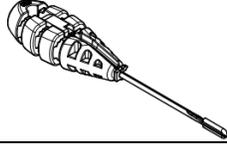
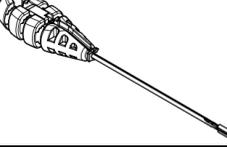
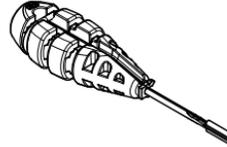
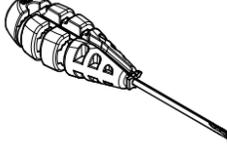
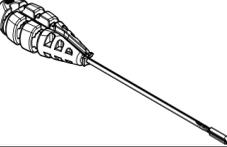
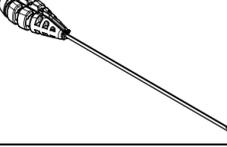
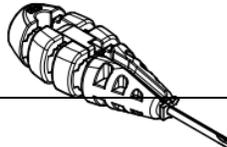
			1 Cabo STD	---
	TI034.1520.131	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2-0 com 1 Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			1 agulha ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1520.102	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1520.112	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1520.122	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.1520.132	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 fio USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1520.200	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1520.210	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1520.220	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2-0 sem Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			1 Cabo STD	---
	TI034.1520.230	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2-0 sem Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco

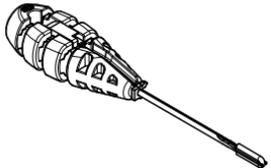
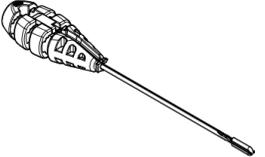
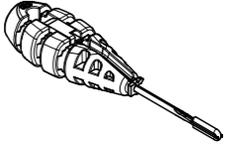
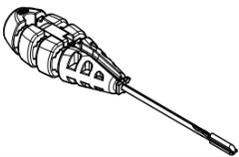
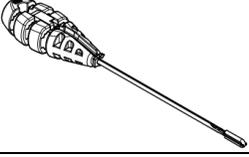
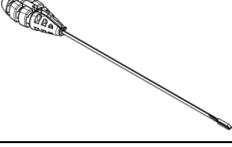
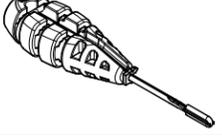
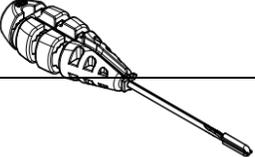
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1520.202	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1520.212	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1520.222	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.1520.232	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2-0 com 2 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1520.204	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2-0 com 4 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1520.214	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2-0 com 4 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1520.224	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2-0 com 4 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.1520.234	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2-0 com 4 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 fios USP 2-0	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1502.100	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco

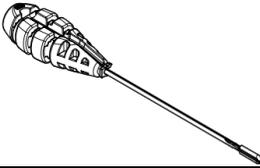
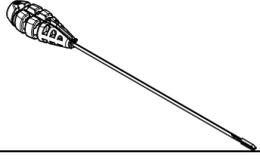
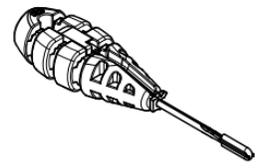
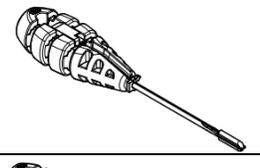
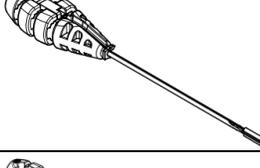
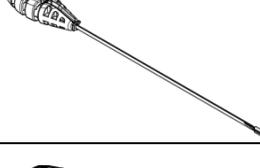
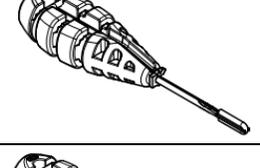
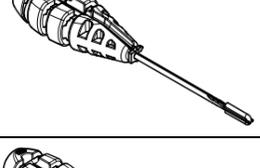
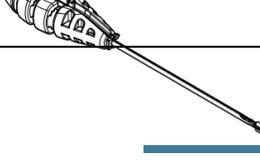
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1502.110	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1502.120	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo STD	---
	TI034.1502.130	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1502.101	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2 com 1 Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 agulha ½ circulo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1502.111	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2 com 1 Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 agulha ½ circulo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1502.121	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2 com 1 Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 agulha ½ circulo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.1502.131	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2 com 1 Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1502.102	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ circulo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1502.112	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas -	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ circulo cilíndrica	---

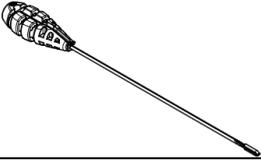
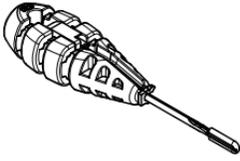
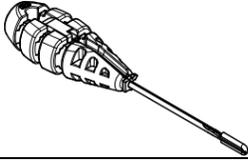
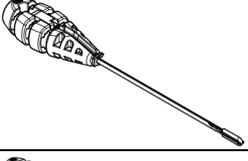
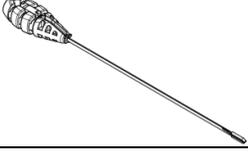
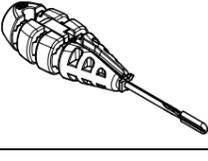
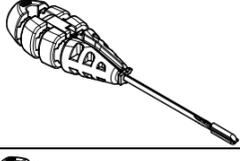
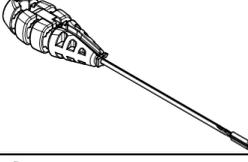
	TI034.1502.122	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo STD	1 Cabo Curto	---
			1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
	TI034.1502.132	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1502.200	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1502.210	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1502.220	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo STD	---
	TI034.1502.230	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.1502.202	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.1502.212	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.1502.222	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---

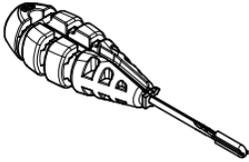
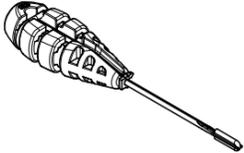
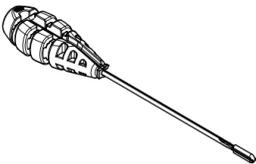
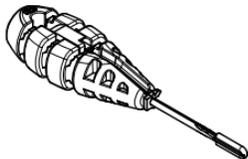
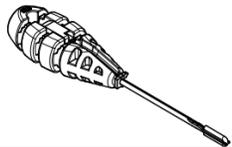
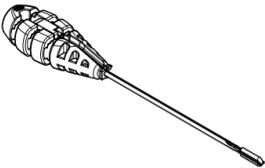
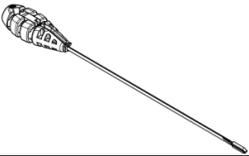
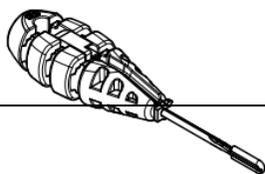
	TI034.1502.232	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Longo	1 Cabo STD	---
			1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
	TI034.1502.204	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Mini	1 Cabo Longo	---
			1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
	TI034.1502.214	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Curto	1 Cabo Mini	---
			1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
	TI034.1502.224	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo STD	1 Cabo Curto	---
			1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
	TI034.1502.234	Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Longo	1 Cabo STD	---
			1 âncora flexível Ø1,5mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
	TI034.2102.100	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Mini	1 Cabo Longo	---
			1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2102.110	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Curto	1 Cabo Curto	---
			1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2102.120	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo STD	1 Cabo STD	---
			1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo STD	---
	TI034.2102.130	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Longo	1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco

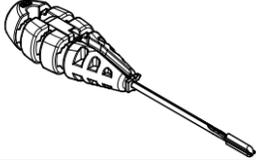
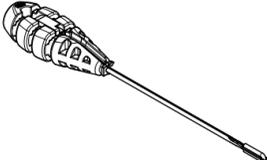
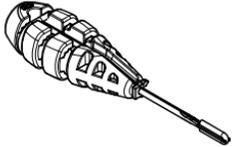
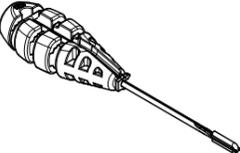
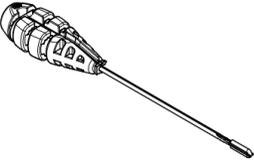
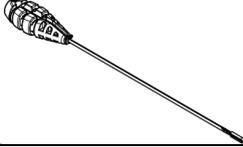
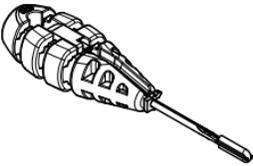
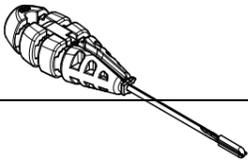
	TI034.2102.102	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 Cabo Longo	---
			1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
	TI034.2102.112	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2102.122	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.2102.132	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2102.200	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2102.210	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2102.220	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo STD	---
	TI034.2102.230	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2102.202	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---

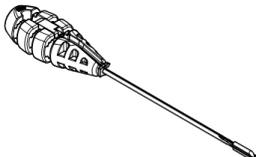
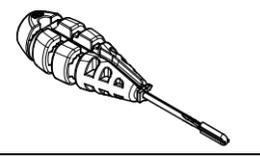
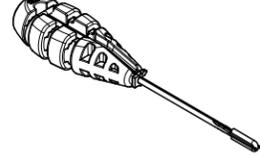
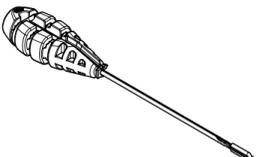
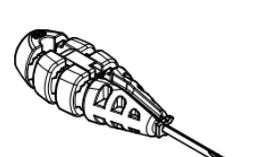
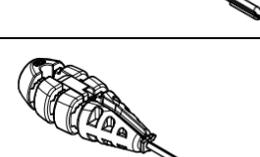
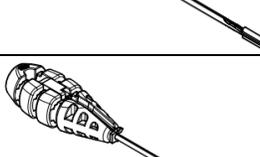
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2102.212	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2102.222	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.2102.232	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2102.204	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2102.214	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2102.224	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.2102.234	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,1mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2402.100	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2402.110	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco

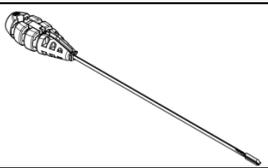
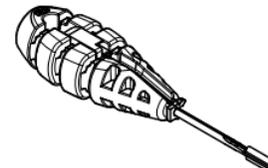
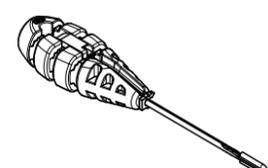
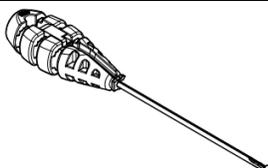
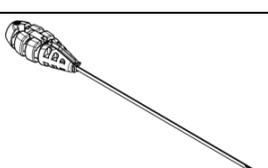
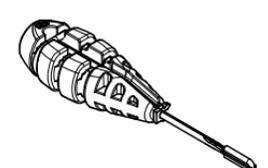
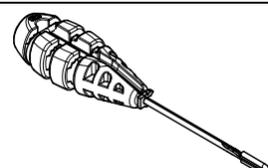
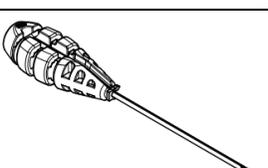
	TI034.2402.120	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo STD	1 Cabo Curto	---
			1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
	TI034.2402.130	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2402.102	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2402.112	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2402.122	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,4mm	---
			1 Fio USP 2	Branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	Azul e branco
			1 Cabo STD	---
	TI034.2402.132	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2402.200	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2402.210	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2402.220	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco

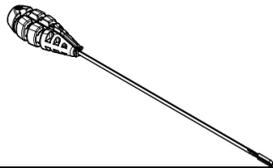
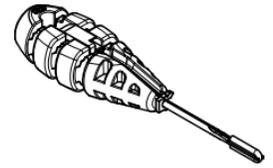
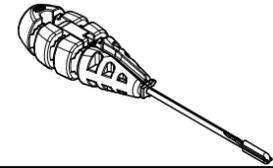
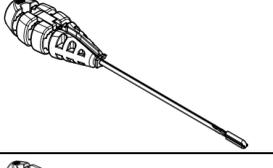
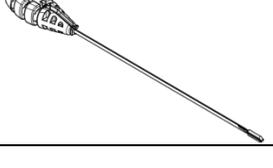
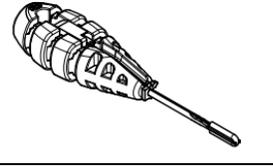
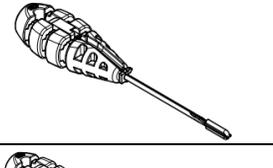
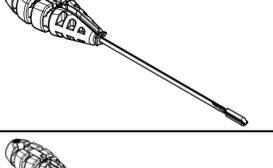
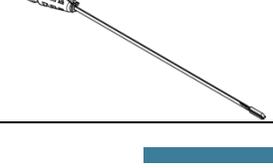
	TI034.2402.230	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Longo	1 Cabo STD	---
			1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2402.202	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2402.212	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2402.222	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.2402.232	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2402.204	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2402.214	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2402.224	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.2402.234	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---

	TI034.2402.300	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 3 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2402.310	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 3 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2402.320	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 3 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo STD	---
	TI034.2402.330	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 3 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2402.303	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 3 Fios / USP#2 com 3 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			3 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2402.313	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 3 Fios / USP#2 com 3 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			3 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2402.323	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 3 Fios / USP#2 com 3 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			3 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.2402.333	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 3 Fios / USP#2 com 3 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			3 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2402.306	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 3 Fios / USP#2 com 6 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			6 agulhas ½ círculo cilíndrica	---

			1 Cabo Mini	---
	TI034.2402.316	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 3 Fios / USP#2 com 6 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			6 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2402.326	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 3 Fios / USP#2 com 6 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			6 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.2402.336	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm - 3 Fios / USP#2 com 6 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,4mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			6 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2902.100	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2902.110	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2902.120	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo STD	---
	TI034.2902.130	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 1 Fio / USP#2 sem Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2902.102	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2902.112	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---

			1 Cabo Curto	---
	TI034.2902.122	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.2902.132	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 1 Fio / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			1 Fio USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2902.200	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2902.210	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2902.220	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo STD	---
	TI034.2902.230	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 2 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2902.202	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2902.212	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2902.222	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			2 agulhas ½ círculo cilíndrica	---

	TI034.2902.232	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 2 Fios / USP#2 com 2 Agulhas - Cabo Longo	1 Cabo STD	---
			1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2902.204	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2902.214	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2902.224	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.2902.234	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 2 Fios / USP#2 com 4 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			2 Fios USP 2	Azul e branco
			4 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2902.300	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 3 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2902.310	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 3 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2902.320	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 3 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo STD	---

	TI034.2902.330	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 3 Fios / USP#2 sem Agulha - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			1 Cabo Longo	---
	TI034.2902.303	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 3 Fios / USP#2 com 3 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			3 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2902.313	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 3 Fios / USP#2 com 3 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			3 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2902.323	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 3 Fios / USP#2 com 3 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			3 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
	TI034.2902.333	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 3 Fios / USP#2 com 3 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			3 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
	TI034.2902.306	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 3 Fios / USP#2 com 6 Agulhas - Cabo Mini	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			6 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Mini	---
	TI034.2902.316	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 3 Fios / USP#2 com 6 Agulhas - Cabo Curto	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			6 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Curto	---
	TI034.2902.326	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 3 Fios / USP#2 com 6 Agulhas - Cabo STD	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			6 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo STD	---
	TI034.2902.336	Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm - 3 Fios / USP#2 com 6 Agulhas - Cabo Longo	1 âncora flexível Ø2,9mm	Branco
			3 Fios USP 2	Azul e branco
			6 agulhas ½ círculo cilíndrica	---
			1 Cabo Longo	---

ACESSÓRIOS E COMPONENTES ANCILARES

As **Âncoras Flexíveis Knottech Techimport** não possui acessórios e componentes ancilares.

COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL

A família de **Âncoras Flexíveis Knottech Techimport** é fornecido pronto para uso, conforme mostra a tabela 1 e 2. Não requer montagem.

INDICAÇÕES DE USO

A Família de **Âncoras Flexíveis Knottech Techimport** são indicados para serem usadas nas indicações listadas na tabela 3.

Tabela 3 – Indicações de uso das Âncoras Flexíveis Knottech Techimport

Modelo	Indicação
Âncora Flexível KNOTTECH Ø0,9mm	Mãos e punho, nas seguintes situações: <ul style="list-style-type: none"> • Reconstrução de ligamento triangular; • Reparos tendinosos (dedo em martelo); • Instabilidade metacarpofalangiana; • Reparo da instabilidade interfalangeana; • Reconstrução capsular; • Transferências tendíneas
Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,3mm	
Âncora Flexível KNOTTECH Ø1,5mm	
Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm	Ombro, nas seguintes situações: <ul style="list-style-type: none"> • Reconstrução do ligamento acromioclavicular • Reinserção capsulolabral • Reparo de lesão de Bankart inferior, posterior e superior • Tratamento da instabilidade anterior, posterior e multidirecional • Reparação do lábio anterior, inferior, posterior e superior Cotovelo, nas seguintes situações: <ul style="list-style-type: none"> • Reinserção do tendão distal do bíceps/tríceps; Tornozelo e pé, nas seguintes situações: <ul style="list-style-type: none"> • Reconstrução do ligamento lateral • Reparos de tendão • Reconstrução capsular
Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,4mm	
Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,9mm	

FINALIDADE DO PRODUTO MÉDICO

As **Âncoras Flexíveis Knottech Techimport** tem como finalidade a reconexão de tecidos moles aos ossos nos membros superiores (Ombro, Cotovelo, Punho e Mãos) e inferiores (Tornozelo e Pé).

FUNDAMENTOS DE FUNCIONAMENTO DO PRODUTO MÉDICO

As **Âncoras Flexíveis Knottech Techimport** são elementos de fixação por suspensão, cuja a combinação entre a âncora de sutura flexível e as suturas permitem a estabilização, o reparo, e a reconstrução de tecidos moles, atuando como polo de fixação ou distribuição de cargas de tração. As âncoras de sutura flexível, devido a sua composição, são macias. Após serem completamente inseridas no pré-furo, o conjunto é tracionado

através das suturas, ocasionando uma expansão da âncora, e consequente aumento de seu diâmetro, dentro do pré-furo, resultando em ancoragem contra a cortical óssea.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS, ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO MÉDICO, ASSIM COM SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

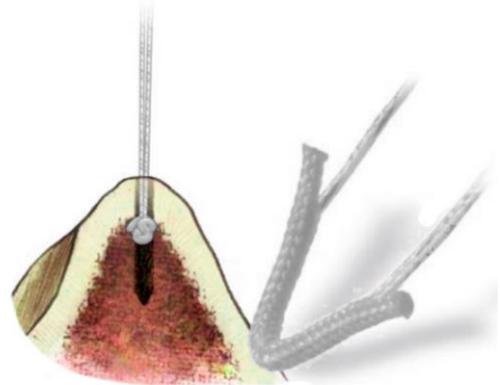
INSTRUÇÕES DE USO

As técnicas de cirurgia variam de acordo com a escolha do médico cirurgião, cabendo ao cirurgião a escolha final do método, tipo e dimensão dos produtos a serem empregados, bem como os critérios de avaliação dos resultados da cirurgia.

- Manipular as **Âncoras Flexíveis Knottech Techimport** exclusivamente em ambientes adequados (ambulatórios ou salas cirúrgicas) com os devidos cuidados (somente deverão ser manipuladas com luvas esterilizadas). Somente profissionais capacitados devem manipular e implantar a **Âncoras Flexíveis Knottech Techimport**.

- A **Âncoras Flexíveis Knottech Techimport** deverão ser aplicadas e adaptadas de acordo com as exigências e técnicas cirúrgicas adequadas. Abaixo é apresentada a sequência da técnica cirúrgica:

1. Selecionar o modelo da âncora.
2. Preparar a superfície óssea que irá receber a sutura.
3. Realizar o pré-furo utilizando broca adequada conforme dimensão da respectiva âncora.
4. Posicionar a âncora e impactar utilizando o cabo aplicador de maneira que toda âncora seja inserida no tecido ósseo esponjoso.
5. Realizar tração do conjunto de forma manual, objetivando a expansão inicial da âncora de sutura flexível no pré-furo.
6. Remover o cabo aplicador deixando as suturas tracionadas.
7. Realizar a tração de maneira a atingir a expansão total da âncora flexível até sua completa fixação.
8. Realizar o procedimento de sutura.
Obs: O corte dos fios deve ser realizado a uma distância mínima de segurança acima do nó.
9. Descartar o cabo.



• A Techimport disponibiliza as instruções de uso em seu sítio eletrônico. A versão atualizada da instrução de uso disponíveis no sítio eletrônico da Techimport está identificada no rótulo e nas etiquetas de rastreabilidade do produto. A versão da instrução de uso, deve ser a mesma indicada no rótulo e etiquetas de rastreabilidade. Caso seja necessário obter a instrução de uso em formato impresso, favor entrar em contato com a Techimport que será enviado sem custo adicional (inclusive de envio), essa instrução de uso. Solicitar para: qualidade@techimportimplantes.com.br ou pelo telefone (19) 3522-9500.

CONTRA INDICAÇÕES

Os pacientes que apresentarem algum dos quadros clínicos descritos abaixo, não devem ser submetidos ao procedimento com o uso do produto:

- ✓ Procedimentos cirúrgicos diferentes dos indicados na lista apresentada na seção INDICAÇÕES.
- ✓ Uso da ancora na tuberosidade maior do úmero.
- ✓ Qualidade ou quantidade Óssea insuficiente que possa comprometer uma fixação segura da âncora.
- ✓ Patologias do osso que possam comprometer uma fixação segura da âncora.
- ✓ Patologias do tecido mole a ser fixado que possam prejudicar a fixação segura pela sutura.
- ✓ Limitações do aporte sanguíneo e infecções anteriores que possam retardar o processo de cicatrização.
- ✓ Sensibilidade a corpos estranhos. Se se suspeitar de sensibilidade ao material, deverão ser realizados testes apropriados e excluída a sensibilidade antes da implantação.
- ✓ Qualquer infecção ativa.
- ✓ Condições que limitem a capacidade ou vontade do paciente para restringir atividades ou cumprir instruções durante o período de cicatrização.
- ✓ Fixação de ligamentos artificiais ou outros implante.
- ✓ A utilização deste dispositivo pode não ser adequada em pacientes com insuficiência óssea ou estrutura óssea imatura. O médico deve avaliar cuidadosamente a qualidade óssea antes de efetuar cirurgia ortopédica em pacientes que sejam esqueleticamente imaturos. A utilização deste dispositivo e a colocação de equipamento ou implantes não devem unir, perturbar ou afetar a placa de crescimento.
- ✓ Hipersensibilidade conhecida ao material do implante. Quando se suspeitar de sensibilidade ao material, é necessário efetuar os testes adequados antes do implante, a fim de se eliminar a possibilidade de sensibilidade.
- ✓ Problemas físicos que eliminem ou tendam a eliminar o suporte adequado pelo dispositivo ou que comprometem a cicatrização.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Este produto é de uso único.

Não reutilizar o produto.

Esse produto não pode ser reprocessado. Proibido reprocessar.

O respeito aos procedimentos pré-operatórios e pós-operatórios, o entendimento adequado da técnica cirúrgica, a seleção correta e posicionamento do implante são críticos para o sucesso da cirurgia.

A correta seleção do implante é extremamente importante. O tipo apropriado, forma e tamanho devem ser de acordo com o paciente. Estes dados são obtidos a partir do planejamento pré-operatório.

Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada

Observação: Não devem ser utilizados componentes de implantes de fabricantes diferentes, **portanto recomendamos que os produtos tenham a mesma procedência.**

Data de fabricação, prazo de validade e lote do produto: VIDE ROTULO.

VALIDADE

Este produto tem validade de 3 anos, contados à partir da data de esterilização.

PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO GERAIS

- Todos os implantes devem ser utilizados com o formato original.
- O planejamento pré-operatório permitem determinar a dimensão correta dos implantes.
- Apenas a utilização de material de instrumentação específico para este implante garante a sua colocação de forma satisfatória.
- Os detritos resultantes da intervenção (embalagens, explantes, cabo descartável...) deverão ser tratados como quaisquer outros detritos de origem médica pelo estabelecimento de cuidados da saúde.

PRECAUÇÕES PRÉ OPERATÓRIAS E OPERATÓRIAS

- A correta seleção dos instrumentais é crítica para o sucesso da operação.
- Siga estritamente os protocolos cirúrgicos. Cuidados devem ser tomados no manuseio dos implantes e / ou instrumentos para evitar ferimentos no paciente e ou no pessoal do centro cirúrgico.
- O critério usado para a seleção de paciente deve ser aquele descrito na seção “**INDICAÇÕES**”.
- Pacientes em condições e/ ou predisposições, tais como os listados na seção “**CONTRA INDICAÇÕES**”, devem ser evitados;
- O cirurgião deve estar perfeitamente familiarizado com os implantes e técnicas cirúrgicas e com a montagem dos componentes.

TRATAMENTO PÓS OPERATÓRIO E INFORMAÇÕES QUE DEVEM SER DADAS AOS PACIENTES

A mobilização física deve ser iniciada imediatamente no pós-operatório, incluindo exercícios de movimentação. Restrições podem ser apropriadas em casos especiais, a critério do cirurgião.

O nível de atividade de um paciente e a observação das restrições pós-operatórias são fatores importantes na vida funcional de qualquer dispositivo de fixação interna. Os pacientes devem ser avisados das consequências da não observação das instruções pós-operatórias. O cirurgião deve enfatizar que a não colaboração do paciente pode resultar na falha do implante, com a possibilidade de ser necessária uma cirurgia corretiva.

Os cuidados pós-operatórios incluem, mas não se limitam aos seguintes aspectos:

- Restrição do nível de atividade até se atingir a cura total do osso;
- Evitar atividades que possam ocasionar torções, quedas, choques, que poderiam ocasionar falhas no dispositivo;
- Cuidados com a cicatrização.

CIRURGIAS DE REVISÃO E REMOÇÃO

O paciente deve ser informado sobre a necessidade de uma cirurgia de revisão, em casos de soltura dos componentes.

Os instrumentais cirúrgicos necessários para a implantação ou remoção dos modelos deste produto estão identificados por nome e código. E devem ser, necessariamente, da marca TECHIMPORT, de modo a evitar possíveis incompatibilidades dimensionais de projeto.

LIMITES DE MOLDAGEM DO IMPLANTE.

O produto não pode ser moldado.

LIMITES DE CARGA DO IMPLANTE

Embora os ensaios comprovem que a resistência mecânica dos produtos testados seja superior às cargas resultantes de atividades normais diárias, os implantes utilizados em cirurgia servem apenas para auxiliar e promover um processo normal de consolidação ligamentar. Esses não têm a função de substituir estruturas ligamentares ou tendinosas ou de sustentar indefinidamente as tensões provocadas nas regiões com lesões não consolidadas ou fixadas. Dessa forma, o cirurgião deve orientar o paciente sobre os cuidados a serem tomados e o tipo de suporte físico, adequado a ser utilizado durante o tempo de uso do implante.

As Âncoras Flexíveis KNOTTECH Ø0,9mm, Ø1,3mm Ø1,5mm indicadas para serem usadas nas Mãos e punhos, precisam suportar forças fisiológicas de tração de >52,4N. Conforme ensaios realizados, essas âncoras suportaram cargas de tração superiores a 60N.

As Âncora Flexível KNOTTECH Ø2,1mm, Ø2,4mm e Ø2,9mm indicadas para serem usadas no ombro, Cotovelo, Tornozelo e pé, precisam suportar forças fisiológicas de tração de >52N. Conforme ensaios realizados, essas âncoras suportaram cargas de tração superiores a 120N.

EFEITOS ADVERSOS

- ✓ Infecção, tanto profunda como superficial.
- ✓ Alergias e outras reações aos materiais do dispositivo.
- ✓ Pode ocorrer quebra da sutura ou da Âncora.
- ✓ Não consolidação ou consolidação tardia, o que pode levar à quebra do implante.
- ✓ Afrouxamento ou migração do implante.
- ✓ Dor, desconforto ou sensação anormal em decorrência da presença do dispositivo.
- ✓ Lesões nervosas decorrentes de trauma cirúrgico.
- ✓ Necrose óssea ou tecidual.
- ✓ Cicatrização inadequada.
- ✓ Fratura óssea intraoperatória, pós-operatória e/ou dor pós-operatória.
- ✓ complicações com anestesia.
- ✓ problemas de embolia ou coágulo sanguíneo (p. ex., embolia pulmonar, trombose de veia profunda, etc.).
- ✓ falha do tratamento ou do implante.
- ✓ Intervenção cirúrgica secundária para tratar complicações associadas à cirurgia ou ao tratamento[37].
- ✓ Ligeira reação inflamatória.

CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO

Durante o manuseio do dispositivo, sempre existe o risco de que materiais estranhos e particulados, incluindo talco de luvas, fiapos de materiais e outros contaminantes da superfície, possam entrar em contato com o dispositivo. Todos os esforços devem ser feitos para limitar o manuseio dos implantes. Um implante nunca deverá ser reutilizado, e os dispositivos explantados não devem ser implantados novamente. O estresse pode levar ao desenvolvimento de imperfeições microscópicas, e, mesmo que o implante pareça intacto, pode ocasionar a falência do mesmo. Se o paciente estiver envolvido em alguma atividade ou ocupação que possa causar estresse no implante (caminhadas substanciais, corrida, levantamento de peso ou tensão muscular), estas forças podem causar falhas no dispositivo. A durabilidade desses dispositivos é afetada por numerosos fatores biológicos, biomecânicos e extrínsecos, que limitam a sua vida útil. Isto posto, a obediência estrita às indicações, contra-indicações e precauções para este produto são essenciais para maximizar a sua vida útil.

ESTERILIZAÇÃO

Todos os modelos de **Âncoras Flexíveis Knottech Techimport** são comercializadas esterilizados por gás óxido de etileno de acordo com as normas ABNT NBR ISO 11135:2018 - Esterilização de produtos de atenção à saúde - Óxido de etileno - Requisitos para desenvolvimento, validação e controle de rotina de um processo de esterilização de produtos para saúde e Portaria Interministerial Nº 482, de 16 de abril de 1999. Antes do uso, a embalagem deve ser inspecionada a fim de verificar se não há rupturas ou danos.

CUIDADOS COM O MANUSEIO E TRANSPORTE DO PRODUTO MÉDICO

Armazenagem e transporte:

- Armazenar e transportar em local seco e fresco, com temperatura máxima de 25°C e umidade relativa de 30–75% e ao abrigo da luz solar direta.
- Proteger os implantes de quedas e amassamentos
- Tenha extremo cuidado no manuseio e armazenagem dos implantes.
- Implantes e instrumentos devem ser protegidos durante a armazenagem de ambientes corrosivos tais como: ar salgado, umidade etc.

Precauções quanto ao manuseio:

- O implante deve ser usado somente em suas condições originais. Qualquer mudança feita pelo usuário pode levar à falha do implante.
- No caso de ocorrer algum dano no implante antes de ser utilizado (seja por quedas ou riscos), este deve ser devolvido a TECHIMPORT, que estabeleceu um procedimento específico para o recebimento de devolução deste material.
- É essencial para a durabilidade do implante que as superfícies dos ossos estejam perfeitamente limpas e não estejam danificadas.
- Advertimos para que não sejam utilizados implantes de outras marcas com os implantes TECHIMPORT.
- Siga as regras específicas de compatibilidade dos componentes definidas na literatura e técnicas cirúrgicas.
- O planejamento pré-operatório usando radiografias permite a determinação dos tamanhos dos componentes.

Formas de apresentação do produto médico

As **Âncoras Flexíveis Knottech Techimport** são embalados individualmente em blister primário e secundário, ambos fabricados em pet (Polietileno tereftalato) virgem conformado por termoformagem e selados por

barreiras de papel Tyvek (**ver figuras 4, 5, 6 e 7**). Os blisters são colocados em caixa de papel kraft junto com os rótulos de rastreabilidade. Junto com cada implante são fornecidas 6 etiquetas de rastreabilidade conforme **figura 03**. O modelo do rótulo bem como as informações contidas nelas estão definidas na **figura 02**.

O sistema de embalagem é compatível com os requerimentos dos padrões **ISO 11607-1:2019- Packaging for terminally sterilized medical devices — Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems** e **ISO 11607-2:2019-Packaging for terminally sterilized medical devices — Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes**.

Este produto tem validade de 3 anos, contados à partir da data de fabricação.

		<p>TECHIMPORT Tecnologia em Implantes Ortopédicos Ltda. Rod. Washington Luiz, km 172 – Rua 6 Lote B8 Jardim Anhanguera – Rio Claro – SP CNPJ: 15.524.734/0001-47 – IE: 587.162.261.113 Fone: (19) 3522-9500 Site: www.techimportimplantes.com.br SAC: (19) 3522-9500 Resp. Técnico: Eduardo Henrique Silva Wolf CREA-SP: 5070056408</p>	
<p>Nome Técnico: Âncora Nome Comercial: Âncoras Flexíveis Knottech Techimport Modelo comercial: XXXXXXXXXX Registro ANVISA n.º XXXXXXXXXX Qtde.: 01 un. Proibido Reprocessar</p>			
<p>Matéria-prima: Âncora flexível e fio de sutura: Polietileno entrançado de elevado peso molecular - UHMWPE - NBR 13904 + agulha de Aço inox martensítico (ASTM F899) Cabo aplicador: Polipropileno (ASTM D4101) + Aço inox Austenítico (ASTM F899) + Resina fotopolimerizável + PL400 Transparente + Borracha nitrílica 70 Shore</p>			
<p>Ref: T1032.0001.00X</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Espaço para código de barras (código do produto)</p> </div>	
<p>Lote: AAXXX</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Espaço para código de barras (Lote)</p> </div>	
		<p>Data de fabricação: XX/XXXX Validade: XX/XXXX</p>	
<p>Armazenar e transportar em local seco e fresco, com temperatura máxima de 25°C e umidade relativa de 30–75% e ao abrigo da luz solar direta.</p>			
<p>ESTERILIZADO POR GÁS ÓXIDO DE ETILENO Validade 3 anos</p>			
      <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">STERILE EO</div>			
<p>Instruções de uso disponível em http://www.techimportimplantes.com.br/instrucoes/ Âncoras Flexíveis Knottech Techimport /versão0.php</p>			
<p>Caso seja necessário obter a instrução de uso em formato impresso, favor entrar em contato com a Techimport que será enviado sem custo adicional (inclusive de envio), essa instrução de uso. Solicitar para: qualidade@techimportimplantes.com.br ou pelo telefone (19) 3522-9500</p>			

Figura 02 – Modelo de rótulo

ETIQUETA DE RASTREABILIDADE	
MODELO COMERCIAL: <i>modelo comercial</i>	
CÓDIGO: TIXXX.XXXX.XXX	
Nº LOTE: XXXXX	VALIDADE: INDETERMINADO
NOME FABRICANTE: TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS	
REGISTRO ANVISA Nº: XXXXXXXXXXXX	
INSTRUÇÃO DE USO:	
http://www.techimportimplantes.com.br/instrucoes/Âncoras Flexíveis Knottech Techimport /versão0.php	
	

Figura 03 – Etiqueta de rastreabilidade”.

As figuras 4, 5, 6 e 7 mostram o detalhamento da forma de apresentação do produto.

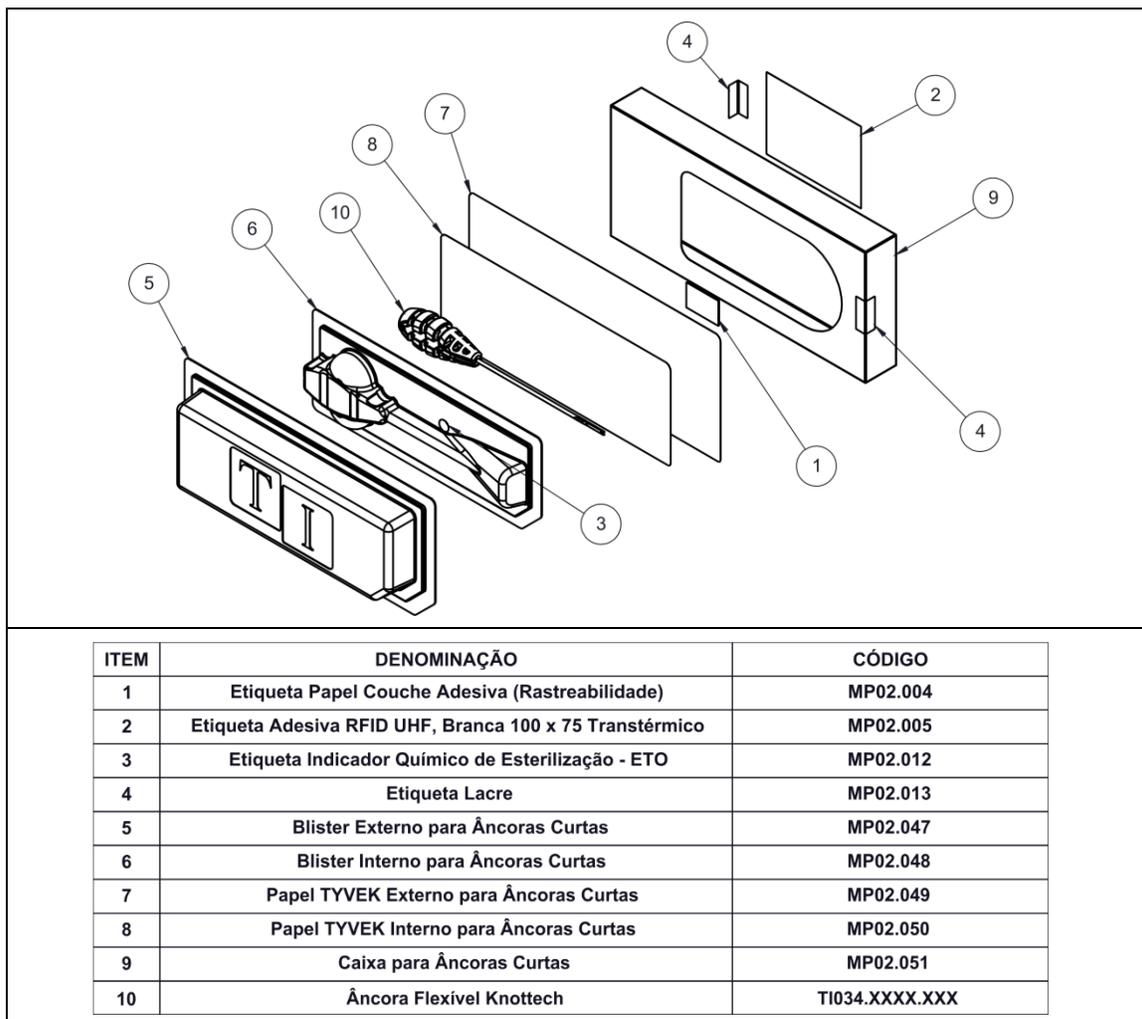


Figura 4– Montagem da embalagem das Âncoras Flexíveis Knottech Techimport

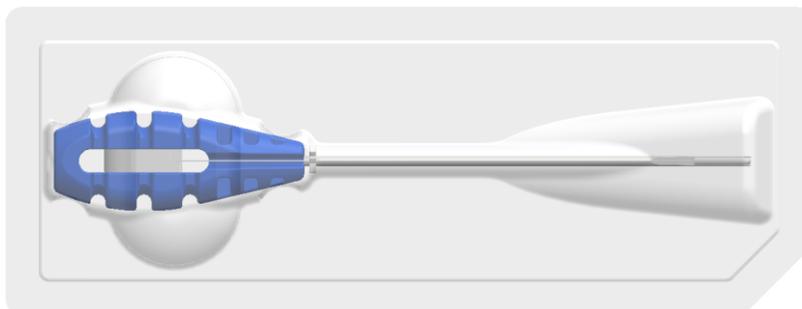


Figura 5 - Embalagem primária

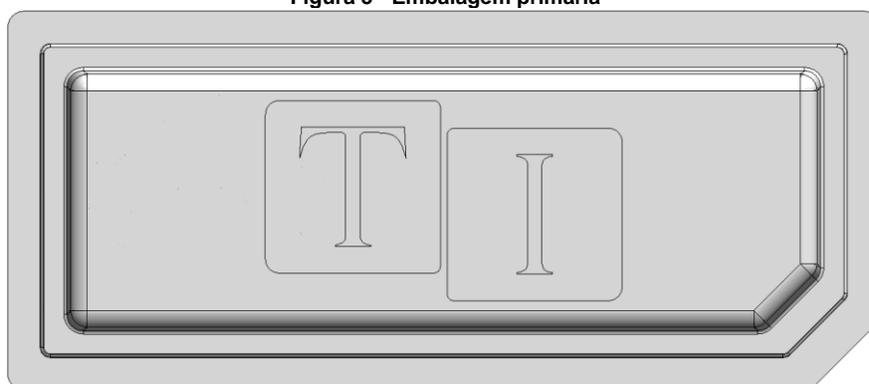
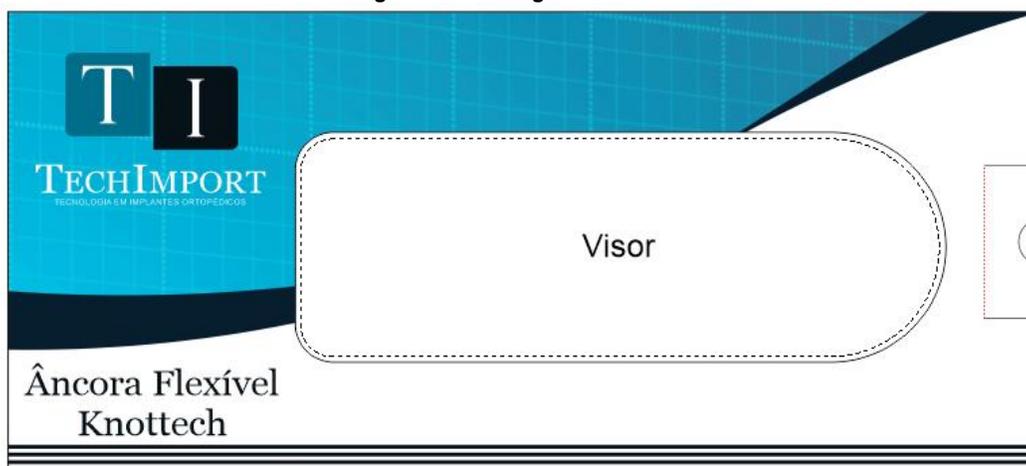


Figura 6 - Embalagem secundária



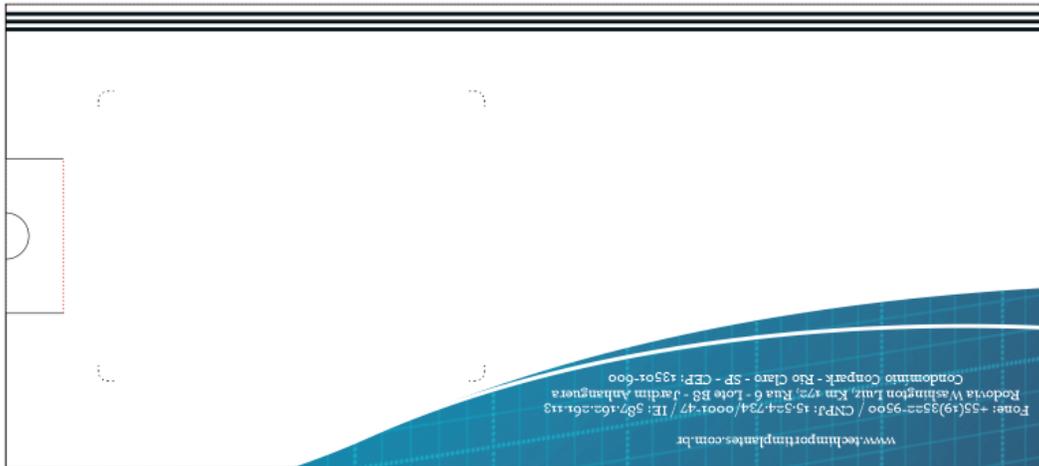


Figura 7- Embalagem terciária

Tabela 4 - Simbologia do modelo de rotulagem

						
Produto estéril por Óxido de Etileno	Atenção - consultar instrução de uso para informações adicionais	Não use se a embalagem estiver danificada	Não reesterilizar	Não reutilizar produto único	Manter seco	Manter ao abrigo do sol

RASTREABILIDADE

Junto da embalagem do componente implantável seguem 6 (seis) etiquetas de rastreabilidade. (As informações que constam nessa etiqueta de rastreabilidade estão relacionadas na “**Figura 03 – Etiqueta de rastreabilidade**”). Uma etiqueta deve ser obrigatoriamente colada no prontuário clínico do paciente, outra no laudo entregue para o paciente, outra na documentação fiscal que gera a cobrança, na AIH, no caso de paciente atendido pelo SUS, ou na nota fiscal de venda, no caso de paciente atendido pelo sistema de saúde complementar, outra disponibilizada para o controle do fornecedor (registro histórico de distribuição – RHD, outra disponibilizada para o controle do cirurgião responsável (principal) e a última para convênio médico caso exista. Informamos que obrigatoriamente o prontuário do paciente deve ter registrado informações que permitam rastrear o produto implantado. A colagem dessa etiqueta no prontuário permite a rastreabilidade do produto utilizado.

MARCAÇÃO

Por se tratar de material de sutura (Polietileno entrançado de elevado peso molecular -UHMWPE - NBR 13904) não é realizada nenhuma marcação no produto.

DESCARTE DO DISPOSITIVO

Conforme a RDC 222 de 2018, dispositivos implantáveis de qualquer natureza enquadrados como de uso único são proibidos de serem reprocessados. Implantes que forem removidos da embalagem interna e inseridos dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenham sido implantados ou contaminados por outras fontes, devem ser tratados como material contaminado, o mesmo ocorrendo com dispositivos explantados. Estes dispositivos devem ser inutilizados para uso antes do descarte. Recomendamos que as peças sejam limadas, entortadas ou cortadas para sua inutilização. **DISPOSITIVOS EXPLANTADOS SÃO CONSIDERADOS LIXO HOSPITALAR**

RECLAMAÇÃO/ATENDIMENTO AO CLIENTE

*Reclamações relacionadas a algum efeito adverso e/ou queixa técnica que afete a segurança do usuário, como produto não funcionando, problemas graves ou mortes relacionadas a esses componentes o cirurgião responsável deverá comunicar este evento adverso ao órgão sanitário competente através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://portal.anvisa.gov.br/notificacoes/produtos> e a **TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP** através do e-mail qualidade@techimportimplantes.com.br ou pelo telefone (19) 3522-9500.*

FABRICADO POR:

TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP

RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 172, RUA 06, CONDOMINIO CONPARK, CAIXA POSTAL 223 - RIO CLARO-SP-BRASIL CEP: 13.501-600

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EDUARDO HENRIQUE SILVA WOLF CREA-SP: 5070056408