

Instrução de Uso
Fresas para Debridamento Ósseo em Zirconia



Nome Técnico: Brocas Cirúrgicas

Nome Comercial: Fresas para Debridamento ósseo Zirconia

Registro Anvisa: 81118469019

Fabricante:

TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP

Rodovia Washington Luiz, Km 172, Rua 06 - Jardim Anhanguera

Condomínio Conpark - Caixa Postal 223 - Rio Claro/SP - CEP 13501-600

CNPJ: 15.524.734/0001-47

comercial@techimportimplantes.com.br

www.techimportimplantes.com.br

Telefone: +55 19 3522 - 9500

**PRODUTO ESTÉRIL
A EMPRESA RECOMENDA USO ÚNICO**

Instrução de Uso
Fresas para Debridamento Ósseo em Zircônia

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Nome Técnico: Brocas Cirurgicas

Nome Comercial: Fresas para Debridamento Ósseo Zircônia

Componentes: Ver Tabela 1

Matéria-prima: Aço Inoxidável ASTM F899 com Revestimento em DLC

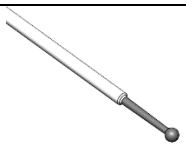
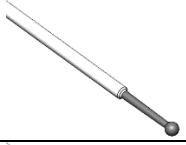
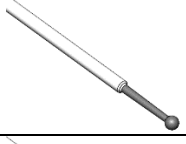
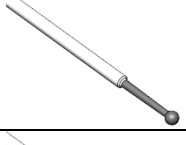
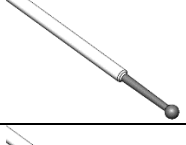

Esterilização: Óxido de Etileno (ETO)

Validade: 3 anos a partir da data de esterilização



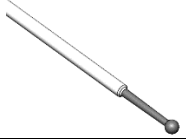
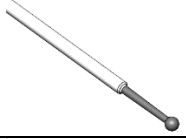
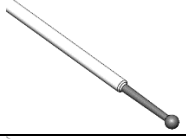
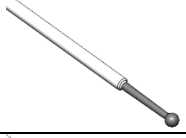
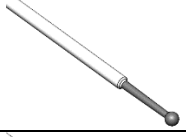
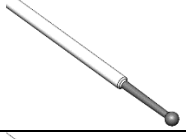
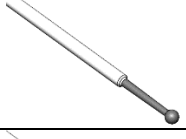
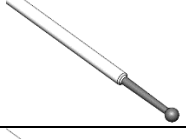
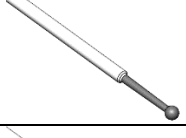

Quantidade: 01 unidade

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO MÉDICO



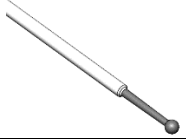
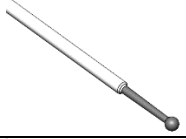
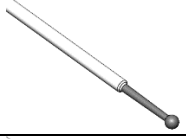
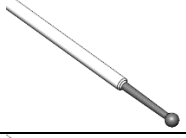
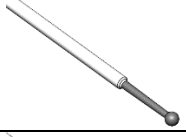
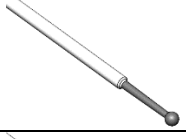
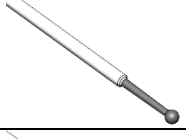
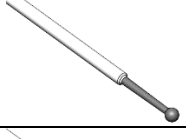
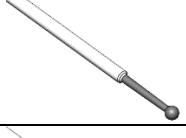

As Fresas para Debridamento ósseo, são comercializadas individualmente na condição estéril em Óxido de Etileno (ETO), em embalagem primaria e secundaria (blister fabricado em PET) e seladas com papel Tyvek e devidamente rotulados.

Tabela 1 – Modelos Comerciais		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IMAGEM ILUSTRATIVA
TI134.8635.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 250MM ZIRCÔNIA	
TI134.8635.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 255MM ZIRCÔNIA	
TI134.8635.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 260MM ZIRCÔNIA	
TI134.8635.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 265MM ZIRCÔNIA	
TI134.8635.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 270MM ZIRCÔNIA	
TI134.8635.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 275MM ZIRCÔNIA	




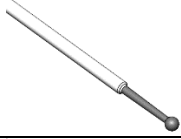
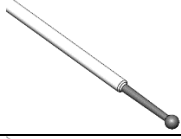
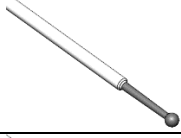
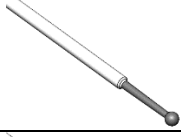
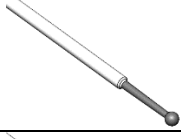
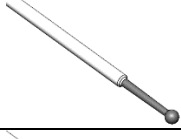
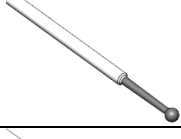


Instrução de Uso
Fresas para Debridamento Ósseo em Zircônia

TI134.8635.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 280MM ZIRCÔNIA	
TI134.8635.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 285MM ZIRCÔNIA	
TI134.8635.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 290MM ZIRCÔNIA	
TI134.8635.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 295MM ZIRCÔNIA	
TI134.8635.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 300MM ZIRCÔNIA	
TI134.8635.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 305MM ZIRCÔNIA	
TI134.8635.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 310MM ZIRCÔNIA	
TI134.8635.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 315MM ZIRCÔNIA	
TI134.8635.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 320MM ZIRCÔNIA	
TI134.8635.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 325MM ZIRCÔNIA	
TI134.8635.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 330MM ZIRCÔNIA	
TI134.8635.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 335MM ZIRCÔNIA	



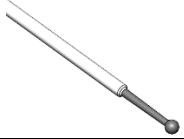
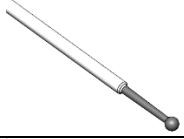
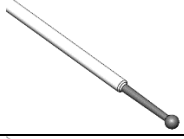
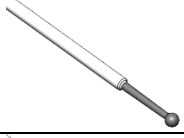
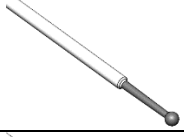
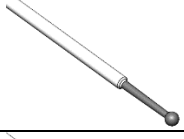
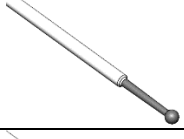
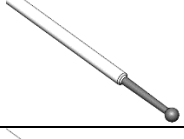
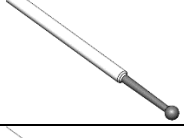

Instrução de Uso
Fresas para Debridamento Ósseo em Zircônia

TI134.8635.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 340MM ZIRCÔNIA	
TI134.8635.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 345MM ZIRCÔNIA	
TI134.8635.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 350MM ZIRCÔNIA	
TI134.8635.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 355MM ZIRCÔNIA	
TI134.8635.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 360MM ZIRCÔNIA	
TI134.8640.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 250MM ZIRCÔNIA	
TI134.8640.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 255MM ZIRCÔNIA	
TI134.8640.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 260MM ZIRCÔNIA	
TI134.8640.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 265MM ZIRCÔNIA	
TI134.8640.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 270MM ZIRCÔNIA	
TI134.8640.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 275MM ZIRCÔNIA	
TI134.8640.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 280MM ZIRCÔNIA	



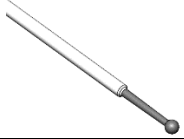
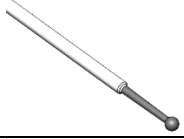
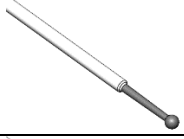
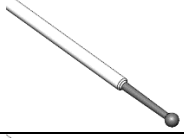
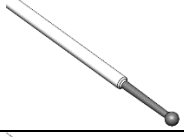
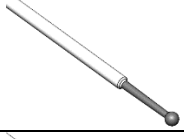
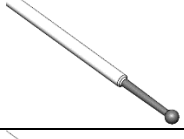
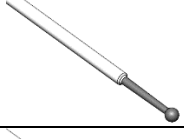
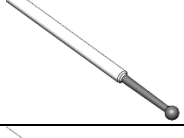

Instrução de Uso
Fresas para Debridamento Ósseo em Zircônia

TI134.8640.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 285MM ZIRCÔNIA	
TI134.8640.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 290MM ZIRCÔNIA	
TI134.8640.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 295MM ZIRCÔNIA	
TI134.8640.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 300MM ZIRCÔNIA	
TI134.8640.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 305MM ZIRCÔNIA	
TI134.8640.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 310MM ZIRCÔNIA	
TI134.8640.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 315MM ZIRCÔNIA	
TI134.8640.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 320MM ZIRCÔNIA	
TI134.8640.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 325MM ZIRCÔNIA	
TI134.8640.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 330MM ZIRCÔNIA	
TI134.8640.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 335MM ZIRCÔNIA	
TI134.8640.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 340MM ZIRCÔNIA	




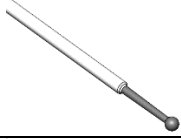
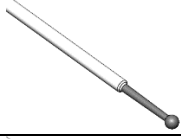
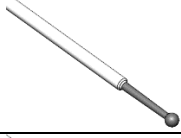
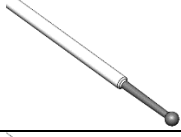
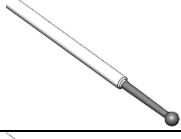
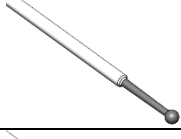
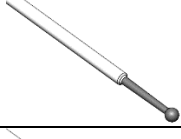


Instrução de Uso
Fresas para Debridamento Ósseo em Zircônia

TI134.8640.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 345MM ZIRCÔNIA	
TI134.8640.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 350MM ZIRCÔNIA	
TI134.8640.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 355MM ZIRCÔNIA	
TI134.8640.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 360MM ZIRCÔNIA	
TI134.8650.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 250MM ZIRCÔNIA	
TI134.8650.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 255MM ZIRCÔNIA	
TI134.8650.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 260MM ZIRCÔNIA	
TI134.8650.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 265MM ZIRCÔNIA	
TI134.8650.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 270MM ZIRCÔNIA	
TI134.8650.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 275MM ZIRCÔNIA	
TI134.8650.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 280MM ZIRCÔNIA	
TI134.8650.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 285MM ZIRCÔNIA	



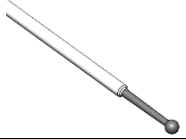
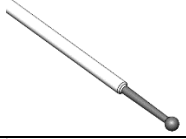
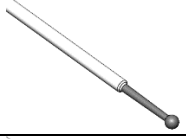
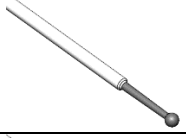
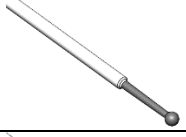
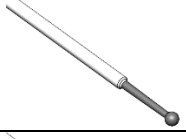
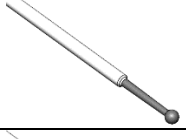
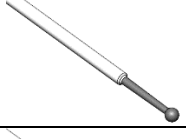
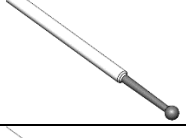

Instrução de Uso
Fresas para Debridamento Ósseo em Zircônia

TI134.8650.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 290MM ZIRCÔNIA	
TI134.8650.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 295MM ZIRCÔNIA	
TI134.8650.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 300MM ZIRCÔNIA	
TI134.8650.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 305MM ZIRCÔNIA	
TI134.8650.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 310MM ZIRCÔNIA	
TI134.8650.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 315MM ZIRCÔNIA	
TI134.8650.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 320MM ZIRCÔNIA	
TI134.8650.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 325MM ZIRCÔNIA	
TI134.8650.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 330MM ZIRCÔNIA	
TI134.8650.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 335MM ZIRCÔNIA	
TI134.8650.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 340MM ZIRCÔNIA	
TI134.8650.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 345MM ZIRCÔNIA	

Instrução de Uso
Fresas para Debridamento Ósseo em Zircônia


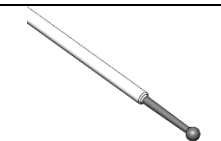
TI134.8650.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 350MM ZIRCÔNIA	
TI134.8650.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 355MM ZIRCÔNIA	
TI134.8650.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 360MM ZIRCÔNIA	
TI134.8660.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 250MM ZIRCÔNIA	
TI134.8660.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 255MM ZIRCÔNIA	
TI134.8660.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 260MM ZIRCÔNIA	
TI134.8660.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 265MM ZIRCÔNIA	
TI134.8660.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 270MM ZIRCÔNIA	
TI134.8660.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 275MM ZIRCÔNIA	
TI134.8660.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 280MM ZIRCÔNIA	
TI134.8660.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 285MM ZIRCÔNIA	
TI134.8660.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 290MM ZIRCÔNIA	

Instrução de Uso
Fresas para Debridamento Ósseo em Zircônia

TI134.8660.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 295MM ZIRCÔNIA	
TI134.8660.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 300MM ZIRCÔNIA	
TI134.8660.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 305MM ZIRCÔNIA	
TI134.8660.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 310MM ZIRCÔNIA	
TI134.8660.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 315MM ZIRCÔNIA	
TI134.8660.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 320MM ZIRCÔNIA	
TI134.8660.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 325MM ZIRCÔNIA	
TI134.8660.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 330MM ZIRCÔNIA	
TI134.8660.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 335MM ZIRCÔNIA	
TI134.8660.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 340MM ZIRCÔNIA	
TI134.8660.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 345MM ZIRCÔNIA	
TI134.8660.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 350MM ZIRCÔNIA	

Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Ósseo em Zircônia

TI134.8660.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 355MM ZIRCÔNIA	
TI134.8660.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 360MM ZIRCÔNIA	

COMPOSIÇÃO

Os materiais selecionados para a composição do produto apresentam as propriedades requeridas para atingir desempenho pretendido.

As Fresas para Debridamento Ósseo são fabricadas em aço inoxidável ASTM F899 com Revestimento em Zircônia.

INDICAÇÃO E FINALIDADE

As Fresas são indicadas para procedimentos que necessitem de debridamento ósseo e ressecção óssea.

CONTRAINDICAÇÃO

As Fresas não são indicadas para serem utilizadas em conjunto com produtos de outros fabricantes.

ADVERTENCIAS E PRECAUÇÕES

- A Techimport recomenda o uso único desse produto;
- A reutilização pode causar danos aos pacientes;
- A utilização das Fresas deve ser feita apenas por médicos cirurgiões aptos;
- Nunca misturar produtos diferentes ou de outro fabricante, pois pode se ocasionar incompatibilidade entre os materiais;
- Toda manipulação deve estar acompanhada de cuidados: na manipulação durante armazenamento, bem como seu transporte;
- As Fresas devem ser utilizadas somente para a finalidade específica que foi projetada;
- As Fresas foram projetadas e desenvolvidas para uso único;
- Antes de iniciar o procedimento cirúrgico, deve se verificar a integridade da embalagem, produtos com embalagem danificada devem ser descartados.

ESTERILIZAÇÃO

O produto é fornecido na condição Estéril, com método de esterilização em óxido de etileno (ETO).

Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Ósseo em Zirconia

MARCAÇÃO

A identificação do produto é feita através de gravação a laser que deve ser gravado conforme orientação de gravação contida no desenho técnico do produto.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar e transportar em local seco e fresco com temperatura máxima 25°C e umidade relativa de 75% e ao abrigo da luz solar direta.

O produtos deve ser armazenado na embalagem original, em local fresco e seco e protegido da poeira e da luz solar direta.

Proteger de arranhões e amassamentos.

Tenha extremo cuidado ao manusear.

Não permita o contato com metal e outros objetos que possam comprometer o uso apropriado final.

Devem ser protegidos durante a armazenagem de ambientes corrosivos tais como: ar salgado, umidade, etc.

As Fresas devem ser usadas somente em suas condições originais. Qualquer mudança feita pelo usuário pode levar a falha.

Tenha extremo cuidado ao manusear.

No caso de ocorrer algum dano no implante antes de ser utilizado (seja por quedas ou riscos), este deve ser devolvido a Techimport, que estabeleceu um procedimento específico para o recebimento de devolução deste material.

As Fresas são fornecidas em sua embalagem original e estéril.

As etiquetas de rastreabilidade devem seguir o produto em todas as fases cirúrgicas. Caso o produto não tenha sido utilizado durante a cirurgia e estando fora de sua embalagem o mesmo deverá ser descartado e de forma alguma ser utilizado.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

Quando necessário o descarte do produto, deverão ser seguidos procedimentos definidos no Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde estabelecido pelo hospital dando o melhor destino ao material

extraído, que se caracteriza como lixo hospitalar potencialmente contaminante.

Esses produtos devem ser inutilizados/descaracterizados para uso antes do descarte. A descaracterização do produto médico é de inteira responsabilidade da instituição hospitalar, assim como os métodos e procedimentos de descarte utilizados. Entretanto, a Techimport recomenda que tais produtos médicos sem deformados

mecanicamente. Em seguida os produtos médicos devem ser identificados de forma clara e visível, indicando

Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Ósseo em Zirconia

sua situação, ou seja, impróprio ao uso.

Para o envio desses produtos médicos utilizados em cirurgia ao fabricante, devem ser utilizadas embalagem mantenham a integridade dos mesmos. Na embalagem devem constar informações sobre as condições desses produtos, tais como: método de limpeza e desinfecção utilizada, assim como, a identificação dos mesmos.

PRAZO DE VALIDADE E REPROCESSAMENTO

O Produto possui 3 anos de validade a partir da data de esterilização.

A empresa recomenda o uso único do Produto.

DESCARTE DO DISPOSITIVO

Os dispositivos devem ser inutilizados para uso antes do descarte. Recomendamos que as peças sejam limadas, entortadas ou cortadas para sua inutilização. O descarte deverá obedecer às normas relativas a eliminação de lixo hospitalar contaminante, descartando-se em recipientes apropriados e com identificação clara de que se trata de lixo contaminante.

RECLAMAÇÃO/ATENDIMENTO AO CLIENTE: Reclamações relacionadas a algum efeito adverso que afete a segurança do usuário, como produto não funcionando, dano no componente metálico implantável, problemas graves ou mortes relacionadas a esses componentes o cirurgião responsável deverá comunicar imediatamente este evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm> e a **TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES**

ORTOPÉDICOS LTDA – EPP através do e-mail qualidade@techimportimplantes.com.br ou pelo telefone (19) 3522-9500. Caso ocorra algum evento adverso ou queixa técnica, o cirurgião responsável ou o profissional da saúde poderá fazer a comunicação do evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm>

FORMA DE APRESENTAÇÃO

As Fresas são fornecidas na condição estéril, comercializado individualmente em duplo blister, selados com papel tyvek. Junto com o produto é colada uma etiqueta de RFID conforme indicação abaixo:

Instrução de Uso
Fresas para Debridamento Ósseo em Zircônia




Fabricante: TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA – EPP
 ROD WASHINGTON LUIZ KM 172 (RUA 06) – LOTE B-8 – JD ANHANQUERA – RIO CLARO – SP
 CNPJ: 15524734000147 – Fone: +55 (19)3622-9500 – SAC: +55 (19)3622-9500
 F.T.: xxxxxxxxxxxx – CREA xxxxxxxxxxxx – Instrução de Uso pelo Site <http://www.techimportimplantes.com.br>

Nome Técnico:

Nome Comercial:

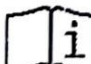



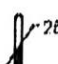




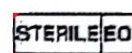
Modelo Comercial:

Registro ANVISA n. _____ Qtd.: un. Proibido Reprocessar / Uso Único
 Material:

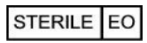








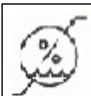


Ref:   

Lote: SN: _____

Advertências, Precauções, Manipulação, entre outras informações consultar Instruções de Uso – Revisão _____ – Consulta pelo Site
 PRODUTO ESTERIL - GAS OXIDO DE ETILENO

     25°C  75%    

Legenda da Simbologia

	Esterilizado por Óxido de Etileno		Data de Fabricação
	Data de Validade		Consultar Instruções de Uso
	Frágil, manusear com cuidado		Manter ao abrigo do sol
	Manter Seco		Limite de Temperatura
	Não reesterilizar		Limite de Umidade
	Não Utilizar se a embalagem estiver danificada		Produto de Uso único

ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO

Todos os produtos são acompanhados de um alerta de instrução de uso, contendo todas as informações para acesso ao site do fabricante, além de informações de solicitação de Instrução de Uso no formato impresso, conforme Instrução Normativa da ANVISA DE N° 04 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde:



ALERTA INSTRUÇÃO DE USO

Em atendimento a Instrução Normativa IN n°04 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, segue neste alerta os procedimentos para obtenção das Instruções de Uso em formato eletrônico no site do fabricante do produto e a obtenção no formato impresso.

Para obtenção da instrução de uso em formato impresso (quando necessário), favor entrar em contato com a Techimport que será enviado sem custo adicional (inclusive de envio). Solicitar para:
qualidade@techimportimplantes.com.br ou pelo telefone **(19)3522-9500**

Todas as Instruções de Uso disponibilizadas no site possuem a identificação da revisão e data do documento. Sendo que o usuário deve **atentar-se para a correta versão do documento** em relação à versão informada no rótulo do produto adquirido.

O documento contendo as Instruções de Uso para a correta utilização e manuseio do produto encontra-se disponível no endereço eletrônico:
www.techimportimplantes.com.br

Revisão: 01
Emissão: 2022