

Instrução de Uso
Fresas para Debridamento Osseo Zirconia



Nome Técnico: Brocas Cirurgicas

Nome Comercial: Fresas para Debridamento Osseo Zirconia

Registro ANVISA: 81118469019

Fabricante:

TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP

Rodovia Washington Luiz, Km 172, Rua 06 - Jardim Anhanguera

Condomínio Conpark - Caixa Postal 223 - Rio Claro/SP - CEP 13501-600

CNPJ: 15.524.734/0001-47

comercial@techimportimplantes.com.br

www.techimportimplantes.com.br

Telefone: +55 19 3522 – 9500

**PRODUTO ESTÉRIL
A EMPRESA RECOMENDA USO ÚNICO**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Nome Técnico: Brocas Cirurgicas

Nome Comercial: Fresas para Debridamento Osseo Zirconia

Composto por: Instrumentais

Registro ANVISA: 81118469019

Modelos comerciais: Ver Tabela 1

Metodo de Esterilização: ETO

Validade: 3 anos apartir da data de Esterilização

DESCRIÇÃO DO PRODUTO MÉDICO

Os instrumentais pertencentes a esse registro são utilizados para auxiliar a cirurgia durante os procedimentos cirurgicos.

Tabela 1 – Modelos Comerciais

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
Ti134.8635.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 250MM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 255MM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 260MM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 265MM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 270MM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 275MM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 280MM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 285MM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 290MM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 295MM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 300MM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 305MM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 310MM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 315MM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 320MM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 325MM ZIRCÔNIA

TI134.8635.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 330MM ZIRCÔNIA
TI134.8635.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 335MM ZIRCÔNIA
TI134.8635.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 340MM ZIRCÔNIA
TI134.8635.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 345MM ZIRCÔNIA
TI134.8635.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 350MM ZIRCÔNIA
TI134.8635.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 355MM ZIRCÔNIA
TI134.8635.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 360MM ZIRCÔNIA
TI134.8640.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 250MM ZIRCÔNIA
TI134.8640.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 255MM ZIRCÔNIA
TI134.8640.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 260MM ZIRCÔNIA
TI134.8640.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 265MM ZIRCÔNIA
TI134.8640.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 270MM ZIRCÔNIA
TI134.8640.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 275MM ZIRCÔNIA
TI134.8640.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 280MM ZIRCÔNIA
TI134.8640.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 285MM ZIRCÔNIA
TI134.8640.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 290MM ZIRCÔNIA
TI134.8640.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 295MM ZIRCÔNIA
TI134.8640.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 300MM ZIRCÔNIA
TI134.8640.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 305MM ZIRCÔNIA
TI134.8640.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 310MM ZIRCÔNIA
TI134.8640.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 315MM ZIRCÔNIA
TI134.8640.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 320MM ZIRCÔNIA
TI134.8640.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 325MM ZIRCÔNIA
TI134.8640.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 330MM ZIRCÔNIA
TI134.8640.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 335MM ZIRCÔNIA
TI134.8640.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 340MM ZIRCÔNIA
TI134.8640.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 345MM ZIRCÔNIA
TI134.8640.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 350MM ZIRCÔNIA
TI134.8640.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 355MM ZIRCÔNIA
TI134.8640.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 360MM ZIRCÔNIA
TI134.8645.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 250MM ZIRCÔNIA

TI134.8645.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 255MM ZIRCÔNIA
TI134.8645.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 260MM ZIRCÔNIA
TI134.8645.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 265MM ZIRCÔNIA
TI134.8645.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 270MM ZIRCÔNIA
TI134.8645.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 275MM ZIRCÔNIA
TI134.8645.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 280MM ZIRCÔNIA
TI134.8645.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 285MM ZIRCÔNIA
TI134.8645.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 290MM ZIRCÔNIA
TI134.8645.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 295MM ZIRCÔNIA
TI134.8645.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 300MM ZIRCÔNIA
TI134.8645.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 305MM ZIRCÔNIA
TI134.8645.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 310MM ZIRCÔNIA
TI134.8645.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 315MM ZIRCÔNIA
TI134.8645.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 320MM ZIRCÔNIA
TI134.8645.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 325MM ZIRCÔNIA
TI134.8645.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 330MM ZIRCÔNIA
TI134.8645.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 335MM ZIRCÔNIA
TI134.8645.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 340MM ZIRCÔNIA
TI134.8645.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 345MM ZIRCÔNIA
TI134.8645.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 350MM ZIRCÔNIA
TI134.8645.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 355MM ZIRCÔNIA
TI134.8645.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 360MM ZIRCÔNIA
TI134.8650.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 250MM ZIRCÔNIA
TI134.8650.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 255MM ZIRCÔNIA
TI134.8650.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 260MM ZIRCÔNIA
TI134.8650.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 265MM ZIRCÔNIA
TI134.8650.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 270MM ZIRCÔNIA
TI134.8650.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 275MM ZIRCÔNIA
TI134.8650.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 280MM ZIRCÔNIA
TI134.8650.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 285MM ZIRCÔNIA
TI134.8650.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 290MM ZIRCÔNIA

TI134.8650.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 295MM ZIRCÔNIA
TI134.8650.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 300MM ZIRCÔNIA
TI134.8650.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 305MM ZIRCÔNIA
TI134.8650.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 310MM ZIRCÔNIA
TI134.8650.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 315MM ZIRCÔNIA
TI134.8650.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 320MM ZIRCÔNIA
TI134.8650.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 325MM ZIRCÔNIA
TI134.8650.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 330MM ZIRCÔNIA
TI134.8650.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 335MM ZIRCÔNIA
TI134.8650.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 340MM ZIRCÔNIA
TI134.8650.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 345MM ZIRCÔNIA
TI134.8650.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 350MM ZIRCÔNIA
TI134.8650.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 355MM ZIRCÔNIA
TI134.8650.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 360MM ZIRCÔNIA
TI134.8655.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 250MM ZIRCÔNIA
TI134.8655.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 255MM ZIRCÔNIA
TI134.8655.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 260MM ZIRCÔNIA
TI134.8655.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 265MM ZIRCÔNIA
TI134.8655.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 270MM ZIRCÔNIA
TI134.8655.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 275MM ZIRCÔNIA
TI134.8655.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 280MM ZIRCÔNIA
TI134.8655.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 285MM ZIRCÔNIA
TI134.8655.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 290MM ZIRCÔNIA
TI134.8655.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 295MM ZIRCÔNIA
TI134.8655.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 300MM ZIRCÔNIA
TI134.8655.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 305MM ZIRCÔNIA
TI134.8655.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 310MM ZIRCÔNIA
TI134.8655.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 315MM ZIRCÔNIA
TI134.8655.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 320MM ZIRCÔNIA
TI134.8655.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 325MM ZIRCÔNIA
TI134.8655.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 330MM ZIRCÔNIA

TI134.8655.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 335MM ZIRCÔNIA
TI134.8655.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 340MM ZIRCÔNIA
TI134.8655.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 345MM ZIRCÔNIA
TI134.8655.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 350MM ZIRCÔNIA
TI134.8655.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 355MM ZIRCÔNIA
TI134.8655.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 360MM ZIRCÔNIA
TI134.8660.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 250MM ZIRCÔNIA
TI134.8660.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 255MM ZIRCÔNIA
TI134.8660.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 260MM ZIRCÔNIA
TI134.8660.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 265MM ZIRCÔNIA
TI134.8660.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 270MM ZIRCÔNIA
TI134.8660.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 275MM ZIRCÔNIA
TI134.8660.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 280MM ZIRCÔNIA
TI134.8660.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 285MM ZIRCÔNIA
TI134.8660.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 290MM ZIRCÔNIA
TI134.8660.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 295MM ZIRCÔNIA
TI134.8660.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 300MM ZIRCÔNIA
TI134.8660.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 305MM ZIRCÔNIA
TI134.8660.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 310MM ZIRCÔNIA
TI134.8660.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 315MM ZIRCÔNIA
TI134.8660.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 320MM ZIRCÔNIA
TI134.8660.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 325MM ZIRCÔNIA
TI134.8660.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 330MM ZIRCÔNIA
TI134.8660.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 335MM ZIRCÔNIA
TI134.8660.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 340MM ZIRCÔNIA
TI134.8660.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 345MM ZIRCÔNIA
TI134.8660.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 350MM ZIRCÔNIA
TI134.8660.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 355MM ZIRCÔNIA
TI134.8660.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 360MM ZIRCÔNIA

COMPOSIÇÃO

O materiais selecionados para composição se encontram listados abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MATERIA-PRIMA
Ti134.8635.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 250MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 255MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 260MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 265MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 270MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 275MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 280MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 285MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 290MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 295MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 300MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 305MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 310MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 315MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 320MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 325MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 330MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 335MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 340MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 345MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 350MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 355MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8635.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø3,5 x 360MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8640.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 250MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8640.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 255MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8640.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 260MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8640.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 265MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8640.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 270MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA

Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo Zirconia

Ti134.8640.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 275MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8640.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 280MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8640.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 285MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8640.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 290MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8640.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 295MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8640.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 300MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8640.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 305MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8640.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 310MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8640.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 315MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8640.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 320MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8640.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 325MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8640.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 330MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8640.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 335MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8640.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 340MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8640.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 345MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8640.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 350MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8640.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 355MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8640.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,0 x 360MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8645.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 250MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8645.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 255MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8645.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 260MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8645.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 265MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8645.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 270MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8645.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 275MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8645.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 280MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8645.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 285MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8645.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 290MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8645.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 295MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8645.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 300MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8645.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 305MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8645.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 310MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA

Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo Zirconia

Ti134.8645.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 315MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8645.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 320MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8645.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 325MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8645.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 330MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8645.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 335MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8645.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 340MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8645.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 345MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8645.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 350MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8645.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 355MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8645.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø4,5 x 360MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8650.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 250MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8650.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 255MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8650.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 260MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8650.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 265MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8650.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 270MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8650.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 275MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8650.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 280MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8650.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 285MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8650.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 290MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8650.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 295MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8650.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 300MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8650.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 305MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8650.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 310MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8650.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 315MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8650.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 320MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8650.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 325MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8650.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 330MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8650.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 335MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8650.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 340MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8650.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 345MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8650.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 350MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA

Instrução de Uso

Fresas para Debridamento Osseo Zirconia

Ti134.8650.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 355MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8650.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,0 x 360MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8655.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 250MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8655.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 255MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8655.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 260MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8655.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 265MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8655.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 270MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8655.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 275MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8655.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 280MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8655.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 285MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8655.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 290MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8655.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 295MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8655.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 300MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8655.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 305MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8655.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 310MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8655.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 315MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8655.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 320MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8655.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 325MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8655.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 330MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8655.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 335MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8655.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 340MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8655.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 345MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8655.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 350MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8655.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 355MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8655.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø5,5 x 360MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8660.250	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 250MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8660.255	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 255MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8660.260	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 260MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8660.265	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 265MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8660.270	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 270MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8660.275	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 275MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA

Ti134.8660.280	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 280MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8660.285	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 285MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8660.290	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 290MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8660.295	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 295MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8660.300	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 300MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8660.305	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 305MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8660.310	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 310MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8660.315	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 315MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8660.320	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 320MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8660.325	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 325MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8660.330	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 330MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8660.335	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 335MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8660.340	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 340MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8660.345	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 345MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8660.350	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 350MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8660.355	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 355MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA
Ti134.8660.360	FRESA ESFÉRICA ENDOCUT Ø6,0 x 360MM ZIRCÔNIA	AÇO INOXIDÁVEL – ASTM F899 COM ZIRCÔNIA

INDICAÇÃO E FINALIDADE

O **Fresas para Debridamento Osseo Zirconia** é indicado para auxiliar o cirurgião nos procedimentos cirurgicos, conforme tabela abaixo:

CONTRAINDICAÇÃO

Não se Aplica.

ADVERTENCIAS E PRECAUÇÕES

Os instrumentais aqui descritos devem ser utilizados apenas com produtos Techimport.

ESTERILIZAÇÃO

O produto é fornecido na condição Estéril, em Óxido de Etileno.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar e transportar em local seco e fresco, com temperatura Máx. de 25°C e umidade relativa de 75% e ao abrigo da luz solar direta.

Transportar com cuidado para evitar a queda e atrito a fim de não danificar a embalagem e o dispositivo. Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte e conservação das referências do lote devem ser adotados em conjunto com as Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos Médicos e conforme as diretrizes da RDC-665

PRAZO DE VALIDADE E REPROCESSAMENTO

Prazo de validade é de 3 anos a partir da data de esterilização, após aberto o mesmo deve ser descartado caso não seja utilizado imediatamente.

DESCARTE DO DISPOSITIVO

Os dispositivos devem ser inutilizados para uso antes do descarte. Recomendamos que as peças sejam limadas, entortadas ou cortadas para sua inutilização. O descarte deverá obedecer às normas relativas a eliminação de lixo hospitalar contaminante, descartando-se em recipientes apropriados e com identificação clara de que se trata de lixo contaminante.

RECLAMAÇÃO/ATENDIMENTO AO CLIENTE: Reclamações relacionadas a algum efeito adverso que afete a segurança do usuário, como produto não funcionando, dano no componente metálico implantável, problemas graves ou mortes relacionadas a esses componentes o cirurgião responsável deverá comunicar imediatamente este evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm> e a **TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP** através do e-mail qualidade@techimportimplantes.com.br ou pelo telefone (19) 3522-9500. Caso ocorra algum evento adverso ou queixa técnica, o cirurgião responsável ou o profissional da saúde poderá fazer a comunicação do evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm>

FORMA DE APRESENTAÇÃO

Fresas para Debridamento Osseo Zirconia é fornecido na condição esteril, comercializado em blister primário e secundário, ambos fabricados em pet (Polietileno tereftalato) virgem conformado por termoformagem e selados por barreiras de papel Tyvek. Os blisters são colocados em caixa de papel kraft junto com os rótulos de rastreabilidade. As embalagens são identificadas com uma etiqueta RFID conforme indicação abaixo:

Instrução de Uso
Fresas para Debridamento Osseo Zirconia

Fabricante: TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - EPP
 R.DD WASHINGTON LUIZ KM 172 (RUA 06) - LOTE B-8 - JD ANHANQUERA - RIO CLARO - SP
 CNPJ:15524734000147 - Fone: +55 (19)3622-9600 - SAC: +55 (19)3622-9600
 R.T.: Eduarico Henrique Silva Wolf - CREA 6070056408 - Instrucao de Uso pelo Site <http://www.techimportimplanta.com.br>

STERILE EO

Nome Técnico:

Nome Comercial:

Modelo Comercial:

Registro ANVISA n. _____ Qtde.: un. Proibido Reprocessar / Uso Unico

Material:

Ref:   

Lote: SN: _____

Advertências, Precauções, Manipulação, entre outras informações consultar Instruções de Uso - Revisão - Consulta pelo Site
 PRODUTO ESTERIL - GAS OXIDO DE ETILENO

        

Legenda da Simbologia

	Esterilizado por Óxido de Etileno		Data de Fabricação
	Data de Validade		Consultar Instruções de Uso
	Frágil, manusear com cuidado		Manter ao abrigo do sol
	Manter Seco		Limite de Temperatura
	Não reesterilizar		Limite de Umidade
	Não Utilizar se a embalagem estiver danificada		Produto de Uso único

ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO

Todos os produtos são acompanhados de um alerta de instrução de uso, contendo todas as informações para acesso ao site do fabricante, além de informações de solicitação de Instrução de Uso no formato impresso, conforme Instrução Normativa da ANVISA DE N° 04 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde:



ALERTA INSTRUÇÃO DE USO

Em atendimento a Instrução Normativa IN n°04 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, segue neste alerta os procedimentos para obtenção das Instruções de Uso em formato eletrônico no site do fabricante do produto e a obtenção no formato impresso.

Para obtenção da instrução de uso em formato impresso (quando necessário), favor entrar em contato com a Techimport que será enviado sem custo adicional (inclusive de envio). Solicitar para: **qualidade@techimportimplantes.com.br** ou pelo telefone **(19)3522-9500**

Todas as Instruções de Uso disponibilizadas no site possuem a identificação da revisão e data do documento. Sendo que o usuário deve **atentar-se para a correta versão do documento** em relação à versão informada no rótulo do produto adquirido.

O documento contendo as Instruções de Uso para a correta utilização e manuseio do produto encontra-se disponível no endereço eletrônico:
www.techimportimplantes.com.br

Revisão: 01
Emissão: 2022

EFEITOS ADVERSOS

Em casos de evento adverso ou queixa técnica o cirurgião responsável ou o profissional da saúde deverá fazer a comunicação através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://portal.anvisa.gov.br/notificacoes/produtos>

OUTRAS INFORMAÇÕES

Fabricado e distribuído por:

TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP

Rodovia Washington Luiz, Km 172, Rua 06 - Jardim Anhanguera

Condomínio Conpark - Caixa Postal 223 - Rio Claro/SP - CEP 13501-600

CNPJ: 15.524.734/0001-47

comercial@techimportimplantes.com.br

www.techimportimplantes.com.br

Telefone: +55 19 3522 – 9500